

Sets de infusión neria™



Especificaciones de producto

Aguja:	Acero inoxidable
Ángulo de inserción:	90 grados (recto)
Desconexión:	No
Calibre de la aguja:	27G o 29G
Longitud de la aguja:	6, 8, o 10 mm
Longitud del tubo:	60, 80 o 110 cm
Adhesivo:	Incorporado

Calibre de la aguja

- 27G
- 29G

Longitud de la aguja

- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm

Longitud del tubo


- 60 cm
- 80 cm
- 110 cm

El set de infusión neria™ se comercializa en cajas de 10 unidades.


Ficha de producto

Distribuido por:


Guía de uso para el set de infusión neria™

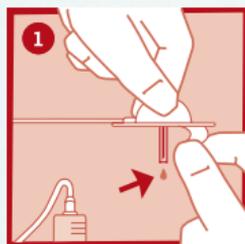


Cebe el tubo del set de acuerdo a las instrucciones detalladas en el prospecto de la bomba de infusión. Posteriormente, retire el papel protector del apósito adhesivo.

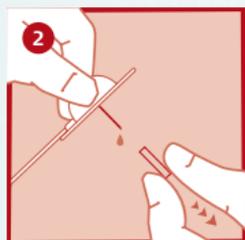

Retire el protector de la aguja.

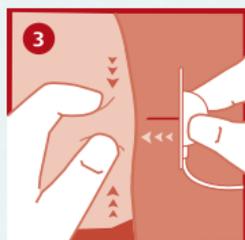

Pellizque la piel con una mano e inserte el equipo de infusión neria™ de forma vertical, utilizando las aletas de aplicación.

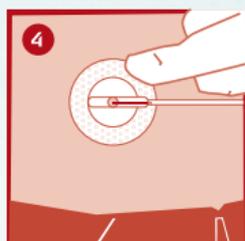

Presione el apósito adhesivo para asegurar la correcta aplicación del set de infusión neria™ en la piel.

Por favor, tenga en cuenta que esta guía solamente ilustra algunos de los pasos a seguir en la aplicación de los sets de infusión neria™, y que en ningún caso sustituye la lectura de las instrucciones de uso completas que figuran en el prospecto incorporado en la caja del producto.