


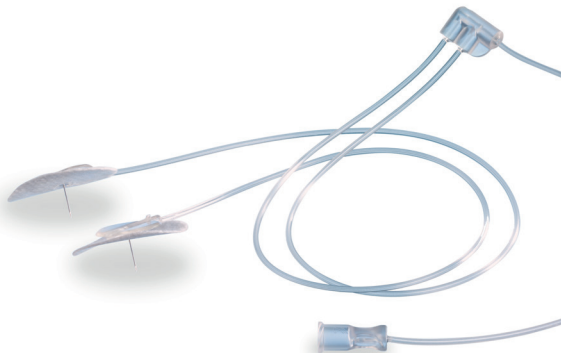

Set de infusión neria™ multi

neria™ multi es un set de infusión subcutánea, que permite la administración de grandes volúmenes de fármaco en un período corto de tiempo, gracias a la posibilidad de administración simultánea en más de un punto de infusión.

Especificaciones de producto

Número de agujas: Sistema bifurcado o cuadrifurcado.

Aguja: Acero inoxidable

Ángulo de inserción: 90 grados (vertical)


Calibre de la aguja: 27G

Adhesivo: Adhesivo acrílico incorporado, poliéster no tejido suave con la piel¹


Pinza clamp: Sí

Referencia	Descripción del producto	Número agujas	Longitud de la aguja	Unidades/caja	Volumen de Cebado
721060-2738	neria™ multi (bifurcado)	2	8 mm	10	0.36 ml
721060-4731	neria™ multi (cuadrifurcado)	4	10 mm	10	0.51 ml

Referencia: 1. Biological Safety Testing, October 2011, Data on File, Unomedical a/s.

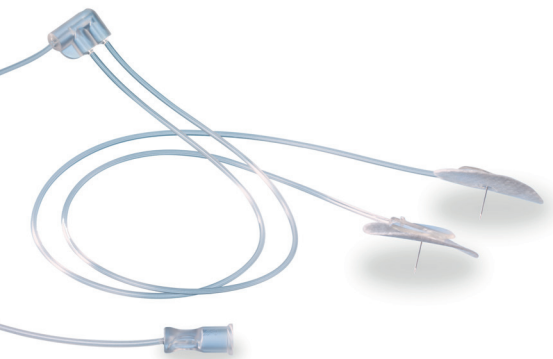


Guía de uso para el set de infusión neria™ multi

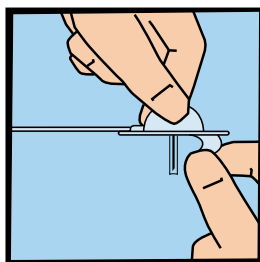


1.

Cebe el tubo del set de acuerdo a las instrucciones detalladas en el prospecto de la bomba de infusión. Posteriormente retire el papel protector del apósito adhesivo.

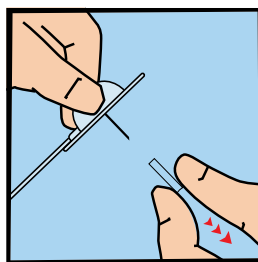


2.

Gire suavemente y retire el protector de la aguja.

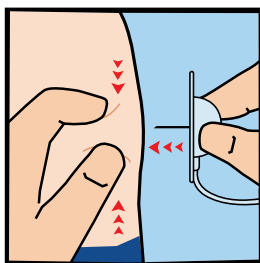

3.

Pellizque con una mano e inserte el set de infusión neria™ multi en un ángulo de 90 grados (vertical).

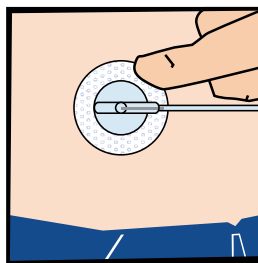

4.

Presione el apósito adhesivo para asegurar la correcta aplicación del set de infusión neria™ multi en la piel. Compruebe frecuentemente el punto de infusión.

Repita los pasos 1-4 para cada punto de infusión.

Por favor, tenga en cuenta que esta guía solamente ilustra algunos de los pasos a seguir en la aplicación de los sets de infusión neria™ multi, y que en ningún caso sustituye la lectura de las instrucciones de uso completas que figuran en el prospecto incorporado en la caja del producto.

neria™ es una marca de Unomedical s/a/s
© 2018 ConvaTec Inc.