

So wechseln Sie Ihren **AQUACEL® Ag+ Extra** Wundverband zu Hause

Warum muss ich meinen Wundverband wechseln?

Ein Wundverband ist dafür ausgelegt, einen Bereich abzudecken und zu schützen, um die Wunde sauber zu halten. Der Wundverband fungiert als Barriere, um die Menge an Bakterien zu verringern, die in die Wunde gelangen und die zu einer Infektion führen können.

Wann muss ich meinen Wundverband wechseln?

Sie sollten Ihren Wundverband nach den Vorgaben Ihres Arztes und Ihrer medizinischen Fachkraft wechseln oder wenn ihr Wundverband beginnt durchzunässen.

Diese Hinweise zeigen Ihnen, wie Sie den **AQUACEL® Ag+ Extra** Wundverband richtig anwenden.



Es ist wichtig, dass die Wunde immer mit einem Wundverband bedeckt ist, um das Risiko einer Infektion zu verringern.



Was ist der **AQUACEL® Ag+ Extra** Wundverband?

AQUACEL® Ag+ Extra ist ein silberhaltiger Wundverband mit Hydrofiber® Technologie, der für den direkten Kontakt mit der Wunde entwickelt wurde. Das Silber im Wundverband sorgt dafür, dass schädliche Bakterien in Ihrer Wunde abgetötet werden. Der Wundverband bildet ein weiches Gel, sobald er mit Wundflüssigkeit in Kontakt kommt. Diese Gelbildung ist erwünscht und trägt dazu bei, die überschüssige Wundflüssigkeit aufzunehmen, Ihre Wunde sauber zu halten und so den Heilungsprozess zu unterstützen.

Vor dem Verbandwechsel

1. Handhygiene



Waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife.
Danach gründlich mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.

2. Legen Sie die benötigte Ausrüstung bereit.



Saubere Einmalhandschuhe, 3 Paar



Spiegel zum Betrachten
der Wunde (bei Bedarf)




Pflasterlöser
(bei Bedarf)



Einweg-Müllbeutel für
benutzte Wundverbände



Wundspüllösung und
sterile Kompressen

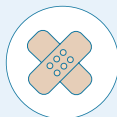

Wundverband



Feuchtigkeitshautpflege
(nach Bedarf)



Klebeband und
saubere Schere

3. Vorherigen Wundverband entfernen und entsorgen





Entfernen Sie den Wundverband mit sauberen Handschuhen
und entsorgen Sie ihn in einem Plastikbeutel.
Danach Handschuhe entsorgen.

Verbandanlage





1 Hände waschen / Handschuhe

Waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie gründlich mit einem sauberen Handtuch ab. Legen Sie dann saubere Handschuhe an.

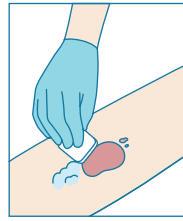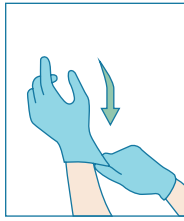


2 Wunde reinigen

Reinigen Sie Ihre Wunde von innen nach außen mit einer sterilen Kompresse und einer Wundspüllösung, die Ihnen von Ihrem Arzt oder medizinischer Fachkraft empfohlen wurde.

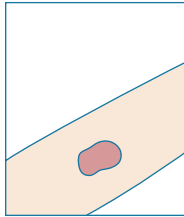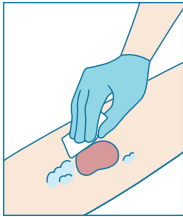

3 Haut abtrocknen


Achten Sie darauf, dass die Haut an den Wundrändern sauber und trocken ist. Bitte die Wundumgebung nicht tupfen, sondern wischen. Dabei pro Wischvorgang eine neue sterile Kompresse verwenden. Danach Handschuhe entsorgen.

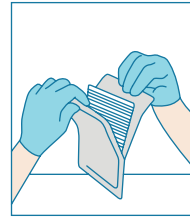

4 Hände waschen / Handschuhe wechseln



5 Wundverband öffnen

Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung mit dem **AQUACEL® Ag+ Extra** Wundverband und versuchen Sie, diesen so wenig wie möglich zu berühren.

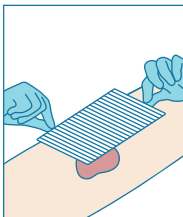

6 Wundverband anlegen

Legen Sie den **AQUACEL® Ag+ Extra** Wundverband direkt auf die Wunde. Der Wundverband soll die Wundränder um mindestens 1 cm überlappen. (Bei Bedarf kann der Wundverband zugeschnitten werden).

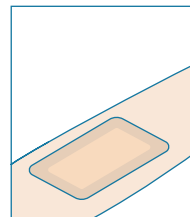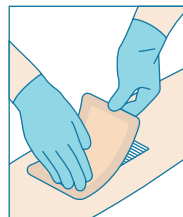

7 Wundverband fixieren und sichern

Legen Sie einen fixierenden Schutzverband an, um den **AQUACEL® Ag+ Extra** Wundverband auf der Wunde zu befestigen. Bitte folgen Sie bei der Auswahl der Fixierung der Anweisung Ihres Arztes oder medizinischen Fachkraft.



**Bitte wenden Sie sich an
Ihren Arzt, wenn Sie folgende
Symptome beobachten:**

- Neue oder sich vergrößemde Wunde
- Neue oder sich ausbreitende Rötung oder Schwellung der wundumgebenden Haut
- Neue oder stärkere Schmerzen
- Neuer oder stärkerer Geruch nach dem Reinigen der Wunde
- Mehr Wundexsudat (Flüssigkeit, die aus der Wunde austritt) als bisher



Vorsichtsmaßnahmen

- Kein Wundverband darf länger als 7 Tage auf der Wunde verbleiben, ohne gewechselt zu werden.
- Sollte der Wundverband sich nur schwer entfernen lassen, benetzen Sie ihn großzügig mit steriler Kochsalzlösung und lassen Sie diese etwas einweichen.
- Nicht verwenden, wenn die Einzelverpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Bei Raumtemperatur und trocken lagern.

**Weitere Hinweise zu Einsatz-
gebieten und Vorsichtsmaß-
nahmen entnehmen Sie bitte
den Anwendungshinweisen
auf dem Beipackzettel.**

Mit den nebenstehenden PZN-Nummern (D), den REF (A) und den Pharmacodes (CH) stellen Sie sicher, dass Sie den Original-Wundverband von Convatec erhalten haben.

AQUACEL[®] Ag+ Wundverbände

Antimikrobielle, silberhaltige Wundauflage mit Anti-Biofilm-Formel

Größe	Packungs- inhalt	PZN (D)	REF (A)	Pharma- code (CH)
AQUACEL[®] Ag+ Extra™ Wundauflage				
5 x 5 cm	10 Stück	102 038 56	413 566	585 01 57
10 x 10 cm	10 Stück	102 038 10	413 567	780 38 35
15 x 15 cm	5 Stück	102 038 27	413 568	585 01 86
20 x 30 cm	5 Stück	102 038 33	413 569	585 01 92
4 x 10 cm	10 Stück	102 037 44	413 581	585 02 23
4 x 20 cm	10 Stück	102 037 50	413 598	585 02 46
4 x 30 cm	10 Stück	102 037 67	413 599	585 02 52
AQUACEL[®] Ag+ Tamponade				
1 x 45 cm	5 Stück	102 037 73	413 570	585 02 00
2 x 45 cm	5 Stück	102 038 04	413 571	585 02 17

Weitere Informationen

Diese Broschüre wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen Ihren Wundverband sicher und korrekt anzulegen und zu entfernen. Wenn Sie weiteren Rat zur Anwendung benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihre medizinische Fachkraft.

Zusätzliche Informationen zu Convatec Wundverbänden finden Sie auf unseren Internetseiten:



www.convatec.de/wundversorgung



www.convatec.at/wundversorgung



www.convatec.ch/wundversorgung

