

Set de infusión neria™ multi

neria™ multi es un set de infusión subcutánea, que permite la administración de grandes volúmenes de fármaco en un período corto de tiempo, gracias a la posibilidad de administración simultánea en más de un punto de infusión.

Especificaciones de producto

Número de agujas: Sistema bifurcado o cuadrifurcado.

Calibre de la aguja: 27G

Aguja: Acero inoxidable

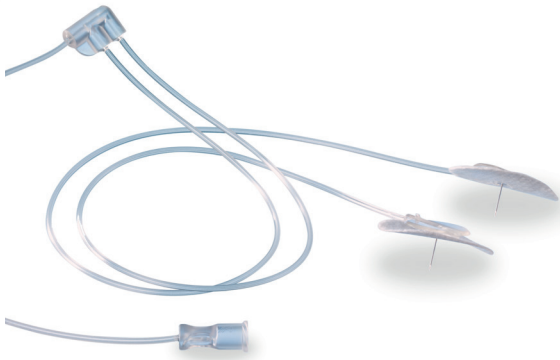
Adhesivo: Adhesivo acrílico incorporado, poliéster no tejido suave con la piel¹

Ángulo de inserción: 90 grados (vertical)

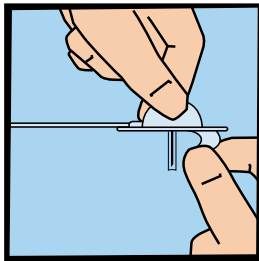
Pinza clamp: Sí

Referencia	Descripción del producto	Número agujas	Longitud de la aguja	Unidades/caja	Volumen de Cebado
721060-2738	neria™ multi (bifurcado)	2	8 mm	10	0.36 ml
721060-4731	neria™ multi (cuadrifurcado)	4	10 mm	10	0.51 ml

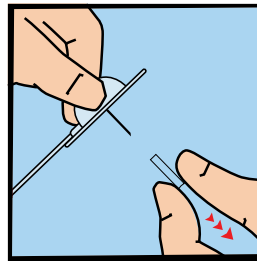
Referencia: 1. Biological Safety Testing, October 2011, Data on File, Unomedical a/s.



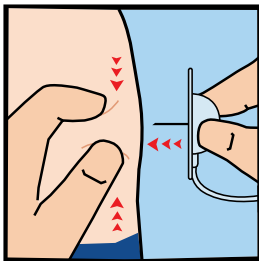
Guía de uso para el set de infusión neria™ multi

**1.**

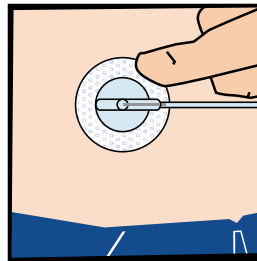
Cebe el tubo del set de acuerdo a las instrucciones detalladas en el prospecto de la bomba de infusión. Posteriormente retire el papel protector del apósito adhesivo.

**2.**

Gire suavemente y retire el protector de la aguja.

**3.**

Pellizque con una mano e inserte el set de infusión neria™ multi en un ángulo de 90 grados (vertical).

**4.**

Presione el apósito adhesivo para asegurar la correcta aplicación del set de infusión neria™ multi en la piel. Compruebe frecuentemente el punto de infusión.

Repita los pasos 1-4 para cada punto de infusión.

Por favor, tenga en cuenta que esta guía solamente ilustra algunos de los pasos a seguir en la aplicación de los sets de infusión neria™ multi, y que en ningún caso sustituye la lectura de las instrucciones de uso completas que figuran en el prospecto incorporado en la caja del producto.

neria™ es una marca de Unomedical s/a
© 2018 ConvaTec Inc.



AP-019182-ES
NER1801

