

NEW BRAND

# ESENTA™

エセンタ

長らく皆様にご愛顧いただきました  
「ニルタック™ (粘着剥離剤)」と「シレッセ™ (皮膚被膜剤)」が  
装いも新たに「ESENTA (エセンタ)™」ブランドとして  
生まれ変わりました。

**エセンタ™**  
**皮膚被膜剤**

(旧シレッセ™皮膚被膜剤)

ひまぐ

**エセンタ™**  
**粘着剥離剤**

(旧ニルタック™粘着剥離剤)



## エセンタ™皮膚被膜剤

	注文番号	入数	本体価格(税込み)
スプレータイプ	423288	1本	2,178円
ワイブタイプ	423282	30枚	3,564円

## エセンタ™粘着剥離剤

	注文番号	入数	本体価格(税込み)
スプレータイプ	423289	1本	2,640円
ワイブタイプ	423281	30枚	3,564円

## エセンタ™ 皮膚被膜剤の使い方

スプレー  
タイプ



本品をよく振り、ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位に噴霧してください

ワイプタイプ



シートを広げ、ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位を拭いてください

## エセンタ™ 粘着剥離剤の使い方

スプレー  
タイプ



粘着剤の周辺部に噴霧後、数秒待ち、粘着剤を皮膚からゆっくりと剥がしてください。

ワイプタイプ



シートを広げ、速やかに、皮膚に残った粘着剤をシートでやさしく拭き取り、その後、ストーマ周囲を石鹸とぬるま湯で清潔にしてください。

注意

傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位（眼、口、耳、鼻、膣など）には使用しないでください。アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。



**ConvaTec**

よりそい、つなぐ

**コンバテック ジャパン株式会社**

お客様相談窓口

 **0120-532384** <http://www.convatec.com>