

# 贴敷指南\*



### 贴敷窍门：

- 1.应始终保持伤口周围皮肤的清洁与干燥。
- 2.贴敷前始终将敷料捂热至体温。这样有助于与皮肤粘合。
- 3.选择Versiva® XC®敷料尺寸时，确保敷料内护垫覆盖伤口，且重叠1cm边缘。
- 4.应在揭除保护层之前完成所需的裁剪操作，如果患者需要淋浴，应保证敷料的所有切缘封闭。
- 5.如果使用两层敷料处理渗出液，即便已将二级敷料更换为Versiva® XC®，仍需要继续原来操作（保持原来一级敷料）。

### 标准贴敷：

Versiva® XC™敷料的标准贴敷方法：



选择敷料的尺寸，确保采用Hydrofiber®技术敷料大于伤口面积，并且为了更好地贴敷，应使其温度与室温相同。




揭下敷料保护层，并将敷料护垫放在伤口的中心，直接覆盖在伤口上。将敷料的边缘抚平到所需位置。




在伤口上贴敷时，将手放在敷料上几分钟使其变暖，以便良好地与皮肤接触，并且抚平敷料上的所有皱褶。

## 贴敷部位


骶尾部 - 21×25cm



从敷料上揭下背面的中心保护层。



拿住保护层剩下的突起。将敷料折成一半，使泡沫背面相互接触。将折叠处放入臀沟内。揭除剩下的保护层。



将敷料中心护垫与伤口接触，并展平贴好敷料的边缘。贴敷时，将手放在敷料上几分钟使其变暖，以便良好地与皮肤接触，并抚平敷料上的所有皱褶。

足跟部 - 18.5cm x 20.5cm



揭除敷料背面的保护层和较大部分的突起，将较小部分的突起留在边缘上。将较大的一侧贴敷在足跟背侧并固定。



将敷料从足跟背侧折叠至足底处。用较小的突起揭下保护层，并完全向下贴好面积较小的一侧。



贴敷时，将手放在敷料上几分钟使其变暖，以便良好地与皮肤接触，并抚平敷料上的所有皱褶。

足部较小的患者，使用10cm x 10cm或14cm x 14cm粘性Versiva® XC®敷料方法



选择适当尺寸的正方形粘性敷料。切勿揭下保护层。如图所示，沿对角线剪开，深度约为5cm。




揭下敷料背面的中心保护层，并将其放置在足跟背部，保证三角形“侧翼”不与皮肤或敷料接触。揭下剩余的保护层突起，并轻轻地沿着足跟折叠敷料至脚底部，固定敷料的三角形“侧翼”。



贴敷时，将手放在敷料上几分钟使其变暖，以便良好地与皮肤接触，并抚平敷料上的所有皱褶。

手指贴敷10cm x 10cm粘性Versiva® XC®敷料方法



选择适当尺寸的粘性Versiva® XC®敷料。将敷料裁剪成均匀的十字形。



将敷料的中心盖在伤口上，沿着手指的长度向下折叠十字的各边。



用敷料胶带固定十字形的各边。


手指/脚趾贴敷Versiva® XC®敷料方法



选择适当尺寸的粘性Versiva® XC®敷料。切勿揭下保护层。对半折叠敷料并剪出四个相等的开口，每个开口长约1.5cm，其大小与空间依照覆盖的手指/脚趾大小而定。




揭下保护层，并将敷料盖在脚趾或手指上，并使其穿过开口。确保敷料舒适不紧绷。




在皮肤上粘贴粘性胶条，沿着大拇指或脚趾折叠并固定。贴敷时，将手放在敷料上几分钟使其变暖，以便良好地与皮肤接触，并抚平敷料上的所有皱褶。


肘部贴敷10cm x 10cm或14cm x 14cm粘性Versiva® XC®敷料方法

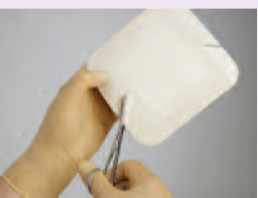

取出14cm x 14cm粘性Versiva® XC®敷料切。勿揭下保护层。如图所示，沿对角线剪开，深度约为5cm。




使患者的上臂部分外展。揭下背面的中心保护层，并将其贴敷在肘部的上方背侧，保证三角形“侧翼”不与皮肤或敷料接触。



轻轻地敷料折叠贴在上臂的下侧，包括敷料的三角形“侧翼”，并固定到位。贴敷时，将手放在敷料上几分钟使其变暖，以便良好地与皮肤接触，并抚平敷料上的所有皱褶。

## 其它使用部位

足跟部18.5cm x 20.5cm敷料用于乳房伤口

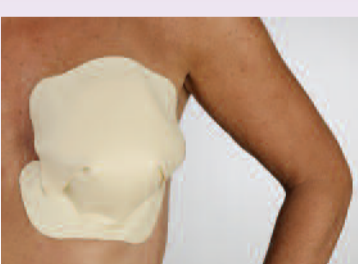

足跟敷料也可用于贴敷较为困难的部位，例如乳房。

骶尾部21cm x 25cm敷料用于腹部伤口



重力会影响伤口的类型。较大的敷料垫可以很好地适应腹部形状。

骶尾部21cm x 25cm敷料用于臀部伤口



骶尾部敷料适合臀部的轮廓，产品的曲线有助于患者舒适活动。

\* 完整的使用说明，请参阅Versiva® XC™敷料包装盒中的插页。

产品范围	
类型	包装尺寸
非粘性敷料	
7.5cm x 7.5cm	10
11cm x 11cm	10
15cm x 15cm	5
20cm x 20cm	5
粘性敷料	
10cm x 10cm	10
14cm x 14cm	10
19cm x 19cm	5
22cm x 22cm	5
粘性足跟部	
18.5cm x 20.5cm	5
粘性骶尾部	
21cm x 25cm	5

®/TM 表示ConvaTec公司商标。  
ConvaTec Ltd为授权用户。© 2009 ConvaTec Inc.版权所有。  
AP-008502-MM WCON548

