

Sensi-Care™ es ahora ESENTA™

LOS RESULTADOS
QUE QUIERES
SE VEN AHORA
MEJOR QUE
NUNCA.



PROTECTOR CUTÁNEO
CON BASE DE SILICONA
Protege la piel hasta
72 horas¹.

Para obtener más información, visite

<https://www.convatec.com/es-es/> o contáctenos a través de infotec@convatec.com o 93 602 37 37.

ESENTA™ Spray Protector cutáneo

ESENTA™



Descripción

- Protector Cutáneo formado mayoritariamente por mezcla de siliconas a base de copolímeros de siloxano no irritantes.

Instrucciones de Uso*

- Los sprays deben agitarse antes de usarse.
- Limpiar y secar la piel.
- Mantener a unos 10 cm del área que se desea tratar y aplicar una capa uniforme efectuando un movimiento de barrido.
- Asegurarse que se haya secado completamente antes de aplicar productos adhesivos, como dispositivos o apósitos.
- Es preciso realizar una nueva aplicación del spray protector cutáneo ESENTA™ con cada cambio de apósito o dispositivo para asegurar una protección completa.
- Es recomendable repetir la aplicación cada 12/72h, en función de las condiciones en las que se encuentre la superficie cutánea.
- Su formulación no produce la acumulación de película protectora sobre la superficie cutánea.

Contiene: Copolímeros de siloxano

Información para pedidos

Código Convatec	Código Nacional	Código SAP	Descripción	Tamaño
423286	206952.7	1729201	ESENTA™ Spray Protector cutáneo (28ml)	28ml Spray

Convatec le ofrece una línea completa para la protección cutánea y para satisfacer las necesidades de los pacientes y profesionales sanitarios.

www.convatec.com/es-es/

*Consulte el prospecto para obtener las instrucciones de uso completas.

®/™ indica marcas de Convatec. © 2022 Convatec Inc. AP-034127-MRL-ES ESE2201

Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e íconos) a las que hace referencia Convatec permanecen la propiedad de sus respectivos dueños.

Referencia: 1. Voegeli D, LBF® "No- Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

