

# ふぉーむらいと

## FoamLite<sup>™</sup> ConvaTec

### ご使用ガイド



医療機器届出番号:13B1X0071000004  
医療用品 (D4) 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏  
JMDNコード:34864000

販売名:ふぉーむらいと

| 注文番号    | 規格(パッドサイズ)           | 包装    | メーカー希望小売価格 |
|---------|----------------------|-------|------------|
| 00475   | 5.5×12cm (2.5×9.5cm) | 10枚/箱 | ¥2,100+消費税 |
| 00476   | 8×8cm (5×5cm)        |       | ¥2,100+消費税 |
| 00477   | 10×10cm (6.5×6.5cm)  |       | ¥2,600+消費税 |
| 00478   | 15×15cm (11×11cm)    |       | ¥5,200+消費税 |
| * 00479 | 5×5cm (2.5×2.5cm)    |       | ¥1,500+消費税 |
| * 00480 | 10×20cm (6.5×15cm)   |       | ¥5,200+消費税 |

\*2018年春 発売予定

#### 参考文献

1. MS D Kesteven. In Vitro Performance Characteristics of Foam Lite<sup>™</sup> ConvaTec. WHRI4680 MS132 Rev1. 16 May 2016; 1-9.  
2. Meulenaire F. Rücknagel H. Soft silicones Made Easy. Wounds International 2013 (May). Available from: [www.woundsinternational.com](http://www.woundsinternational.com)

※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。

®はConvaTec Inc.の登録商標です。©2022 ConvaTec Inc.



convatec

—よりそい、つながり—

製造販売元

コンバテック ジャパン株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-1-7

お客様相談窓口

☎ 0120-532384

<https://www.convatec.com/ja-jp/>

キズを保護する  
救急絆創膏

貼るのも、はがすのも  
やさしい

# ふぉーむらいと FoamLite ConvaTec

お肌に優しいシリコン粘着技術を取り入れた救急絆創膏です。

## キズをやさしくまもる3層構造

**防水性外層**<ポリウレタン>  
シャワー・入浴ができます<sup>1</sup>。  
紫外線をカットします。

**吸水性パッド**<ポリウレタン>  
吸収力があります。  
やわらかいクッションになります。

**創傷接触面**<シリコン>  
やさしく安全に貼りつきます。  
はがすときにもやさしい  
粘着剤です<sup>1,2</sup>。


様々な部位にフィットします。




! 本品をカットして使用する場合は、包帯やテープで固定して下さい。

## 貼り方

① 本品を貼付する前に、  
キズを洗浄し水分を拭き取ります。

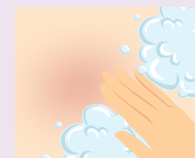

② 吸水性パッドの大きさが  
キズよりも周囲1cm程度  
大きいサイズの製品を選びます。

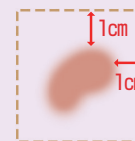

③ 外周の部分に  
シワが入らないように  
注意してお貼りください。



! 関節など曲がる部位には曲げた状態で本品を貼付します。

## はがし方

● 本品をはがす時は、  
周囲の皮膚を押えながら  
本品の隅をゆっくりと  
持ち上げるようにはがしてください。



### 交換の時期

キズから出てくるジクジクした液体が漏れ出してくる前、  
または、貼付中の本品パッド部の汚れが確認出来た時点で、  
新しいものに交換してください。

※最長でも7日以内に新しい本品に交換してください。

## 使用上の注意

! 本品を使用中にキズの周辺が赤く熱を持つ、腫れる、痛みが持続する場合には  
本品の使用を中止し、医療機関にて適切な治療を受けてください。

