

# Esteem® Tek Parça Ostomi Sistemi

Geliştirilmiş yeni sistem, size daha fazla konfor ve güvenlik sağlayacak şekilde dizayn edildi.



## ConvaTec'ten Geliştirilmiş Özellikler

### Akıllı Filtre

- Filtre üzerindeki şeffaf koruyucu film tabaka ve valf sistemi sayesinde kokuyu filtrelerken sadece gazın dışarı çıkması sağlanır. Koruyucu tabaka, filtreye gaita bulaşını engeller, tam performansla çalışan filtre torbanın şişmeden düz kalmasına olanak tanır.

### Konfor sağlayan dış yüzey

- Dokumasız materyalden üretilmiştir, sürtünmeye dayanıklıdır, su tutmaz, çabuk kurur, terlemeyi önler.

### Modern Şekil

- Modern, yuvarlaklaştırılmış şekli ile vücut hatlarına daha uyumludur.

### Kod Numarası

- Torba üzerinde basılı kod numarası sayesinde ayırt etmesi daha kolaydır.

### Lock-it-Pocket, Katla - Kilitle Sistemi

- Yeni saklama cebi, torba boyutunu kapalı torba boyutuna küçülterek daha kolay ve çok yönlü bir kullanım sağlar. InvisiClose® torbalardaki Katla-Kilitle sistemi, benzersiz bir şekilde ek güvenlik sağlar. Klips kullanımı gerektirmeyen, özel üretim birbiri içine geçen dişlerden oluşan sistem, güvenli bir kullanım sağlar; ıslansa da kapanabilir, kirlense de kolay temizlenir, koku tutmayan materyalden yapılmıştır.



ConvaTec




# Kullanımı Kolay, Lock-it-Pocket™ Katla Kilitle Sistemli ConvaTec® Boşaltmalı Tek Parça Torbalar

3 basit  
adım



Kuyruk kısmını 3 kez kendinize doğru katlayınız

Katladığınız kısmı ortadan kenarlara dışların birbirine geçmesini sağlayacak şekilde sıkıca bastırarak kilitleyin. Önemli: kilitlememiş kısım kalmamasına özen gösteriniz.

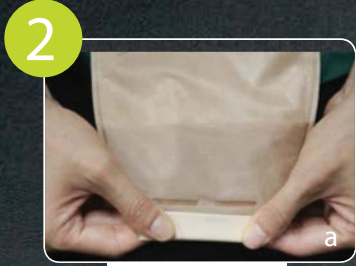

Ek güvenlik için Lock-it-Pocket™  
Katla Kilitle Sistemi cebini kullanın

Önce baş parmaklarınızı cebin içine yerleştirin (a)  
Sonra cebi içten dışa doğru ters çevirin (b)  
Kenarlarını düzelterek kuyruk kısmını torbanın  
içine kilitleyin. (c) Bu sayede torba boyutu da  
küçüleceği için ek konfor sağlayacaksınız. (d)

işte bu kadar!

Boşaltmasız Torbalar - Düz Adaptörlü		
Kod	Ürün İsmi	Kutu içi adet
416700	Şeffaf Torba 20/70MM	30
416701	Opak Torba 20/70MM	10
416707	Opak Torba 30MM	30
416708	Opak Torba Küçük Boy 30MM	30
416713	Opak Torba 40MM	30
416714	Opak Torba Küçük Boy 40MM	30
416715	Opak Torba 50MM	30
Boşaltmalı Torbalar - Düz Adaptörlü		
416718	Şeffaf Torba 20/70MM	10
416719	Opak Torba 20/70MM	10
416729	Opak Torba 30MM	10
416737	Opak Torba 40MM	10
416908	Şeffaf Torba 100MM	10
Boşaltmalı Torbalar - Konveks Adaptörlü		
416741	Opak Torba 22MM	10
416743	Opak Torba 25MM	10
416745	Opak Torba 28MM	10
416747	Opak Torba 32MM	10
416749	Opak Torba 35MM	10
416751	Opak Torba 38MM	10



ConvaTec Sağlık Ürünleri Limited Şirketi

Şehit İknur Keleş Sk. Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza No: 7/3-9 Kozyatağı 34742 Kadıköy - İstanbul  
Tel: 0 216 416 52 00 Faks: 0 216 416 28 30 e-mail: musterihizmetleri@convatec.com Ticaret Sicil No: İstanbul 693245