




NATURA[®]

TVAROVATEĽNÁ PODLOŽKA




1 Určenie správnej veľkosti.

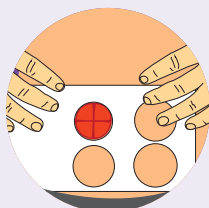

Odmerajte si stómiu a vyberte správnu veľkosť tvarovateľnej podložky.




Vymodelujte podložku pomocou prstov, potom vyroľujte a vytvarujte adhezívum tak, aby zodpovedalo veľkosti a tvaru stómie. **Nenaťahujte, neťahajte ani nestrihajte.**

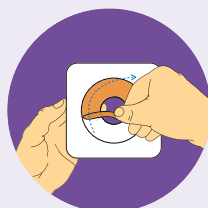


Odstráňte priehľadnú ochrannú fóliu zo zadnej strany podložky. Priložte otvor nad vašu stómiu.


2 Aplikácia podložky na pokožku.

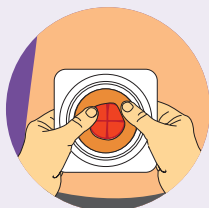

Prítlačte podložku v mieste aplikácie a pokiaľ to bude potrebné, prispôbte už vyroľovaný otvor na adhezíve podľa veľkosti stómie. Jemne pridržte podložku na koži po dobu asi 30 sekúnd.

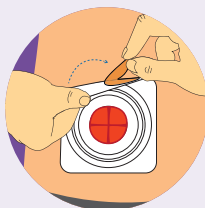


Odstráňte bielu ochrannú fóliu z okrajov podložky.

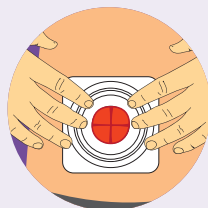


Jemne prítlačte na kožu a vyrovnajte záhyby na podložke.

3 Aplikácia vrecka a jeho uzavretie.

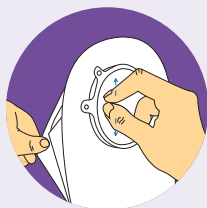


Oddelte strany vrecka od seba a umožnite vniknúť dovnútra vzduch.

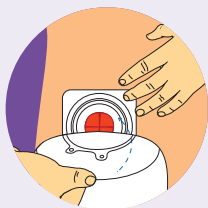


Priložte prírubu na vrecku k prírubu na podložke. jemne pritlačte vrecko a podložku k sebe, začnite smerom zdola nahor tak, aby ste niekoľkokrát počuli cvaknutie, ktoré bude znamenať, že vrecko a podložka do seba bezpečne zapadli.

Vždy dvakrát skontrolujte, či je spojenie bezpečné. Ak nie, zopakujte celý postup ešte raz.

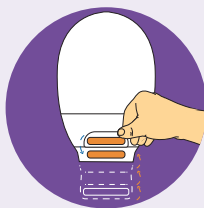


Výpust uzavrite preložením suchých zipsov 3x od konca smerom hore tak, aby celou plochou do seba zapadli a stlačte ich po celej dĺžke.

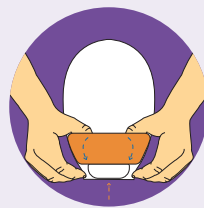


Pre väčšiu bezpečnosť a diskrétnosť prehnite prednú časť úschovného vrecka, čím schováte výpust dovnútra.


4 Vyprázdenie a čistenie vrecka.

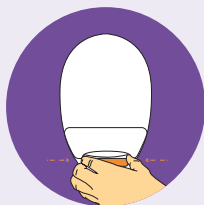

Na vyprázdenie obsahu z vrecka uchopte výpust a stlačením obidvoch strán k sebe ho otvorte, čím obsah vyprázdnete.

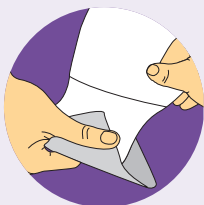


Rady pre čistenie vrecka: Podržte vrecko jednou rukou a očistite výpust na vrecku toaletným papierom, ktorý držíte v druhej ruke.

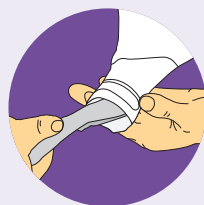


Vyčistite vnútornú časť výpustu toaletným papierom alebo detskými vlhčenými utierkami.

5 Odstránenie vrecka.

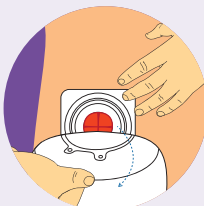

Vrecko odstránite tak, že jednou rukou pridržíte podložku a druhou rukou jemne potiahnete vrecko smerom nadol.

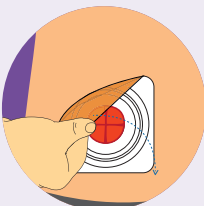

Jednou rukou jemne odtiahnite podložku smerom nadol z pokožky a druhou rukou si pridržiavajte kožu v okolí stómie.

OSLAVUJEME
1991 **25** 2016
ROKOV
na Slovensku

StomaLinka
ConvaTec

0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Zákaznícke centrum ConvaTec, Unomedical, s.r.o.
Štúrova 71A, 949 01 Nitra, tel.: 037/77 64 931, fax: 037/77 64 933
www.convatec.sk

Distribúcia:
STOMIA s.r.o., Staničné nám. 1, 040 01 Košice, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel./fax: 055/625 22 88
PHOENIX, Z.z., a.s. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, tel. 02/499 99 111
PHAREX s.r.o., Prieloztek 1, 036 01 Martin, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel.: 043/381 04 70, fax: 043/4223 569

 **ConvaTec**
riešenie stómie