



SPREJ NA ODSTRAŇOVANIE NÁPLASTÍ (sting free) ESENTA™

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE: POSTUPOJTE PODĽA NIŽŠIE
UVEDENÝCH KROKOV

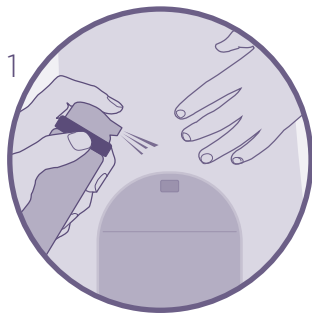


Jemne odlepte adhezívum z pokožky. V prípade potreby opakovane použite sprej ESENTA™ na odstraňovanie náplastí pre jeho ľahšie odstránenie.

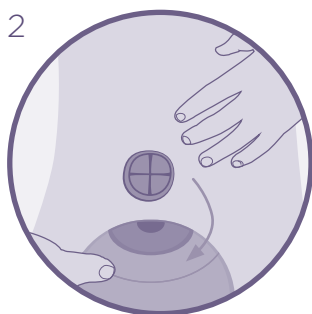

JEDNODUCHÉ ODSTRÁ ZAČÍNAME

Nastriekajte okolo okrajov adhezíva a počkajte niekoľko sekúnd. Striekať môžete v akomkoľvek uhle.

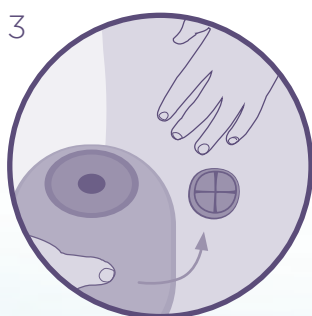


ZASCHNE ZA PÁR SE

Po zaschnutí na pokožke odstraňovač náplastí ESENTA™ neovplyvní priľnavosť používaných pomôcok alebo krytí.




OBRÚSKY NA ODSTRAŇOVANIE NÁPLASTÍ (sting free) ESENTA™

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE: POSTUPUJTE PODĽA NIŽŠIE
UVEDENÝCH KROKOV

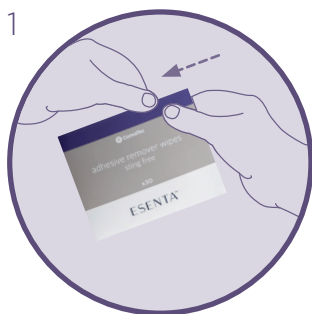


ZAČÍNAME

Roztrhnutím vrečka otvorte a rozložte
obrúsok.

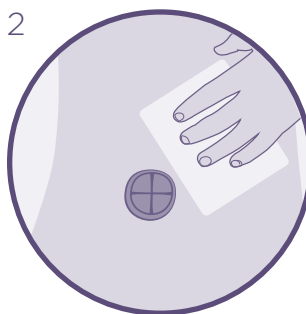

JEDNODUCHÉ ODSTRÁNENIE

Obrúskom odstráňte zvyšky
adhezíva z kože.

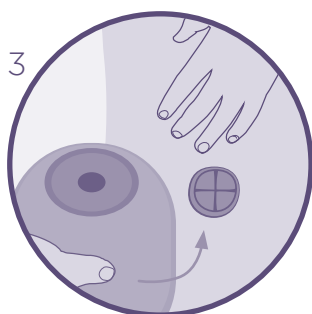

ZASCHNE ZA PÁR SEKÚND

Po zaschnutí na pokožke odstraňovač
náplastí ESENTA™ neovplyvní priľnavosť
používaných pomôcok alebo krytí.



Learn more at <<placeholder local market>>
or contact us at <<placeholder local market>>
or <<placeholder local market>>.

Kompletný návod na použitie nájdete v príbalovom letáku