


ESENTA™ SPRAY ELIMINADOR DE ADHESIVO MÉDICO NO IRRITANTE

FÁCIL DE UTILIZAR: SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS


1

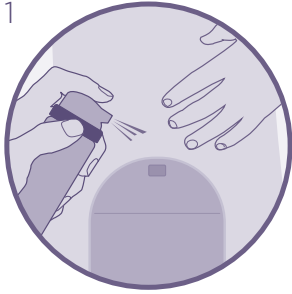

PARA EMPEZAR

Aplique alrededor de la base protectora y espere unos segundos. Puede pulverizar desde cualquier ángulo.


2

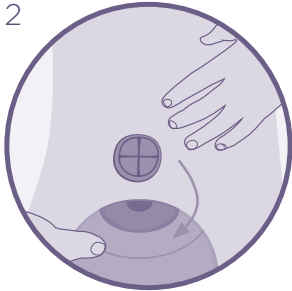

FÁCIL RETIRADA

Separe cuidadosamente el adhesivo de la piel utilizando adicionalmente ESENTA™ spray eliminador de adhesivo para facilitar la retirada si es necesario.

3

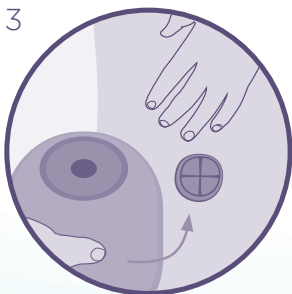


SE SECA EN SEGUNDOS

Una vez ESENTA™ eliminador de adhesivo médico se ha secado, este no afectará a la adhesión del siguiente dispositivo.




ESENTA™ TOALLITAS ELIMINADORAS DE ADHESIVO MÉDICO NO IRRITANTES

FÁCIL DE UTILIZAR: SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS

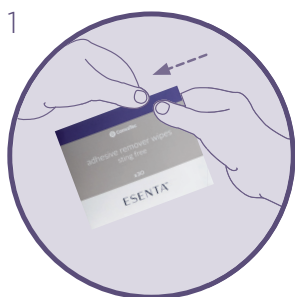


PARA EMPEZAR

Abra la bolsita y desenvuelva la toallita.

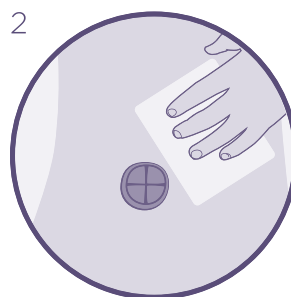

FÁCIL RETIRADA

Frote la toallita sobre los residuos adhesivos para retirarlos.

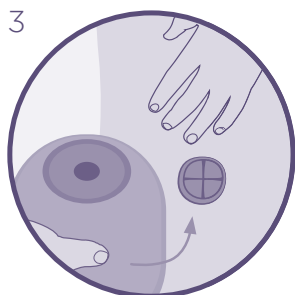

SE SECA EN SEGUNDOS

Una vez ESENTA™ eliminador de adhesivo médico se ha secado, este no afectará a la adhesión del siguiente dispositivo.



Para más información contacte a nuestro **Servicio de Atención al Ostimizado InfoTec al 93 602 37 37** o a través de infotec@convatec.com

Consulte en el interior de la caja para las instrucciones de uso completas.