



# Esteem synergy<sup>®</sup>


Handhabung der **konvexen** modellierbaren Basisplatte mit flexibler Klebefläche.

*Das sichere Gefühl einer  
innigen Umarmung.*



# Esteem *synergy*<sup>®</sup>

Handhabung der konvexen modellierbaren Basisplatte

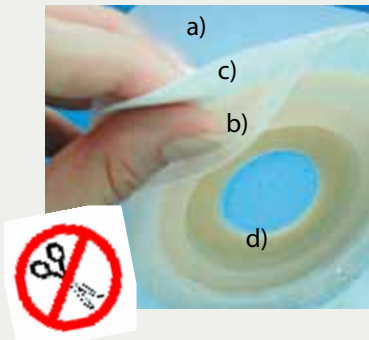

Anwendungshinweise

- a) Schutzfolie
- b) Landezone
- c) Flexible Klebefläche
- d) Durahesive<sup>®</sup>-Hautschutz

**1.** Messen Sie den Durchmesser des Stomas und wählen Sie die entsprechende Größe der modellierbaren konvexen **Esteem synergy<sup>®</sup>** Basisplatte aus.

**2.** Vergewissern Sie sich, dass die Haut um das Stoma sauber, trocken, fettfrei und frei von Lösungsmitteln ist.

Öffnen Sie die Einzelverpackung der Basisplatte.

Nehmen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite der Basis ab.

**3.** Halten Sie die milchig-transparente Schutzfolie mittig über das Stoma und zeichnen Sie mit einem wasserfesten Stift die Kontur des Stomas nach. Bringen Sie die Schutzfolie als Schablone wieder auf der Rückseite der Basisplatte an.



**2.**



**3.**

**4.** Drehen Sie die Basis um und modellieren Sie mit den Fingern den **Durahesive®-Hautschutz**, bis die vorgezeichneten Konturen erkennbar sind. Nun wird die Schutzfolie wieder entfernt.

Positionieren Sie die Öffnung der Basis über dem Stoma und drücken Sie den Hautschutz ca. 30 Sekunden an. Schieben Sie den aufgerollten Hautschutz in Richtung Stoma, damit er dicht am Stoma anliegt.



**5.** Entfernen Sie das weiße Abziehpapier von der weißen, flexiblen Klebefläche und bringen Sie diese faltenfrei auf der Haut an.

**6. Anlegen des Beutels:**  
Entfernen Sie das weiße Schutzpapier vom Hafring des Beutels. Fassen Sie dabei den Beutel außerhalb des Hafrings an und falten Sie den Hafring mittig.



Achten Sie darauf, den Hafring nicht großflächig mit den Händen/ Fingern zu berühren, da hierdurch die Haftfähigkeit reduziert werden kann.



### Tipp!

Achten Sie darauf, den Hafring des Beutels von Lösungsmitteln, Ölen und Cremes frei zu halten.

Setzen Sie den unteren Rand des Beutelhafrings so an, dass er mit der unteren Kante der Landezone bündig abschließt.

Drücken Sie den Hafring mit einer gleichmäßigen Bewegung von unten nach oben an.

Die Lasche am Hafring des Beutels leicht anheben und die Landezone festhalten, um Gas entweichen zu lassen. Bevor Sie den Beutel wieder andrücken, stellen Sie sicher, dass der Hafring des Beutels und die Landezone der Basis sauber und trocken sind.

Um den Beutel zu entfernen oder erneut zu positionieren, halten Sie die Landezone der Basisplatte fest und ziehen Sie den Hafring des Beutels an seiner Lasche gleichmäßig nach unten ab.



## 10. Entfernen der Basisplatte:

Zum Entfernen der Basisplatte halten Sie die angrenzende Haut mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand die Basisplatte sanft von der Haut ab.

Bewahren Sie die Schutzfolie auf, damit Sie die Konturen des Stomas nicht bei jedem Wechsel erneut anzeichnen müssen.



**Deutschland:**  
ConvaTec (Germany) GmbH  
Radlkoflerstraße 2  
81373 München  
Deutschland

Kundenberatung  
0800 - 78 66 200 (gebührenfrei)

Montag bis Freitag:  
8:30 bis 16:30 Uhr

**Österreich:**  
ConvaTec (Austria) GmbH  
Schubertring 6  
1010 Wien  
Österreich

Kundenberatung  
0800 - 21 63 39 (gebührenfrei)

Montag bis Freitag  
8:30 bis 16:30 Uhr

**Schweiz:**  
ConvaTec (Switzerland) GmbH  
Mühlentalstrasse 38  
8200 Schaffhausen  
Schweiz

Kundenberatung  
0800 - 55 11 10 (gebührenfrei)

Montag bis Freitag  
8:30 bis 12:00 Uhr / 13:00 bis 17:00 Uhr