



ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения
Мочеприемник нестерильный АЗ

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2009/04511 от 17.05.2013. Срок действия – бессрочно.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства для сбора мочи (уроколлекции) и оценки суточного диуреза (объема и темпа выделяемой мочи). Предназначены для кратковременного (до 1 суток) отведения мочи у пациентов, находящихся в палате послеоперационного наблюдения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представляет собой мешок из непрозрачного ПВХ с градуировкой (цена деления – 100 мл) с приводной трубкой, заканчивающейся коннектором с крышкой, для присоединения к урологическому катетеру. Мешки снабжены невозвратными клапанами лепесткового типа.

Поставляется в 2 модификациях: с прямым и крестообразным сливным краном. Мочеприемники АЗ поставляются в коробках по 200 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

1. Убедитесь в целостности упаковки и изделия.
2. При наличии повреждений – изделие уничтожьте.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вскройте коробку и извлеките изделие.
2. При необходимости зафиксируйте изделие с помощью дополнительной системы крепления, не входящей в набор.
3. Соедините приводную трубку системы с коннектором катетера Фолея. Убедитесь, что приводная трубка размещена правильно, т.е. выше уровня камеры изделия. Недопустимо провисание приводной трубки.
4. Убедитесь, что кран слива в нижней части сборного мешка закрыт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не допускайте повторной обработки изделия после окончания его использования. Защищайте продукцию от влаги и чрезмерного нагрева.

Не допускайте длительного воздействия УФ-лучей.
Срок хранения: 5 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования продукция должна быть утилизирована. Процесс утилизации проходит в соответствие с протоколами, принятыми в ЛПУ.

СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

 REF Номер в каталоге	 LOT Код партии	 Использовать до	 Дата изготовления	
 Изготовитель	 Уполномоченный представитель	 Знак CE-марки	 Знак соответствия при декларировании соответствия	 Не использовать повторно

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ФЕ Уномедикал Лтд. (Беларусь) Ул.Заводская 50, г.Фаниполь, 222750, Дзержинский р-он, Минская область

Импортер/Представитель в РФ: ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.1.

Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)748-78-94

За дополнительной информацией о продукции КонваТек обращайтесь по указанному адресу или телефону Информационной Линии Поддержки КонваТек 8-800-200-80-99 (звонок по России бесплатный). Часы работы: пн-пт – 8.30-17.00