

LISÄTARVIKKEET

Lisätarvikkeet – suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön avannesidosten kanssa



SIDOKSEN POISTOON



Esenta™

- kirvelemätön silikonipohjainen
liimanpoistosuihke ja -pyyhe

Poistaa helposti liima-aineet.

Ei aiheuta ihon pinnan kuoriutumista eikä
rikkoutumista.



IHON HOITOON



Esenta™

- kirvelemätön silikonipohjainen
ihonsuojasuihke ja -pyyhe

Suojaa ihoa jopa 72 tuntia.¹



VARMAAN OLOON



Diamonds™

- geelityyvät ja hajuja
sitovat rakeet

Erittäin imukykyinen Diamonds
geelittää avannepussin sisällön
ja poistaa hajuja.

Viite: 1. Voegeli D, LBF® “No-Sting” Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

KYSY LISÄTIETOJA 0800 179 797

©2022 Convatec Inc. ®/™, Convatec Group omistaa kaikki tuotemerkit. AP-56738-FIN-FIN-VI (V1.0)

www.convatec.fi

Convatec Oy • Keilaranta 16 • 02150 Espoo • Puh. 0800 179 797




convatec

— forever caring —



0800 179 797

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

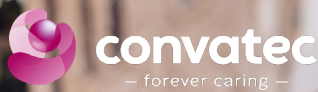

convatec

— forever caring —


KÄYTTÖOHJE

ESTEEM™ + SUORA


Yksiosainen suora avannesidos

LEIKATTAVA | VALMIS AUKKO |
TARRASULKIJA | IRTOSULKIJA

VALITSE
IHONSUOJALEVY

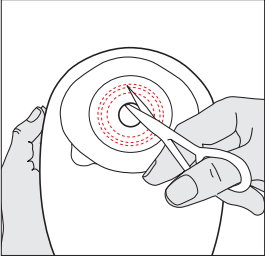


Leikattava:
Merkitse avanteen muoto ja koko ihonsuojalevyn kääntöpuolelle ja leikkaa aukko hieman isommaksi kuin merkitty viiva. Varo leikkaamasta pussia. Voit sormin siloitella leikattua reunaa.

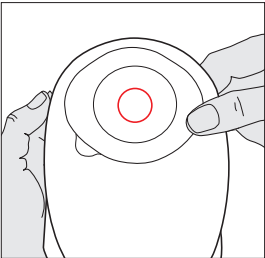




Valmis aukko:
Valitse pussi, jossa valmiiksi leikattu aukko on hieman avannetta suurempi.

PUSSIN KIINNITTÄMINEN


Sulje tyhjennettävä pussi ennen pussin kiinnittämistä.

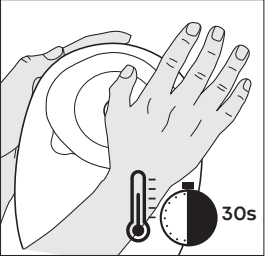

Lämmitä avannepussia käsiesi välissä 30 sekuntia, jotta se kiinnittyy paremmin. Vedä pussin sivut irti toisistaan, jotta pussiin pääsee hieman ilmaa. Poista suojakalvo.

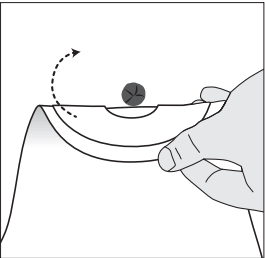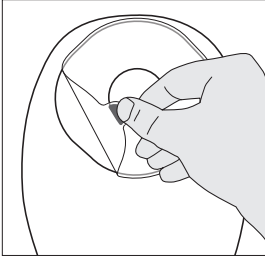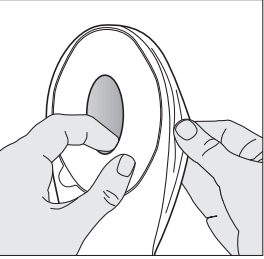


Aseta ihonsuojalevy avanteesi alapuolelle ja paina levy avanteen ympärille aloittaen alareunasta.

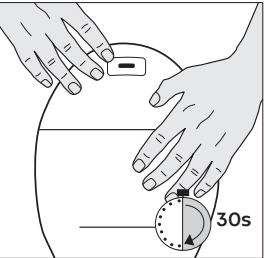



Paina sormilla kevyesti levyn ympäriltä, siloittele rypyt ja pidä lopuksi käsiä sidoksen päällä 30 sekunnin ajan, jotta sidos kiinnittyy hyvin.

PUSSIN SULKEMINEN JA TYHJENTÄMINEN


TARRASULKIJAPUSSI

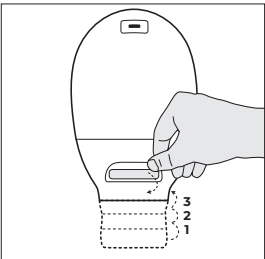


Sulkeminen:
Aloita pussin sulkeminen taittamalla alimmaisesta valkoisesta kaistaleesta. Kun olet taittanut ne kolme kertaa, sulkiat ovat vastakkain. Paina ja nipistä kunnes tunnet, että ne napsahtavat kunnolla yhteen.
Lock-it Pocket: Käännä päällyskangas nurinpäin, jolloin pussinsulkija jää taskuun piiloon.

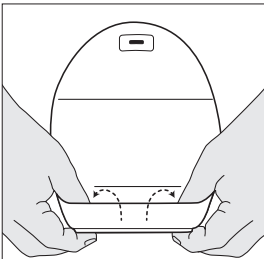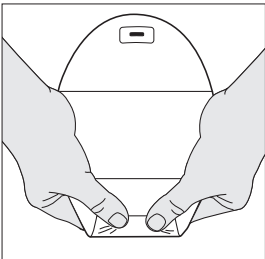




IRTOSULKIJALLA
OLEVA PUSSI

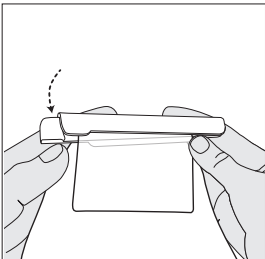

Sulkeminen:
Taita pussin suu ja kiinnitä irtosulkija paikalleen.

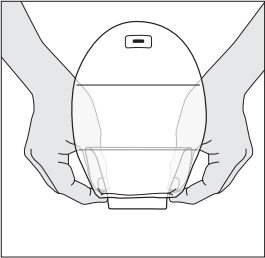


Tyhjentäminen:
Käännä pussinsulkija näkyville päällyskankaan alta. Pidä tyhjennysosaa ylöspäin, avaa sulkiat varovasti ja käännä pussin suu auki. Vetämällä samaan aikaan ylemmästä pussinsulkijasta pussin suu avautuu paremmin. **Lock-it Pocket:** Paina sormilla tyhjennysliuskojen molemmista päistä ja tyhjennä pussin sisältö.

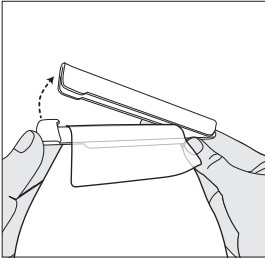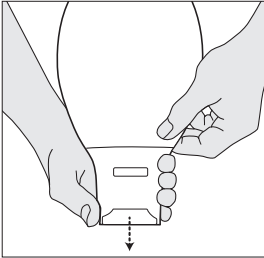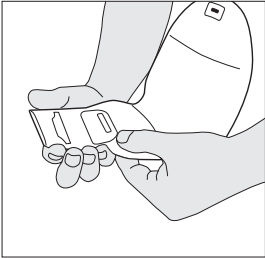


Tyhjentäminen:
Irrota sulkija ja tyhjennä pussi.

SUODATIN

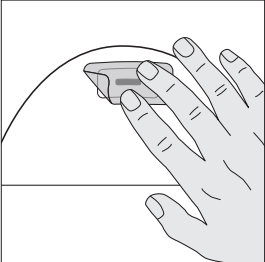


Peitä suodatin suodatintarralla suihkun ja uimisen aikana. Poista tarra sen jälkeen.


VIRTSA-AVANNEPUSSIT - AVAAMINEN, SULKEMINEN JA LIITTÄMINEN
YÖPUSSIIN

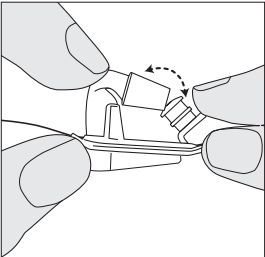


Taita tyhjennysventtiili kiinni ja auki.

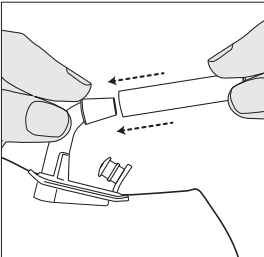

Yhdistä liitin taitettavaan tyhjennysventtiiliin.

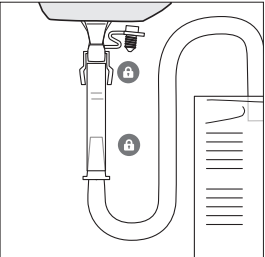


Yöpussiin liittäminen:
Avaa virtsa-avannepussin tyhjennysventtiili, kiinnitä liitin pussiin ja toinen pää yöpussiin. Tarkista kiinnitysten pitävyys.

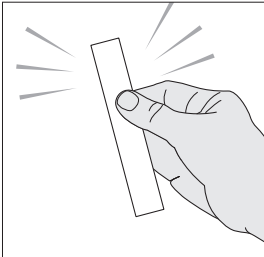

Muista ottaa liitin talteen kun vaihdat yöpussia.

AVANNEPUSSIN
POISTAMINEN

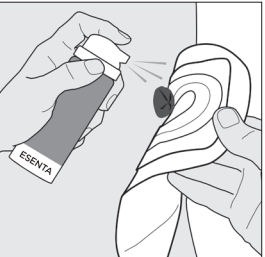

Käytä hellävaraista Esenta™-liimanpoisto-suihketta tai -pyyhettä ihonsuojalevyn irrottamiseen.