



Инструкция по применению Маски анестезиологические «Clear-Vue+»

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2008/02774 от 05.05.2015. Срок действия - не ограничен.



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для подачи газо-наркотической смеси в анестезиологии

Виды анестезиологических масок:

- маска анестезиологическая для новорожденных
- маска анестезиологическая для детей младшего возраста
- маска анестезиологическая педиатрическая
- маска анестезиологическая для взрослых средняя
- маска анестезиологическая для взрослых большая

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анестезиологические маски снабжены прозрачной манжетой, облегчающей наблюдение за цветом кожных покровов и общим состоянием пациента. Маски больших размеров поставляются с кольцами для фиксирующих устройств, которые при необходимости легко удалить, и стандартным коннектором 22 мм; детские маски снабжены коннектором 15мм. Маски «Clear-Vue+» имеют нипельный клапан для раздувания манжеты с помощью шприца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

повышенная чувствительность к любому из компонентов изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Выбрать анестезиологическую маску соответствующего особенностям лицевого черепа пациента размера. Убедиться в целостности упаковки системы. В случае повреждения и нарушения герметичности упаковки или изделия, использовать изделие не рекомендуется.
2. Вымыть руки, вскрыть упаковку изделия, надеть перчатки.
3. Через нипельный клапан шприцом раздуть манжету до оптимального прилегания к лицу пациента
4. Присоединить маску к источнику газо-наркотической смеси.
5. Начать подачу газо-наркотической смеси из аппарата в маску.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте изделие после его использования согласно процедурам, принятым в лечебном учреждении.

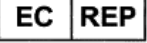
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- Не допускайте повторной стерилизации или химической обработки маски или частей маски после окончания их использования
- Не используйте маску повторно у другого пациента
- Не рекомендуется использовать изделие после истечения срока годности.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить в темном прохладном месте, избегать воздействия высоких температур, прямого дневного света и высоких доз радиации
Изготовлено в режиме «чистых помещений». Упаковано индивидуально.
Срок хранения - 5 лет с момента изготовления.

СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

 Номер в каталоге	 Код партии	 Использовать до	 Не использовать повторно	 Дата изготовления
 Знак соответствия при декларировании соответствия		 Знак CE- марки	 Не стерильно	 Изготовитель
 Уполномоченный представитель		 Обратитесь к инструкции по применению		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Unomedical S.A. De C.V., Ave Industrial Falcon, Lot 7, Parque Industrial del Norte, CD Reynosa, Tamaulipas, Mexico 88736 (Мексика)

Импортер/Представитель в РФ: ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.1. Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)748-78-94

Информационная Линия Поддержки КонваТек 8 800 200 80 99 (звонок по России бесплатный). Часы работы: пн-пт – 8.30-17.00