

# How to Use\*

## Diamonds™ Gelling and Odor Control Sachets



1

Place one sachet in pouch, either in flange hole or through outlet. Do not tear open sachet.



2

Empty and dispose of pouch contents as normal. (May be emptied into toilet.)



3

Additional sachets can be added after emptying.



**Note:** Output may appear darker than usual and/or may contain black flecks due to ActiveOne™ Odor Control system. If monitoring output colour, temporarily discontinue use.

### Ordering Information

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	PACKAGE SIZE
420791	Diamonds™ Gelling and Odor Control Sachets	100 Sachets per Jar

For more information, please call our Customer Relations Center (Registered Nurses on staff) at **1-800-465-6302**, Monday through Friday, 8:00 AM to 6:00 PM (EST), or visit [convatec.ca](http://convatec.ca)

\*As demonstrated in vitro

™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.  
© 2021 ConvaTec Inc. AP-031006-CA V1313



# Guide d'utilisation\*

## Sachets gélifiants et anti odeurs Diamonds<sup>MC</sup>



1

Insérez un sachet dans le sac par l'ouverture de la barrière cutanée ou l'ouverture à l'extrémité du sac.  
(Ne pas déchirer le sachet.)



2

Videz et disposez du contenu du sac pour stomie comme d'habitude.  
(Peut être vidé dans la toilette).



3

Des sachets additionnels peuvent être ajoutés après la vidange du sac.



**Note :** Les selles peuvent paraître plus foncées qu'à l'habitude et/ou contenir des particules noires. Ceci est dû au système de contrôle des odeurs ActiveOne<sup>MC</sup>. Si, pour une raison médicale, vous devez surveiller la couleur de vos selles, cessez temporairement l'usage.

### Pour commander

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	EMBALLAGE
420791	Sachets gélifiants et anti-odeurs Diamonds <sup>MC</sup>	100 sachets par pot

Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez [convatec.ca](http://convatec.ca)

\*Tel que démontré *in vitro*.