


Klargøring af sårområdet

- Sørg altid for, at huden omkring såret er tør.
- Fjern eventuelt hår fra huden rundt om såret for at sikre, at der er god kontakt mellem hud og klæber på både bandagens klæbende kant og fikseringsbåndene.

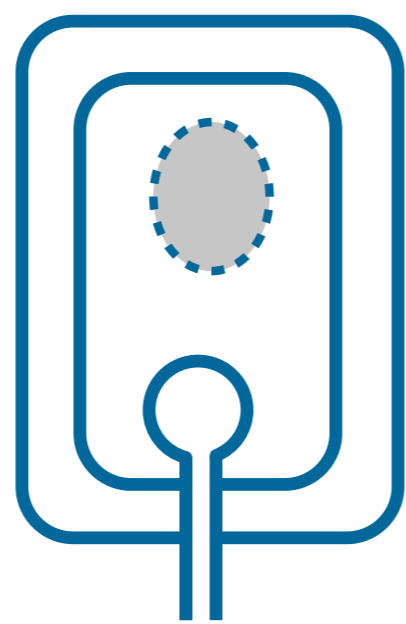

Valg af bandage

Følgende bør vurderes ved valg af bandage:

- Porten skal placeres over intakt hud.
- Sørg for, at sårområdet højst dækker 25% af pudens område, således at puden overlapper med mindst 1 cm på den omgivende hud.
- Når man tager højde for dette, vil man med en bandage på f.eks. 16x21 cm få et pudeområde til behandling af såret på 6x7 cm.
- Se Avelle™-produkterne for valg af bandagestørrelse.



Tryk forsigtigt på bandagens kant, så den sidder, hvor den skal, og folder undgås.

Repositionér evt. bandagen efter behov uden at miste klæbeevne for at undgå folder i klæberen.



Undgå folder i bandagen. Dette kan ødelægge forseglingen.



Applicér fikseringsbåndene på alle 4 sider af bandagen.

Fjern det midterste beskyttelsespapir 1 først. Applicér fikseringsbåndet og fjern derefter beskyttelsespapiret markeret som 2. Fjern til sidst det øverste beskyttelsespapir markeret som 3.



Sørg for, at der er et overlap på 1 cm på alle sider af bandagen. Pas på ikke at klæbe slangen fast.

Fikseringsbånd anbefales for at sikre, at forseglingen opretholdes i hele bandagens bæretid.




Tag pumpen, pumpe-slangen og batterierne ud af bakken. Indsæt de 3 AAA-batterier (Lithium batterier) på bagsiden af pumpen og sæt dækslet til batterirummet ordentligt på plads igen.



Fastgør slangen til pumpen og bandagen ved at dreje konnektorerne sammen på slangen. Bandagen kan tilsluttes direkte til pumpen, hvis der foretrækkes en kortere forbindelse.



Tryk på den blå knap foran på pumpen i 3 sekunder for at starte pumpen. Det grønne '✓' indikatorlys vil begynde at blinke som tegn på, at pumpen virker. Det vil tage op til 30 sekunder at etablere negativt tryk; man kan høre pumpen fungere imens.

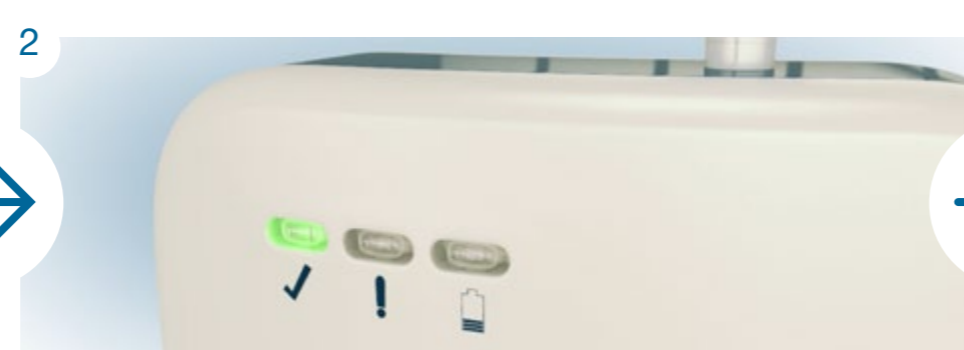

Det gule '!' indikatorlys vil lyse, hvis der ikke er etableret negativt tryk, eller der er registreret en luftlækage. Kontrollér bandagens forsegling og udglat eventuelle folder. Tjek slangens tilslutninger.



Bandagen bliver flad, når der er opnået negativt tryk.

Bandagen skal skiftes på klinisk indikation. Bandagen skal også skiftes, hvis der er tegn på lækage, væskedannelse rundt om porten eller ved tab af klæbeevne.


- Kan sidde i op til 7 dage.
- Typisk bæretid er 3-4 dage.
- Afhængigt af mængden af sårveske eller andre kliniske indikatorer kan der være behov for hyppigere bandageskift.



Frakobles her.

Sluk for pumpen ved at trykke på den blå knap i 3 sekunder, og frakobl pumpe-slangen fra bandagen inden et bandageskift.

Træk forsigtigt i fikseringsbåndene for at bryde den klæbende forsegling, inden bandagen fjernes.

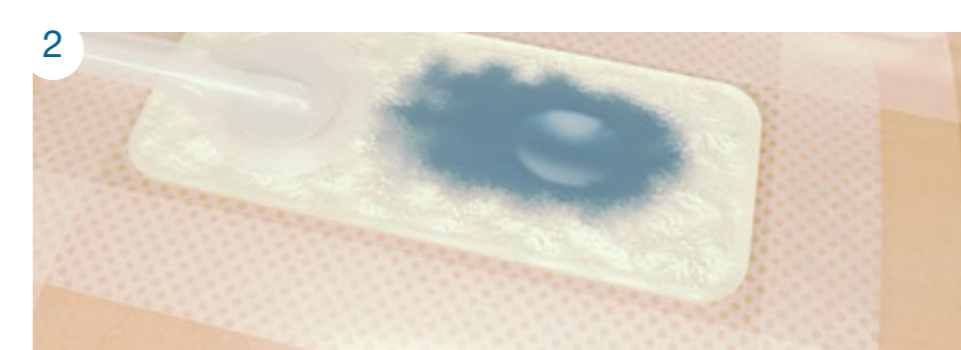

Skift bandagen, før sårvesken når porten.



Pumpen er konstrueret til at fungere i 30 dage fra påbegyndelse af behandlingen med negativt tryk. Det kan være nødvendigt at skifte batterier inden for de 30 dage. Det gule indikatorlys lyser, når batteriniveaulet er lavt.



Efter 30 dage stopper alle indikatorlys med at lyse.

Når pumpen skal skiftes, skal slangen kobles fra bandagen ved at dreje koblingerne, og den nye pumpe og slange tilkobles.



Ved dybere sår op til 2,0 cm kan der bruges en kavitetsbandage som f.eks. AQUACEL® Extra™ eller AQUACEL® bandager. Hvis disse ikke er tilgængelige, kan der anvendes vanlig gaze. Kavitetbandagen skal skiftes samtidig med Avelle™-bandagen.

Avelle™-systemet kan anvendes sammen med kompressionsbehandling. Sørg for at slangen sidder uden på kompressionsbandagen.

Vidste du?

Bandagekoblingerne er udstyret med en envejsventil. Når pumpen er frakoblet, beholder Avelle™-bandagen sit vakuum i ca. 60 minutter efter frakobling af pumpen.¹

Det er muligt at tage et hurtigt brusebad. Inden der tages brusebad, skal der slukkes for pumpen, og slangen skal kobles fra bandagen.

Tilslut bandagen igen, og start pumpen for at genoptage behandlingen.

Har du brug for yderligere information?

Der henvises til indlægssedlen til Avelle™ Negative Pressure Wound Therapy-systemet (NPWT) for den komplette brugsanvisning og vejledning i betjening af pumpen og fejlsøgning.

Kontakt ConvaTec hvis du har brug for hjælp til opsætning, brug eller vedligeholdelse af Avelle™ NPWT-systemet, eller hvis der opstår uventede alarmer, fejl eller hændelser med systemet.

Hvis du ønsker at vide mere om Avelle™ NPWT-systemet eller arrangere et besøg af din ConvaTec-repræsentant, kan du ringe til Kundeservice på **+45 48 16 74 74**.