


ESTEEM SYNERGY^{MD}

AVEC BARRIÈRES CUTANÉES MALLÉABLES




1 Application de la barrière cutanée malléable

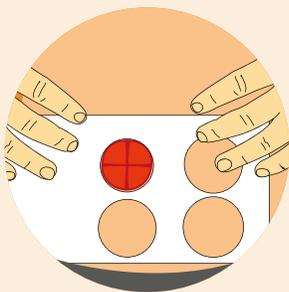

Mesurer la stomie et sélectionner la barrière cutanée malléable de la taille appropriée.




Rouler et façonner l'anneau à la taille de la stomie. **Ne pas étirer, tirer ou couper l'anneau.** Appuyer sur les bords pour les maintenir en position lorsque la taille souhaitée est atteinte.

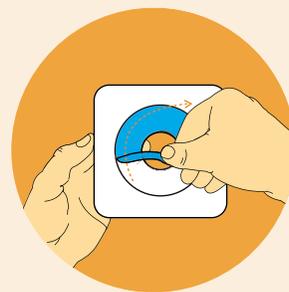

Retirer le papier protecteur transparent et centrer la stomie dans l'ouverture.



Appuyer sur la barrière cutanée pour la placer autour de la stomie et au besoin, ajuster l'adhésif autour de celle-ci afin qu'il l'épouse parfaitement. Lisser la barrière cutanée et la maintenir en place pendant 30 secondes.

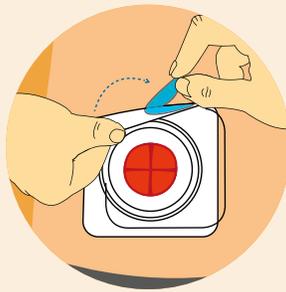

Retirer le papier protecteur blanc de la bordure adhésive.



En éliminant les plis, appuyer délicatement sur la barrière cutanée pour qu'elle adhère à la peau.

2 Application et port du sac



Séparer les deux parois du sac afin de permettre à un peu d'air d'entrer.




Retirer le papier protecteur de l'anneau adhésif du sac.




Plier délicatement l'anneau adhésif, puis positionner la moitié inférieure sur la partie inférieure de la zone d'application et rouler ou glisser les doigts sur la partie supérieure afin de fixer le sac en place.

3

Fermeture du sac

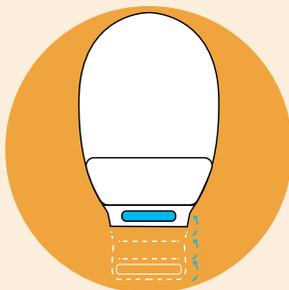

Replier l'extrémité du sac vers soi jusqu'à ce que les bandelettes verrouillées se chevauchent.

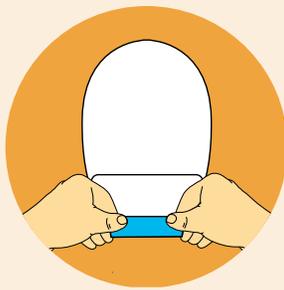

Appuyer sur toute la largeur des bandelettes pour bien fermer le sac.



Retourner la pochette Lock-it-Pocket^{MC} sur elle-même pour y dissimuler le dispositif de fermeture.

4

Vidange et nettoyage du sac



Pour vider le sac, relever l'extrémité vers le haut. Déverrouiller et déplier les bandelettes, puis ouvrir l'extrémité du sac en appuyant, avec les doigts, sur les deux côtés; vider le sac.



Conseils pour nettoyer le sac :
Tenir le sac d'une main, et de l'autre, essuyer l'extrémité d'un mouvement ferme du haut vers le bas avec du papier de toilette.




Nettoyer l'intérieur de l'extrémité avec du papier de toilette ou des lingettes pour bébés.

5

Retrait du sac



Pour décoller le sac de la barrière cutanée, tirer fermement sur la languette du sac, vers le bas.

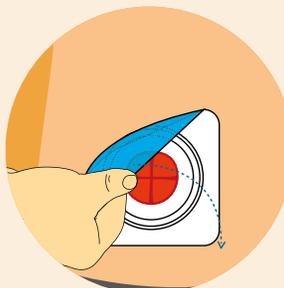

Pour retirer la barrière cutanée, en soulever délicatement un coin, puis décoller en appuyant de l'autre main sur la peau.