

LISÄTARVIKKEET

Lisätarvikkeet - suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön avannesidosten kanssa



SIDOKSEN POISTOON



Esenta™

- kirvelemätön silikonipohjainen
liimanpoistosuihke ja -pyyhe

Poistaa helposti liima-aineet.

Ei aiheuta ihon pinnan kuoriutumista eikä
rikkoutumista.



IHON HOITOON



Esenta™

- kirvelemätön silikonipohjainen
ihonsuojasuihke ja -pyyhe

Suojaa ihoa jopa 72 tuntia.¹



VARMAAN OLOON



Diamonds™

- geelityvät ja hajuja
sitovat rakeet

Erittäin imukykyinen Diamonds
geelittää avannepussin sisällön
ja poistaa hajuja.

Viite: 1. Voegeli D, LBF® "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

KYSY LISÄTIETOJA 0800 179 797

©2022 Convatec Inc. ®/™, Convatec Group omistaa kaikki tuotemerkit. AP-56708-FIN-FIN-VI (v1.0)

www.convatec.fi

Convatec Oy • Keililaranta 16 • 02150 Espoo • Puh. 0800 179 797



— forever caring —

0800 179 797

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:



convatec

— forever caring —


KÄYTTÖOHJE

ESTEEM™ + KUPERA


Yksiosainen kupera avannesidos

LEIKATTAVA | VALMIS AUKKO |
SOFT | FLEX | KOVA

VALITSE IHONSUOJALEVY

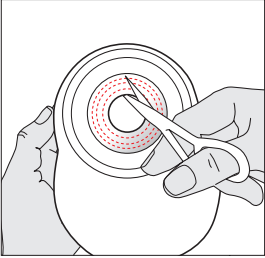


Leikattava:
Merkitse avanteen muoto ja koko ihonsuojalevyn kääntöpuolelle ja leikkaa aukko hieman isommaksi kuin merkitty viiva. Varo leikkaamasta pussia. Voit sormin siloitella leikattua reunaa.

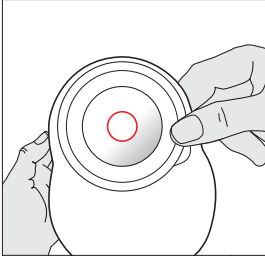


Valmis aukko:
Valitse pussi, jossa valmiiksi leikattu aukko on hieman avannetta suurempi.

PUSSIN KINNITTÄMINEN


Sulje tyhjennettävä pussi ennen pussin kiinnittämistä.

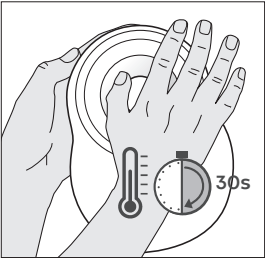


Lämmitä avannepussia käsiesi välissä 30 sekuntia, jotta se kiinnittyy paremmin.

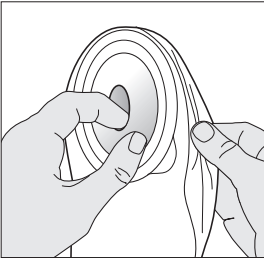


Vedä pussin sivut irti toisistaan, jotta pussiin pääsee hieman ilmaa.

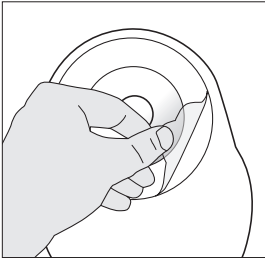

Poista suojakalvo.


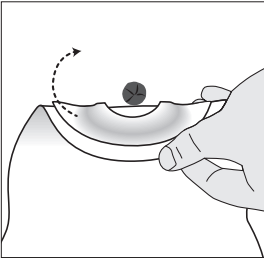


Aseta ihonsuojalevy avanteesi alapuolelle ja paina levy avanteen ympärille aloittaen alareunasta.

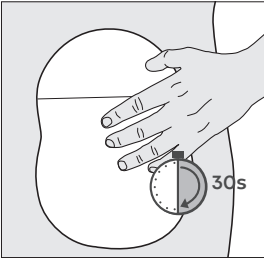




Paina sormilla kevyesti levyn ympäriltä, siloittele rypyt ja pidä lopuksi käsiä sidoksen päällä 30 sekunnin ajan, jotta sidos kiinnittyy hyvin.

TYHJENNETTÄVÄN PUSSIN SULKEMINEN

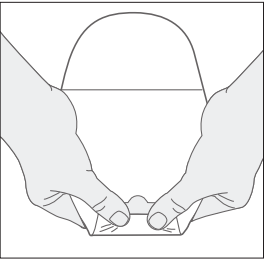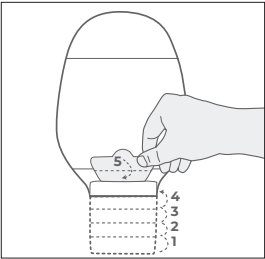


Safe Seal™ -sulkija:
Pussi suljetaan taittamalla pussin suu ylös itseesi päin, kunnes tarrasulkijat ovat vastakkain. Paina ja nipistä, kunnes tunnet, että ne napsahtavat kunnolla yhteen.

PUSSIN TYHJENTÄMINEN

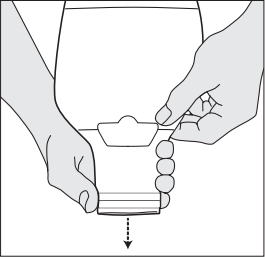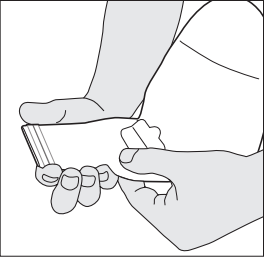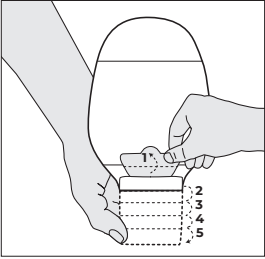

Safe Seal™ -sulkija: Käännä pussin tyhjennysosa ylöspäin. Avaa sulkijat varovasti ja käännä pussin suu auki. **VINKKI:** vetämällä ylemmästä pussinsulkijasta pussin suu aukeaa paremmin. Paina sormilla tyhjennysliuskojen molemmista päistä ja tyhjennä pussin sisältö.


SUODATIN

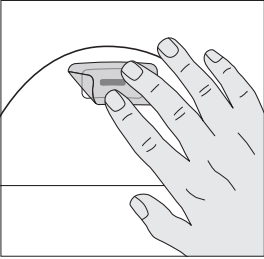


Peitä suodatin suodatintarralla suihkun ja uimisen aikana. Poista tarra sen jälkeen.

VIRTSA-AVANNEPUSSIT - AVAAMINEN, SULKEMINEN JA LIITTÄMINEN YÖPUSSIIN


Tarkista oman pussisi tyhjennysventtiili ja lue sen ohjeet. Jokaiseen tyhjennysventtiiliin on omat liittimet.

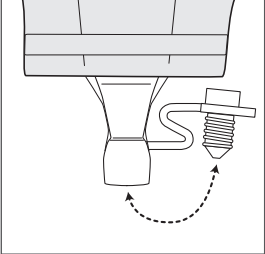


Soft Convex -tyhjennys-venttiili

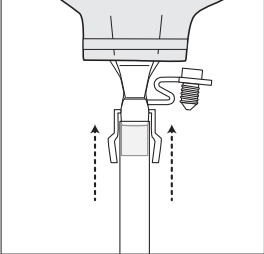


Yhdistä Soft Convex -liitin

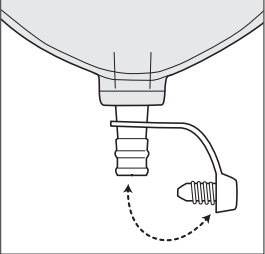


Flex Convex -tyhjennys-venttiili

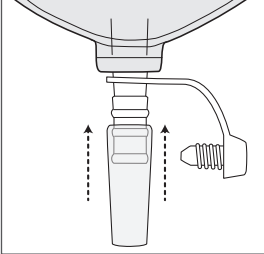


Yhdistä Flex Convex -liitin

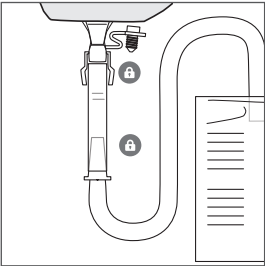

Yöpussiin liittäminen:
Avaa virtsa-avannepussin tyhjennysventtiili, kiinnitä liitin pussiin ja toinen pää yöpussiin. Tarkista kiinnitysten pitävyys.

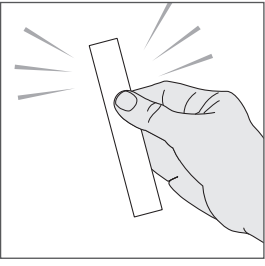

Muista ottaa liitin talteen kun vaihdat yöpussia.

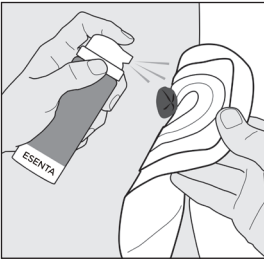

Käytä hellävaraista Esenta™-liimanpoisto-suihketta tai -pyyhettä ihonsuojalevyn irrottamiseen.