

TILLBEHÖR

Tillbehör för dagligt bruk



HÄFTBORTTAGNING



Esenta™

- silikonbaserad häftborttagning

För enkel borttagning, utan hudstrippning eller skada.



HUDSKYDD



Esenta™

- silikonbaserad hudbarriär

Skyddar huden upp till 72 timmar.¹



LUKTKONTROLL



Diamonds™

- gelbildande portionspåsar

med luktkontroll

Får flytande innehåll fast och minskar eller eliminerar gasbildning och lukt.

Referens: 1. Voegeli D, LBF® "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS PÅ 0800 179 797

©2022 Convatec Inc. ®/™. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. AP-S6741-FIN-SWE-V1

www.convatec.fi

Convatec Oy • Kägelstranden 16 • 02150 Esbo • Tel. 0800 179 797



— forever caring —

0800 179 797

Kontakta oss:



convatec

— forever caring —

APPLICERINGSGUIDE

NATURA® & NATURA®+
Tvådelsbandage


**UPPKLIPPBARA OCH
UPPKLIPPBARA KONVEXA
HUDSKYDDSPLATTOR
MED LYFTBAR RING**

NATURA® & NATURA®+



UPPKLIPPBARA OCH UPPKLIPPBARA KONVEXA HUDSKYDDSPLATTOR MED LYFTBAR RING

APPLICERINGSGUIDE


VÄLJ EN LÄMPLIG HUDSKYDDSPLATTA OCH VÄRM DEN MELLAN DINA HÄNDER

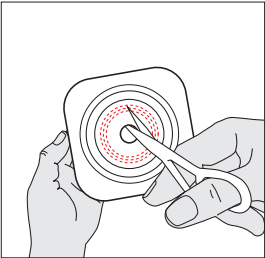

Uppklippbara: Rita upp stomins diameter på plattan och klipp upp hålet precis utanför den ritade linjen med hjälp av en böjd sax.

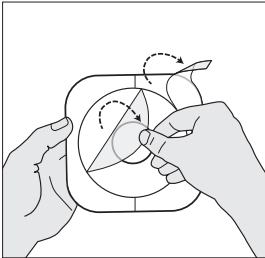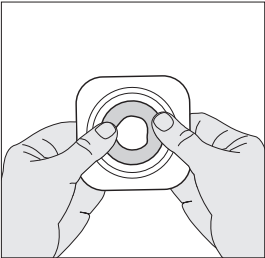


Ta av den genomskinliga skyddsfilmen.

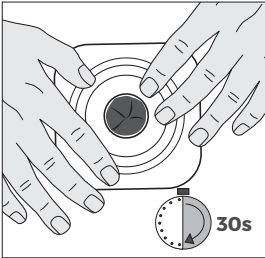


Tryck försiktigt mot huden och släta ut eventuella veck. Håll plattan på plats i 30 sekunder.

APPLICERA PÅSEN


Stäng den tömbara påsen innan du applicerar den.

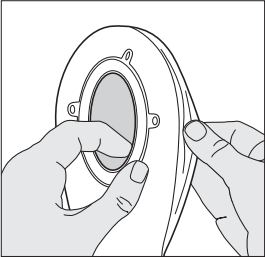


Dra isär sidorna på påsen för att släppa in lite luft.

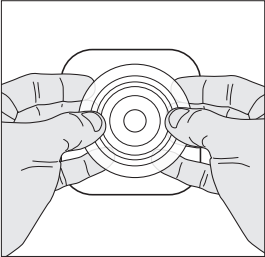

DRA UPP lyftbara kanten med tummarna ovanpå och fingrarna under. Rikta in kanterna på påsen med hudskyddsplattan.

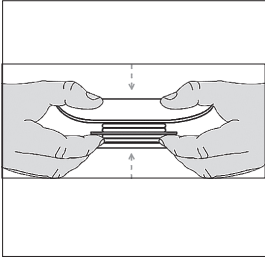


Börja nedtill och tryck runt kanterna tills de knäpper ihop med varandra. Tryck sedan NER lyftbara kanten för att få en plan profil.

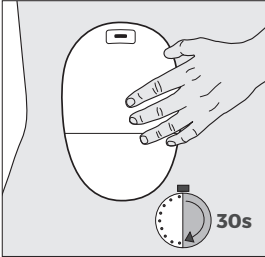



Håll påsen på plats i 30 sekunder. **Dubbelkolla alltid att kopplingen är helt stängd - om inte, får du upprepa stegen.**

STÄNGA OCH TÖMMA PÅSEN


INVISICLOSE™ PÅSLÅS

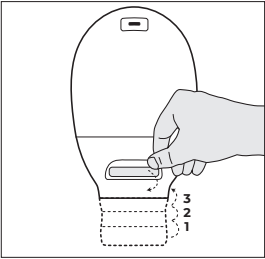


Stänga: Vik änden uppåt mot dig tills förslutningarna är riktade mot varandra. Tryck och kläm till över hela förslutningen för att säkra den. **Vänd påslåset Lock-it-Pocket™** ut och in för att stoppa in änden inuti.

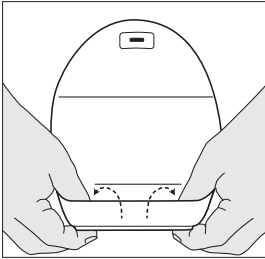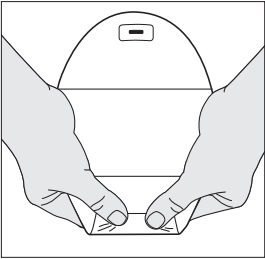




PÅSKLÄMMA

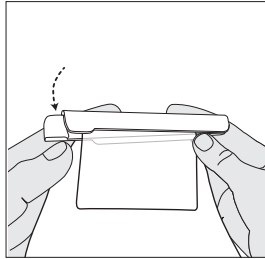

Stänga: Vik påsen och fäst förslutningen.

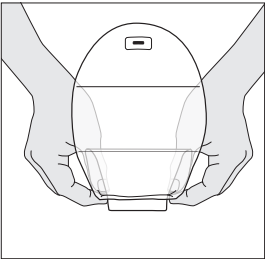


Tömning: För att tömma påsen viker du änden uppåt mot kroppen. Dra för att öppna förseglingen och veckla ut änden. **Lock-it Pocket:** Öppna påslåset och öppna änden genom att trycka in båda ändarna vid utloppet med fingrarna. Töm påsen.

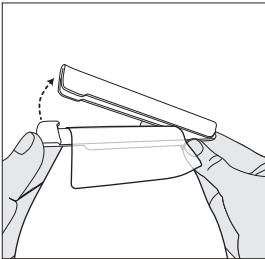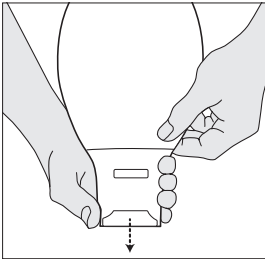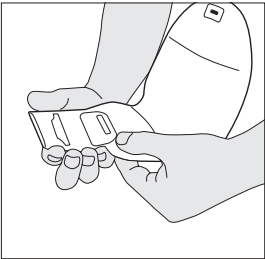


Tömning: Ta bort förslutningen och töm påsen.

UROSTOMI




Titta på avtappningsrör på din egen påse och läs instruktionerna. Varje avtappning har sina egna kopplingar.

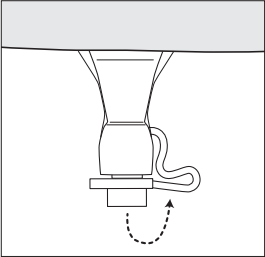


Natura®+ Soft Tap -avtappning

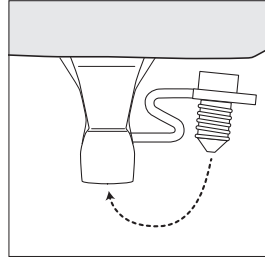


Accuseal™ -avtappning

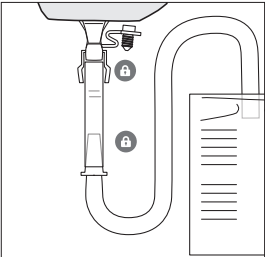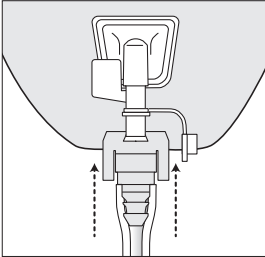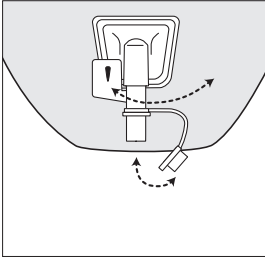

Anslutning till nattpåse: När din tappningskran är öppen, anslut adaptern till tappningskranen och anslut din nattpåse till adaptern i andra änden. Kontrollera att alla anslutningspunkter är säkra.

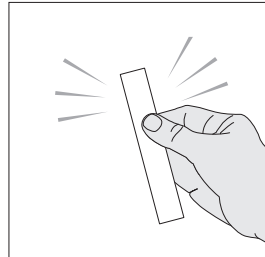


Behåll din adapter varje gång du kasserar din nattpåse.

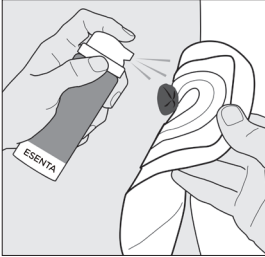

TA BORT PÅSEN

Använd Esenta™ för snabb och enkel borttagning av medicinska lim.

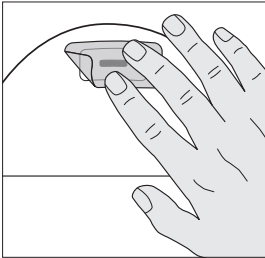

FILTER

Vid bad/dusch skyddas filtret på påsens utsida av medföljande klisterlapp.