




Commencer par nettoyer la peau péristomiale (peau autour de la stomie) à l'aide d'un savon doux, puis rincer à l'eau. Les savons devraient être exempts d'huiles et de crèmes. Attention : Toute substance huileuse restant sur la peau peut empêcher une bonne adhérence de la barrière cutanée. Assécher complètement par tapotements.



1

## PRÉPARATION DE LA BARRIÈRE CUTANÉE

1. Placer le guide de mesure de la stomie au-dessus de cette dernière, puis prendre la mesure de la base de la stomie. **Note** : Pendant plusieurs semaines suivant la chirurgie, il est important de prendre les mesures de la stomie chaque fois qu'une nouvelle barrière cutanée est mise en place. Il est possible qu'une stomie rétrécisse, après l'opération. Choisir, sur le guide de mesure, un trou d'un diamètre d'environ 3 mm (1/8 po) de plus que le diamètre de la stomie.

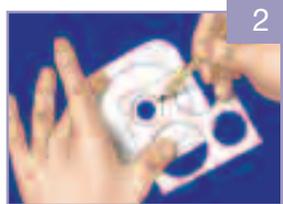

2

2. Sur le papier protecteur de la barrière cutanée, tracer le contour de la stomie.



3

3. Au moyen de ciseaux courbes à branches courtes, agrandir l'ouverture prédécoupée en suivant la ligne précédemment tracée. Ensuite, avec les doigts, lisser les bords de l'ouverture agrandie pour les égaliser, au besoin.



4

## MODE D'EMPLOI : APPLICATION D'UNE BARRIÈRE CUTANÉE DOTÉE D'UNE OUVERTURE PRÉDÉCOUPÉE

Choisir une barrière cutanée dont l'ouverture prédécoupée est du même diamètre que le plus grand diamètre de la stomie. Ne pas agrandir l'ouverture prédécoupée de la barrière cutanée.

## APPLICATION DE LA BARRIÈRE CUTANÉE ESTEEM SYNERGY®



5

4. Retirer le papier protecteur blanc et aligner la barrière cutanée sur la stomie. Maintenir une légère pression de 30 à 60 secondes sur la barrière cutanée.
5. Retirer le papier protecteur du collet en s'assurant d'une adhérence bien lisse.

ConvaTec offre un vaste éventail de barrières cutanées prédécoupées et malléables. Communiquez avec votre détaillant local ou notre Centre des relations avec la clientèle pour obtenir plus d'information.



7

## MISE EN PLACE DU SAC ESTEEM SYNERGY®

6. S'assurer que la zone d'application transparente de la barrière cutanée est complètement sèche et propre.
7. Retirer le papier protecteur de l'anneau adhésif du sac.
- 8a. Maintenir un doigt sur le bord inférieur de la zone d'application de la barrière cutanée et aligner le bord inférieur de l'anneau adhésif sur le bord inférieur de la zone d'application.



8a

OU

- 8b. Replier l'anneau adhésif, puis raccorder la moitié inférieure à la section inférieure de la zone d'application; ensuite, glisser les doigts sur l'anneau afin de s'assurer d'une adhérence parfaite, sans plis.



8b

9. Passer les doigts partout sur le sac pour s'assurer qu'il est bien lisse et sans plis.

## MODE D'EMPLOI POUR LA FERMETURE DE SAC




9

- 10a. **Attache :** Plier une fois, sans l'enrouler, l'extrémité inférieure du sac sur le bord de l'attache. Appuyer fermement au centre et sur les bords de l'attache; un clic indique qu'elle est bien verrouillée. Pour détacher, exercer une pression sur les bords verrouillés de l'attache.



10a

- 10b. **Dispositif de fermeture de sac InvisiClose® :** Relever le rabat de sécurité sur le devant du sac, exposant ainsi le dispositif de fermeture par pression. Replier le dispositif de fermeture quatre fois sur lui-même, puis appuyer pour bien joindre les languettes sur toute leur surface; un faible clic indique que le dispositif est bien verrouillé. Replier le rabat de sécurité sur le dispositif (vers le corps) et verrouiller. Vidange : Déverrouiller le rabat de sécurité ainsi que les languettes, puis vider.

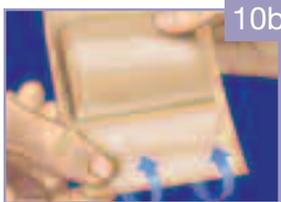

10b

- 10c. **Valve Accuseal® :** Tourner la valve vers la gauche afin de la fermer, et vers la droite, pour l'ouvrir et vider le sac.



10c

**Note :** Un indicateur rouge est visible lorsque la valve est ouverte (position de vidange).

## RETRAIT ET REMISE EN PLACE DU SAC


11. Placer une main sur le bord de la zone d'application transparente.
12. De l'autre main, retirer lentement le sac, du haut vers le bas en le repliant. Pour le remettre en place, suivre les étapes 6 à 9.



12

## RETRAIT DE LA BARRIÈRE CUTANÉE

13. Soulever délicatement un coin de la barrière cutanée, puis la décoller lentement de la peau en appuyant sur la peau environnante avec l'autre main. On peut utiliser le dissolvant AllKare® pour enlever tout résidu provenant de la barrière cutanée avant d'en mettre une nouvelle en place.

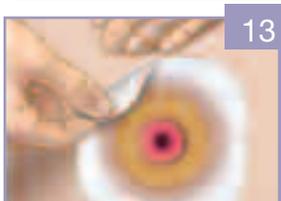

13

**Important :** Après l'utilisation du dissolvant AllKare®, rincer la peau avec de l'eau tiède.



Pour de plus amples renseignements sur ce produit ou d'autres produits de ConvaTec, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel) au 1 800 465-6302, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web au [www.convatec.ca](http://www.convatec.ca)

Consulter la notice pour le mode d'emploi détaillé.

**Note:** Dans les cas de stomies à ras de peau ou rétractées, il est recommandé d'utiliser des produits convexes.

® indique marque de commerce de ConvaTec Inc.

