



AQUACEL™ foam köpük yara örtüsünün ikinci kapama olarak kullanıldığı durumlar



**Derin Kaviteli Yaralar**

• Derin yaraları doldurmak için AQUACEL™ foam köpük yara örtüsünün altında AQUACEL™ veya AQUACEL™ Ag yara örtülerini kullanabilirsiniz.



**Ağır Eksudalı Yaralar**

• Ağır eksudalı yaralarda ekstra emme kapasitesi sağlamak için AQUACEL™ foam köpük yara örtüsünün altında AQUACEL™ veya AQUACEL™ Ag yara örtülerini kullanabilirsiniz.



**Enfekte Yaralar**

• Enfekte veya enfeksiyon riski taşıyan yaralarda AQUACEL™ foam köpük yara örtüsünün altında AQUACEL™ Ag yara örtülerini kullanabilirsiniz.

**AQUACEL™**  
Foam

Boyut	Kod	Kutu içi Adet
10x10 CM	420680	10
12,5x12,5 CM	420619	10
17,5x17,5 CM	420621	10
21x21 CM	420623	5
TOPUK	420625	5
SAKRAL	420626	5
25X30 CM	420624	5


**AQUACEL™**  
Ag

Boyut	Kod	Kutu içi Adet
5x5 CM	403706	10
10x10 CM	403708	10
15x15 CM	403710	5
20x30 CM	403711	5
ŞERİT 2x45 CM	403771	5

• AQUACEL™ foam köpük yara örtüsü seçerken merkezdeki emici pedinin (silikon yapışkan çerçevenin içerisinde kalan alan) yara boyutundan en az 1 cm daha büyük olduğundan emin olunuz.

• Tam kullanım talimatları için lütfen AQUACEL™ foam, AQUACEL™ ve AQUACEL™ Ag yara örtülerinin kutu içerisindeki kullanım kılavuzlarına bakınız.

Bir köpük örtüde sevdiğiniz herşey ve daha da fazlası

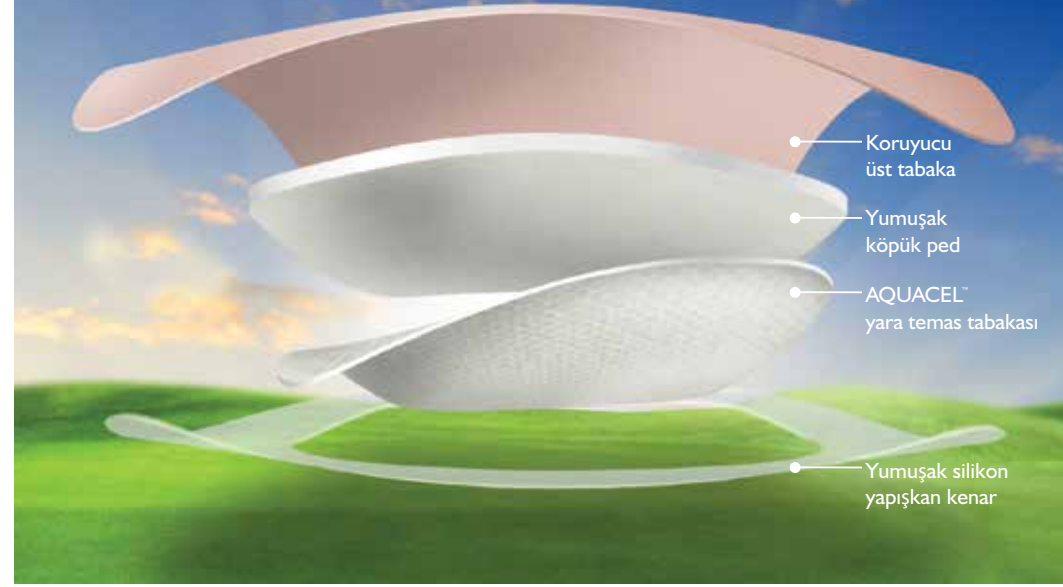

**Şimdi** bir KÖPÜK örtünün konforu ve kullanım kolaylığının yanı sıra, **AQUACEL™** in iyileşmeye yardımcı özelliklerini taşıyan tek yara örtüsüyle tanışacaksınız;

# Uygulama kılavuzu\*

## Standart uygulama:

**AQUACEL™ foam köpük yara örtüsü** birincil ya da ikincil yara örtüsü olarak kullanılabilir.

**Örtü boyutu seçerken** yara örtüsünün emici pedinin (silikon yapışkan çerçevenin içerisinde kalan alan) yara boyutundan en az 1 cm daha büyük olacağı şekilde uygun bir örtü boyutu uygulayınız. Gerekirse yara örtüsünü uygun şekilde keserek kullanabilirsiniz. Bu durumda yara örtüsünü sabitlemek için ayrıca bir malzeme kullanmak gerekebilir.

**Yara örtüsünü steril pakedinden çıkarırken** mümkün olduğunca yapışkan kısma ve yara temas tabakasına dokunmamaya çalışın.

**Yara örtüsünü uygularken** yaraya göre emici ped kısmını ortalayın. Padi doğrudan yaranın üzerine uygulayın, yumuşak bir şekilde yapışkan kenarları yara çevresindeki cilde yerleştirin.

Eğer keserek kullanmanız gerekirse, uygun bir malzeme ile sabitleyin.



## Yara örtüsünü çıkarma:

**Değişim için** klinik olarak endike olmasını ( sızıntı, kanama, ağrı hissinde artış, enfeksiyon şüphesi gibi durumlar) bekleyin. AQUACEL™ foam köpük yara örtüsü değiştirilmeden yara üzerinde maksimum 7 güne kadar kalabilir. Yara yatağı uygun aralıklarla temizlenmelidir.

**Çıkartmak için**, hafifçe cilde bastırarak yara örtüsünün kenarından tutup kaldınız. Tüm kenarları kaldırdıktan sonra yara örtüsünü yara yatağından uzaklaştırıp uygun klinik protokole göre atınız.



## Zor alanlar için uygulama adımları:

**Topuk ya da sakral bölge gibi** anatomik olarak zor alanlarda kullanabileceğiniz özel şekilli yapışkan kenarlı köpük örtüler bulunmaktadır.

### Sakral yara örtüsü:



1. Koruyucu bandı çıkarın.
2. Yara örtüsünü kenarlarından tutarak ortasından ikiye katlayın. Kalça çizgisinin üzerinden uygulama için hizalayın.
3. Pedin orta kısmı yara üzerine gelecek şekilde yerleştirin ve yapışkan kenarları yumuşak şekilde yara çevresindeki cilde oturtun.

### Topuk yara örtüsü:



1. Koruyucu bandı çıkarın.
2. Yara örtüsünün iç kısmını topuk ile ortalayın.
3. Örtüyü topuğun altına doğru kıvrarak alt tarafı sabitleyin, sonrasında aynı işlemi üst kısım için tekrarlayın.

### Küçük ayaklar için:



1. Uygun boyda kare yara örtüsü seçin. Koruyucu bandı çıkartmayın. Çapraz olarak yaklaşık 5cm lik iki kesik açın.
2. Koruyucu bandı çıkarın. Yara örtüsünün iç kısmını topuk ile ortalayın.
3. Örtüyü topuğun altına doğru kıvrarak alt tarafı sabitleyin, sonrasında aynı işlemi üst kısım için tekrarlayın. Kesilerek kullanıldığı için uygun bir bandajla sabitlenmesi gerekir.

### Diğer uygulama alanları - Dirsek, El ve Ayak Parmakları



İhtiyacınıza göre istediğiniz şekilde ve boyutta keserek kullanabilirsiniz.

Kesilerek kullanılması durumunda uygun bir bandajla sabitlenmesi gerekir.

\*Lütfen detaylı Kullanım Talimatları için AQUACEL™ foam ürün pakedi içerisindeki kılavuza bakınız.



**AQUACEL™ Dressings**  
TRIED. TRUE. TRUSTED.™

