



Spray eliminador de adesivo médico

De fácil uso: siga os seguintes passos

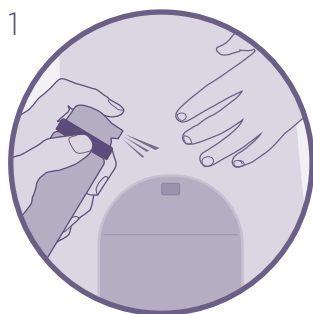


Para começar

Pulverize em redor do bordo do adesivo e espere uns segundos. Pode pulverizar em qualquer ângulo.

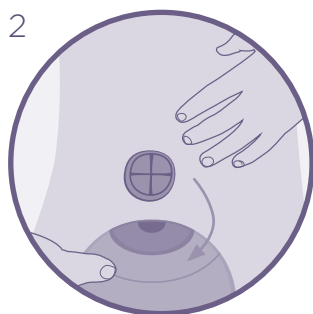

Fácil remoção

Caso for necessário, paraay from remoção mais fácil, use ESENTA™ adicionalmente eliminadcto ease adesivo ESENTA™ para remover suavemente o adesivo da pele.

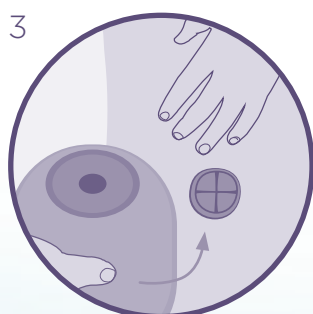

Secagem em segundos

Uma vez seco o eliminador de adesivo SENTA™ não afetará na aderência de novos pensos ou dispositivos.




Toalhetes eliminadores de adesivo médico

De fácil uso: Siga os seguintes passos




Para começar

rasge o toalhete para abrir e desdobre

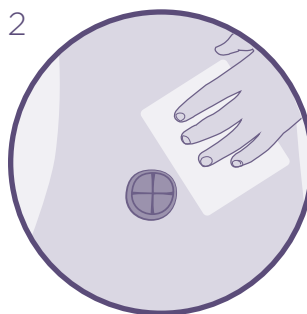

Fácil remoção

Passar o toalhete sobre os restos de adesivo a remover

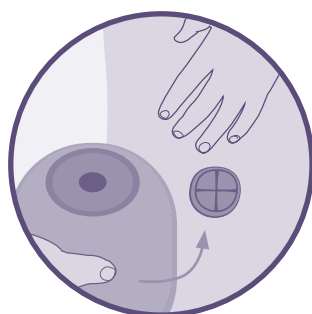

Secagem em segundos

Uma vez seco o eliminador de adesivo não afetará na aderência de novos pensos ou dispositivos.



Learn more at <<placeholder local market>>
or contact us at <<placeholder local market>>
or <<placeholder local market>>.

Consulte o folheto informativo para obter as instruções completas do uso

