


ESTEEM SYNERGY^{MD}


avec barrières cutanées
prédécoupées et à découper



1 Application de la barrière cutanée

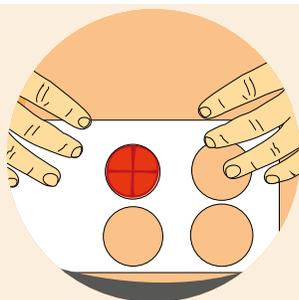


Mesurer la stomie et sélectionner la barrière cutanée de la taille appropriée.

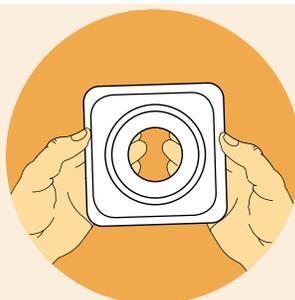


Barrières cutanées prédécoupées :
Choisir une barrière cutanée avec une ouverture prédécoupée légèrement plus grande que la stomie.



Barrières cutanées à découper :
Tracer le contour de la stomie au centre du papier protecteur transparent au dos de la barrière cutanée, puis découper une ouverture d'environ 3 mm (1/8 po) de diamètre de plus que le tracé.

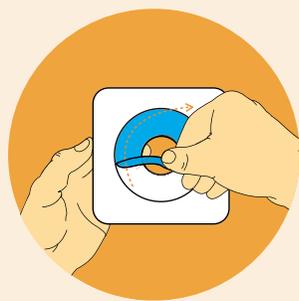

Retirer le papier protecteur transparent au dos de la barrière cutanée et centrer la stomie dans l'ouverture.

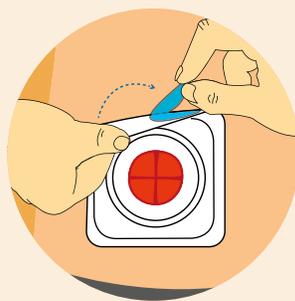

Appuyer sur la barrière cutanée pour la placer autour de la stomie et au besoin, ajuster l'adhésif autour de celle-ci afin qu'il l'épouse parfaitement.



En éliminant les plis, appuyer délicatement sur la barrière cutanée pour qu'elle adhère à la peau.


2 Application et port du sac



Séparer les deux parois du sac afin de permettre à un peu d'air d'entrer.




Retirer le papier protecteur de l'anneau adhésif du sac.

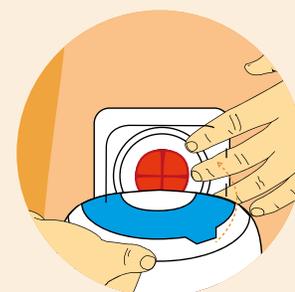


Plier délicatement l'anneau adhésif, puis positionner la moitié inférieure sur la partie inférieure de la zone d'application et rouler ou glisser les doigts sur la partie supérieure afin de fixer le sac en place.

3

Fermeture du sac

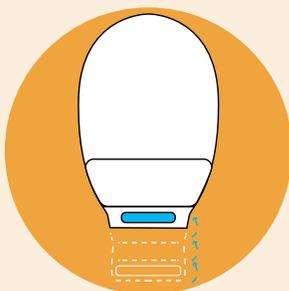

Replier l'extrémité du sac vers soi jusqu'à ce que toutes les bandelettes verrouillées se chevauchent.

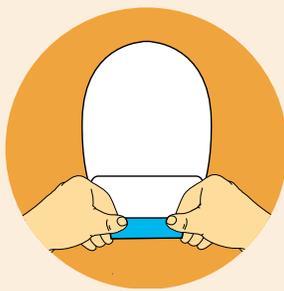


Appuyer sur toute la largeur des bandelettes pour bien fermer le sac.



Retourner la pochette Lock-it-Pocket^{MC} sur elle-même pour y dissimuler le dispositif de fermeture.

4

Vidange et nettoyage du sac

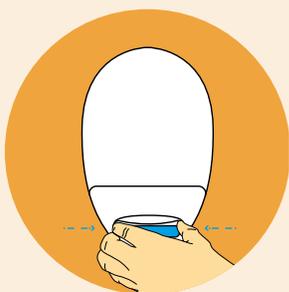

Pour vider le sac, relever l'extrémité vers le haut. Déverrouiller et déplier les bandelettes, puis ouvrir l'extrémité du sac en appuyant, avec les doigts, sur les deux côtés; vider le sac.



Conseils pour nettoyer le sac :
Tenir le sac d'une main, et de l'autre, essayer l'extrémité d'un mouvement ferme du haut vers le bas avec du papier de toilette.




Nettoyer l'intérieur de l'extrémité avec du papier de toilette ou des lingettes pour bébés.

5

Retrait du sac



Pour retirer le sac, le décoller de la zone d'application en tirant sur la languette de l'anneau adhésif d'un mouvement du haut vers le bas d'une main, et avec l'autre main, prendre appui sur les bords de la zone d'application transparente.

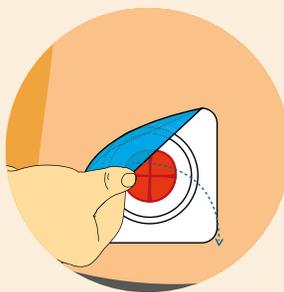

Pour retirer la barrière cutanée, en soulever délicatement un coin, puis la décoller en prenant appui sur la peau avec l'autre main.