



Ak sa u vás vyskytnú ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, kontaktujte svojho ošetrojúceho lekára.

- Rana sa zväčší alebo vznikne nová rana.
- Objaví sa začervenanie a opuch pokožky okolo okrajov rany alebo sa začervenajú a opuchnutá oblasť zväčší.
- Objavia sa bolesti alebo intenzita bolesti vzrastie.
- Po vyčistení rany sa objaví zápach alebo sa intenzita existujúceho zápachu zvýši.
- Rana mokvá viac než zvyčajne.

Opatrenia/varovanie

- Žiadne krytie by nemalo ostať na rane dlhšie než 7 dní.
- Krytie nestrihajte.
- Nepoužívajte, ak je balenie krytia otvorené alebo poškodené.
- Uchovávajte na suchom mieste pri izbovej teplote.

Sme tu, aby sme vám pomohli

V tejto brožúrke nájdete informácie o tom, ako krytie aplikovať a odobrať bezpečne a správne. Ak budete potrebovať ďalšie rady, obráťte sa na našu zákaznícku linku: 0800 800 111.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa krytia ConvaMax™ Superabsorber, prosím, kontaktujte:

Zákaznícke centrum ConvaTec
Unomedical, s. r. o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
Bezplatná linka: 0800 800 111




V nižšie uvedenej tabuľke s kódmi si skontrolujte, či máte správnu veľkosť krytia.

Veľkosť krytia	Veľkosť balenia	ŠÚKL kód
ConvaMax™ Superabsorber Adhezívny		
10 cm x 10 cm	10	A0330A
10 cm x 20 cm	10	A0331A
15 cm x 15 cm	10	A0332A
20 cm x 20 cm	10	A0333A

Veľkosť krytia	Veľkosť balenia	ŠÚKL kód
ConvaMax™ Superabsorber Neadhezívny		
10 cm x 10 cm	10	A0334A
10 cm x 20 cm	10	A0335A
15 cm x 15 cm	10	A0336A
20 cm x 20 cm	10	A0337A

Ďalšie informácie o indikáciách a preventívnych opatreniach nájdete v príbalovom letáku, ktorý je priložený k výrobku.

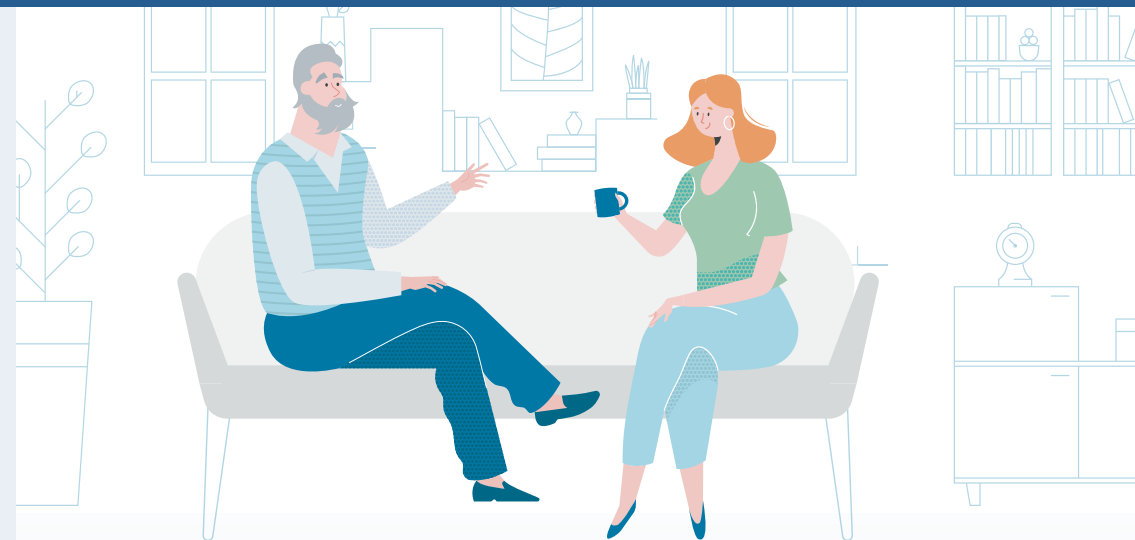

Výmena krytia ConvaMax™ Superabsorber v domácom prostredí

Prečo je potrebné krytie vymieňať?

Krytie je určené na prekrytie a ochranu postihnutej oblasti tak, aby rana ostala čistá. Krytie funguje ako bariéra, ktorá znižuje množstvo choroboplodných zárodkov, ktoré sa môžu dostať do rany a spôsobiť infekciu.

Kedy je potrebné krytie vymeniť?

Krytie by ste si mali vymieňať v súlade s odporúčaniami vášho ošetrojúceho lekára alebo vtedy, keď cezeň začne presakovať výtok z rany.



Aby sa znížilo riziko vzniku infekcie, je dôležité mať krytie aplikované na rane neustále.

V tejto príručke nájdete informácie o tom, ako si bezpečne sami môžete aplikovať krytie ConvaMax™ Superabsorber na ranu.



Čo je krytie ConvaMax™ Superabsorber?

ConvaMax™ Superabsorber je krytie s mimoriadne vysokou absorpčnou schopnosťou, ktoré dokáže absorbovať veľký objem výtoku z rany a zároveň udržať vašu ranu čistú, ochrániť pokožku v okolí rany pred vlhkosťou a podporiť proces hojenia.

Pred výmenou krytia

1. Hygiena rúk



Ruky si umyte mydlom a vodou a čistým uterákom si ich dôkladne utrite dosucha.

2. Pripravte si všetky potrebné pomôcky



Čisté jednorazové rukavice



Zrkadlo, ak je potrebné, aby ste si prezreli ranu



Odstraňovač lepidla, ak je to potrebné



Jednorazové plastové vrece na použité obvazy



Čistiaci prostriedok na ranu alebo čistá voda z vodovodu



Krytie



Hydratačné prípravky, ak je to potrebné




Lepiacu pásku a čisté nožnice

3. Odobranie a likvidácia použitého krytia





Pred odobraním krytia si natihnite čisté jednorazové rukavice a použité krytie vložte do plastového vreca.

Aplikácia

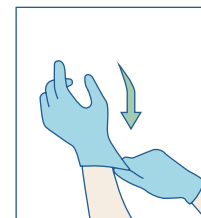



1 Umyte si ruky

Ruky si umyte mydlom a vodou a čistým uterákom si ich dôkladne utrite dosucha. Potom si nasadte čisté jednorazové rukavice.

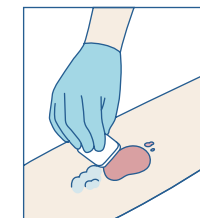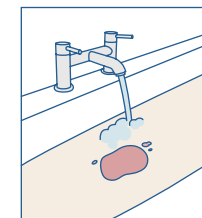


2 Vyčistite ranu

Ranu vyčistite čistou vodou alebo špeciálnym prípravkom na čistenie rán, ak vám ho odporúčal váš ošetrojúci lekár.

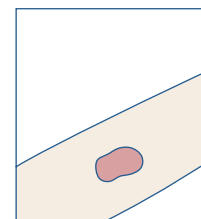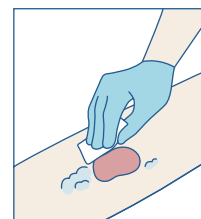



3 Osušte pokožku

Dbajte na to, aby bola pokožka okolo okrajov rany čistá a suchá.

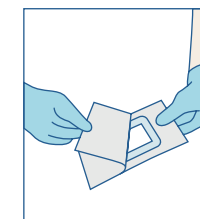



4 Otvorte balíček s krytím

Zopakujte krok 1. Opatrne otvorte obal krytia ConvaMax™ Superabsorber. Snažte sa samotného krytia dotýkať čo najmenej.

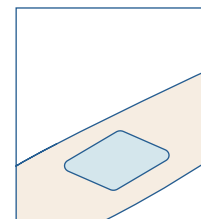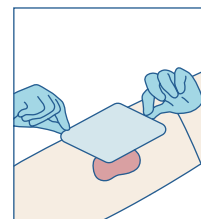

5 Priložte krytie

Krytie ConvaMax™ Superabsorber priložte priamo na ranu alebo ho aplikujte ako sekundárne krytie. Biela strana musí byť otočená smerom nadol, aby bola v priamom kontakte s pokožkou, modrá strana smeruje nahor.

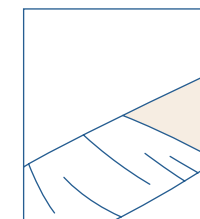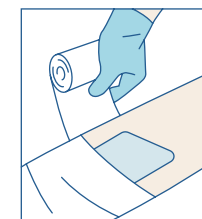

6 Krytie zaistite

V súlade s usmernením ošetrojúceho lekára aplikujte krycí obväz tak, aby ste ConvaMax™ Superabsorber zafixovali na koži.