

TILLBEHÖR

Tillbehör för dagligt bruk



HÄFTBORTTAGNING



Esenta™

- silikonbaserad häftborttagning

För enkel borttagning, utan hudstrippning eller skada.



HUDSKYDD



Esenta™

- silikonbaserad hudbarriär

Skyddar huden upp till 72 timmar.¹



LUKTKONTROLL



Diamonds™

- gelbildande portionspåsar

med luktkontroll

Får flytande innehåll fast och minskar eller eliminerar gasbildning och lukt.

Referens: 1. Voegeli D, LBF® "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS PÅ 0800 179 797

©2022 Convatec Inc. ®/™. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. AP-S6708-FIN-SWE-V1

www.convatec.fi

Convatec Oy • Kägelstranden 16 • 02150 Esbo • Tel. 0800 179 797



— forever caring —

0800 179 797

Kontakta oss:



convatec


— forever caring —

APPLICERINGSGUIDE


ESTEEM™ + KONVEX
Endelsbandage

UPPKLIPPBAR OCH FÄRDIGSTANSADE

VÄLJ EN LÄMPLIG HUDSKYDDSPLATTA

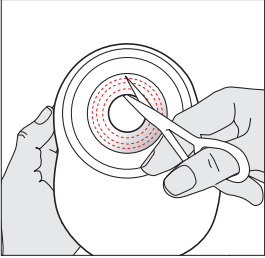


Uppklippbara:
Rita upp stomins diameter på plattan och klipp upp hålet precis utanför den ritade linjen med hjälp av en böjd sax.

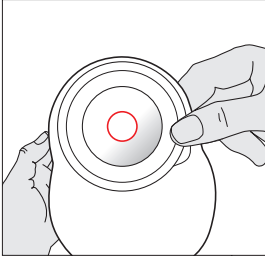


Färdigstansade hål:
Välj en påse med en något större öppning än din stomi.

APPLICERA PÅSEN


Stäng den tömbara påsen innan du applicerar den.

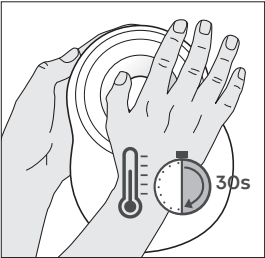


Värm det formbara hudskyddsplattan mellan händerna i 30 sekunder.

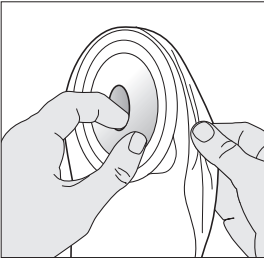


Dra isär sidorna på påsen för att släppa in lite luft.

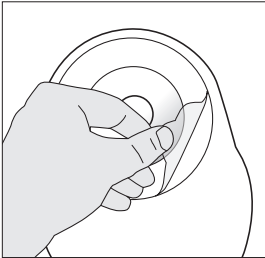

Ta av den genomskinliga skyddsfilmen.


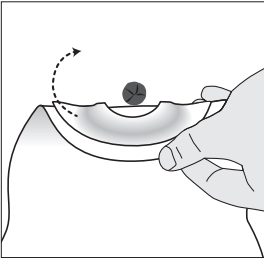


Öppningen i hudskyddsplattan placeras så att stomin är i mitten.

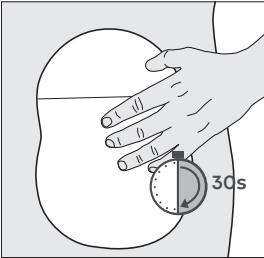


Fäst hudskyddsplattan och massera fast den i 30 sekunder. Var extra noga med området närmast stomin.

STÄNGA OCH TÖMMA PÅSEN

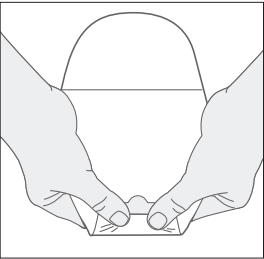
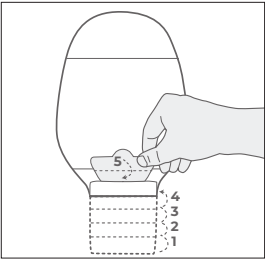


Vik änden uppåt mot dig tills föslutningarna är riktade mot varandra. Tryck och kläm till runt förslutningen för att säkra den.


TÖMNING

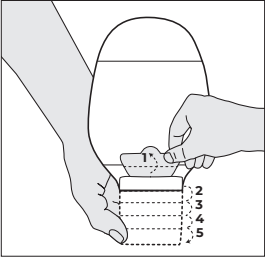

Tömning: För att tömma påsen vik änden uppåt mot kroppen. Dra för att öppna förseglingen och veckla ut änden. Öppna änden genom att trycka in båda ändarna vid utloppet med fingrarna. Töm påsen.

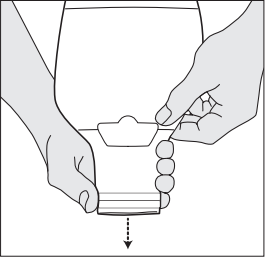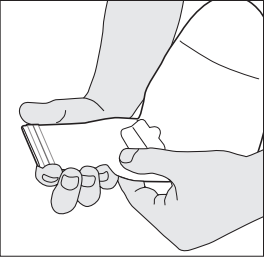


FILTER

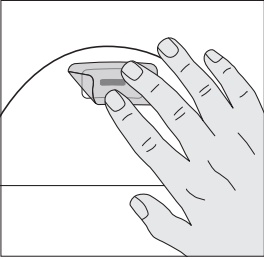


Vid bad/dusch skyddas filtret på påsens utsida av medföljande klisterlapp.

UROSTOMI


Titta på avtappningsrör på din egen påse och läs instruktionerna. Varje avtappning har sina egna kopplingar.

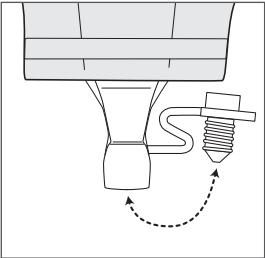


Soft Convex -avtappning

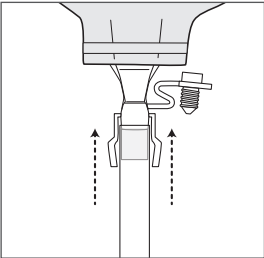


Anslut Soft Convex -adaptern

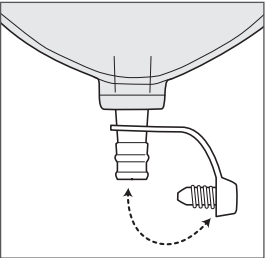


Flex Convex -avtappning

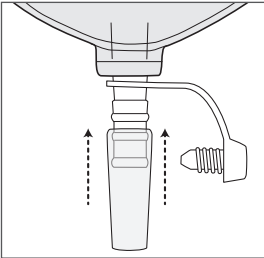


Anslut Flex Convex -adaptern

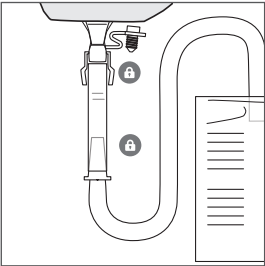

Anslutning till nattpåse:
När din tappningskran är öppen, anslut adaptern till tappningskranen och anslut din nattpåse till adaptern i andra änden. Kontrollera att alla anslutningspunkter är säkra.

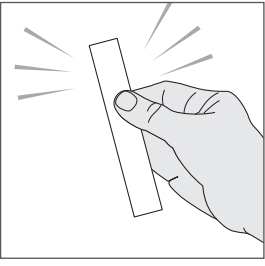

Behåll din adapter varje gång du kasserar din nattpåse.

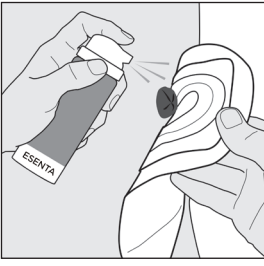

Använd Esenta™ för snabb och enkel borttagning av medicinska lim.