




Wound Hygiene™

Vanskelig helende sår

La oss bekjempe dem med vår tidlig antibiofilm strategi.

4 enkle trinn

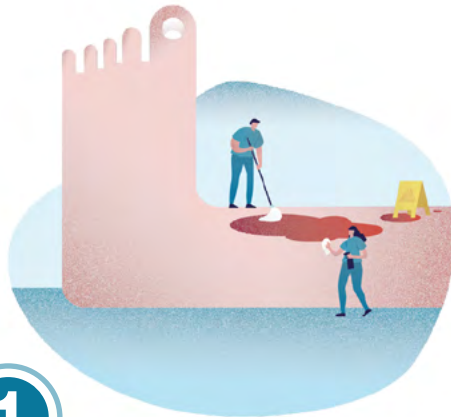

1

Vaske

Rengjør såret for å fjerne dødt vev, fremmedlegemer og biofilm. Rengjør huden rundt såret for å fjerne tørre hudflak og evt. Callus.



2

Debridere

Fjern nekrotisk, tørr og overhengende hud ved sårkantene som kan inneholde biofilm. Pass på at sårkantene er i linje med sårsengen for å fremme epitalisering og sårsmammentrekning.



3

Optimalisere

Fjern nekrotisk vev, fibrin og rester av biofilm ved hvert bandasjeskift.



4

Bandasjere

For å forhindre gjenoppbygging av biofilm benytt bandasjer som forsinker og hindrer oppbygging av ny biofilm.

Effektiv sårbehandling. Færre bandasjer – enklere valg