



FlexiSeal™ PROTECT



Fækalkatetersystem udviklet til at beskytte patienter mod risikoen for overfyldning af cuffen.

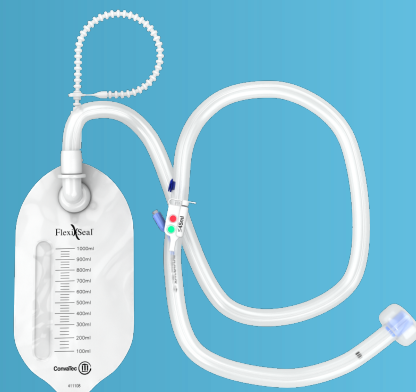

Oplev forskellen med Flexi-Seal™ PROTECT

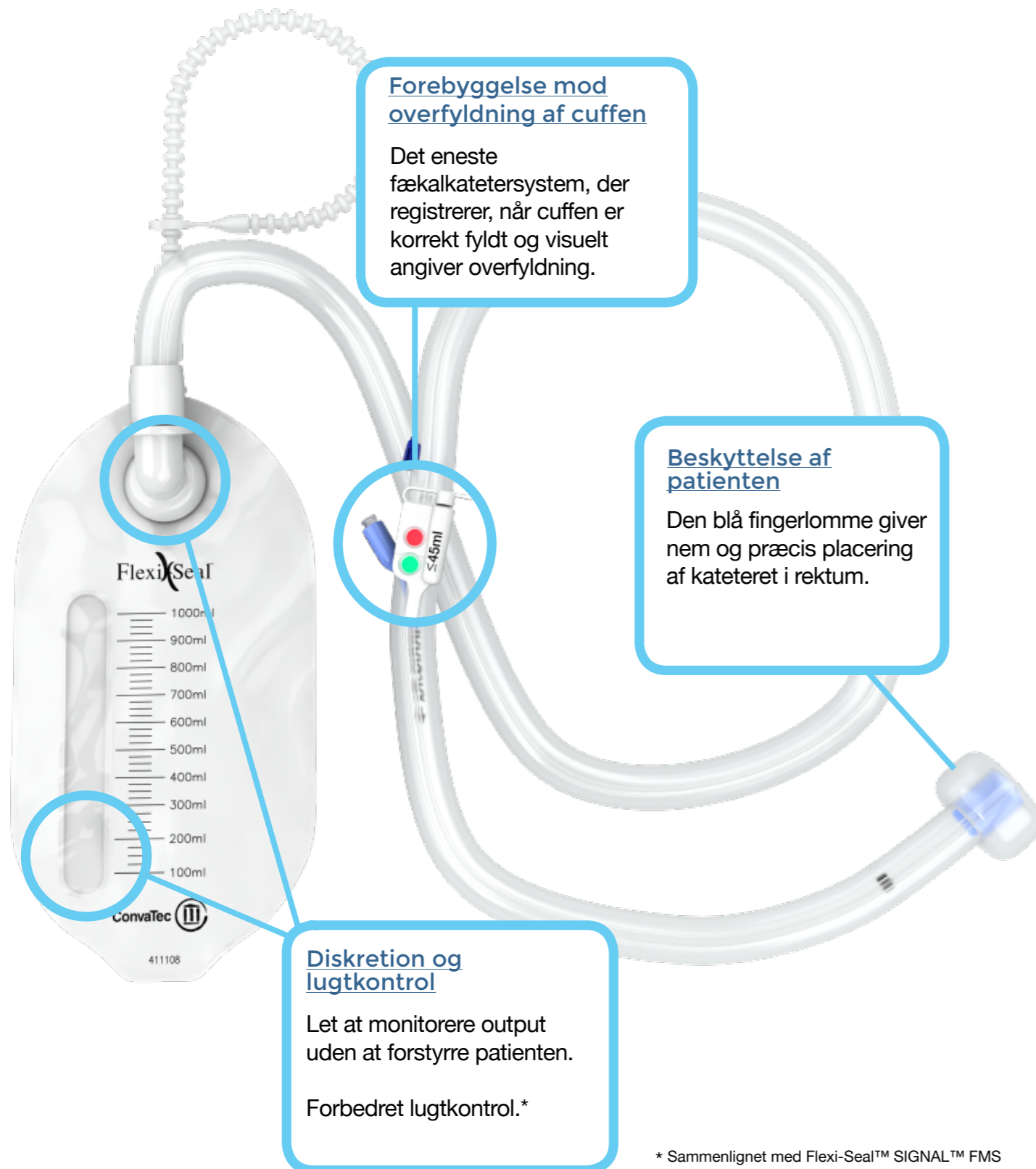

Forebyggelse mod overfyldning af cuffen

Det eneste fækalkatetersystem, der registrerer, når cuffen er korrekt fyldt og visuelt angiver overfyldning.

Beskyttelse af patienten

Den blå fingerlomme giver nem og præcis placering af kateteret i rektum.



Diskretion og lugtkontrol



Let at monitorere output uden at forstyrre patienten.

Forbedret lugtkontrol.*


* Sammenlignet med Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS

STOP når signalindikatoren popper ud

-  Den grønne signalindikator signalerer optimal fyldning af cuffen.*
-  Den røde signalindikator signalerer, at cuffen er overfyldt.
-  En hvid hætte minimerer risikoen for indgift af medicin / irrigation i den forkerte port.

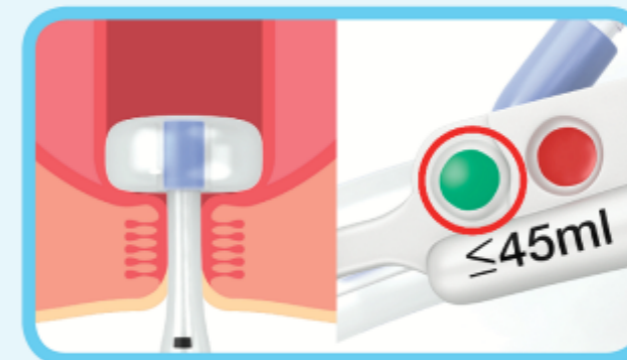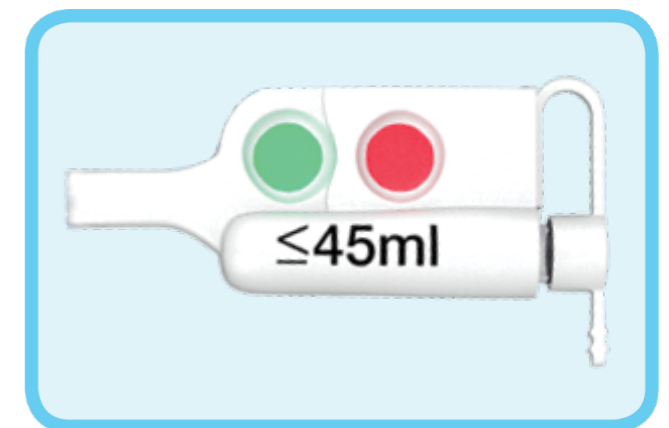

Fyld cuffen ved langsomt at trykke på sprøjtes stempel. Den grønne signalindikator vil poppe op og indikere, når cuffen har nået sit optimale fyldningsniveau.*

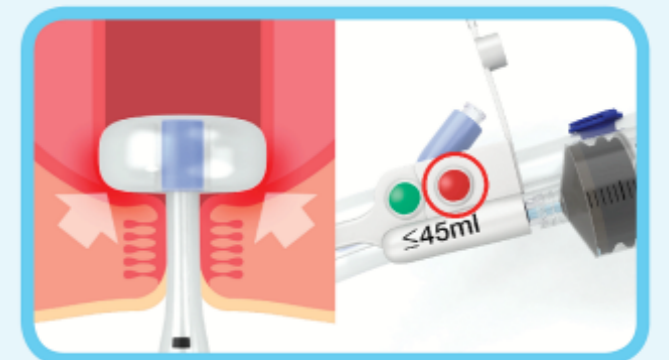

Den røde signalindikator vil poppe op og indikere, hvis cuffen er overfyldt. Overfyldt cuff kan medføre komplikationer for patienten. Såfremt den røde signalindikator popper op, tøm da cuffen fuldstændig og start på ny fyldning af cuffen, så kun den grønne indikator popper op.

* Maksimal fyldvolumen er ≤45 ml. Fyldning af cuffen bør stoppe, når den grønne PROTECT indikator popper op og forbliver ude, hvilket kan ske før 45 ml, hvis lumen i rektum er mindre end maksimal cuffstørrelse. Påfyld aldrig mere end 45 ml ialt.

Flere fordele med Flexi-Seal™ PROTECT FMS




Infektionsbeskyttelse

Det er påvist in vitro at produktet reducerer spredning af *C. difficile* og forhindrer spredning til omgivelserne.^{1,4}



Lugtabsorberende teknologi

Der er lugtkontrol i kateterets fulde længde, hvilket giver en effektiv lugtkontrol.²

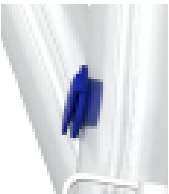

Prøvetagningsport

Den blå prøvetagningsport giver adgang til kateteret, så det er nemt og sikkert at tage afføringsprøver.



Privacy™ opsamlingspose

Opsamlingsposen med 6 gange bedre lugtkontrol har et indbygget filter, som eliminerer behovet for manuelt at lukke overskydende gas ud af opsamlingsposen.^{3,4}

Produktoplysninger

Flexi-Seal™ PROTECT FMS Kit (1 kit/æske, 1 pose)	421630
Privacy™ opsamlingspose med kulfilter (10 stk./æske)	411108

REFERENCER: 1. Jones S, Towers V, Welsby S, et al. Clostridium difficile Containment Properties of a Fecal Management System: An In Vitro Investigation. Ostomy Wound Management 2011;57(10):38–49.2. Odor Barrier Testing. 130124-001. Data on file, ConvaTec Inc. 3. Flexi-Seal® Privacy Bag Filter Evaluation. 121412-001. Data on file, ConvaTec Inc. 4. Minimizing the spread of *C. difficile* spores from the release of gas. February 19, 2013. Data on file, ConvaTec Inc.

Ønsker du at vide mere,
kontakt gerne din
ConvaTec produktspecialist
eller vores kundeservice på
telefon 48 16 74 74

www.convatec.dk