



# ease™

## Guía de aplicación

3x9 cm



3x11 cm




### 1. Preparación

Escoja el tamaño, forma y tipo de tiras que mejor se adapten a sus necesidades.

El arco de sujeción sirve para cubrir las esquinas de su apósito.

El apósito recto sirve para cubrir los laterales de su apósito.


La tira debería quedar superpuesta al borde del apósito entre 1,5 y 2 cm.

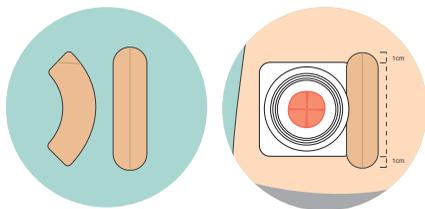

### 2. Aplicación


Limpie la piel con agua tibia. Séquela, dejando un poco de humedad en ella, ya que las tiras se adhieren mejor cuando la piel está ligeramente húmeda.

Retire una mitad del papel protector y coloque la tira superponiéndola al borde del apósito. Retire el papel protector restante, adhiera la parte adhesiva a la piel y sujete la tira totalmente lisa durante 30 segundos para que se adhiera correctamente.

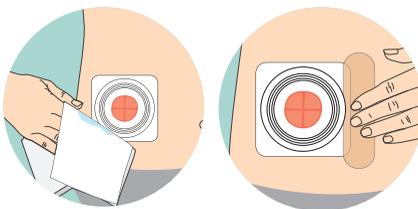

### 3. Retirada

Sujete la piel y, suavemente, despegue las tiras del cuerpo. Puede usar un eliminador de adhesivos para ayudarle en este proceso.

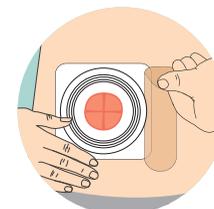

Distribuido por

# ease™

## Strips

### Preguntas frecuentes

#### ¿Para qué se usan las tiras?

Las tiras proporcionan un extra en seguridad cuando se aplican en los bordes del apósito.

El borde de los apósitos puede perder adhesión cuando se usa durante periodos de tiempo prolongados.

Las tiras Ease Strips ayudan a mantenerlos adheridos a la piel.

También se pueden usar para evitar que el borde del apósito se adhiera a la ropa después de nadar o de bañarse.

#### ¿Dónde deben colocarse las tiras?

La tira debería quedar superpuesta al borde del apósito entre 1,5 y 2 cm.

#### ¿Las tiras son resistentes al agua?

La capa superior de las tiras es resistente al agua, por lo que pueden ser usadas mientras nada o se baña.

#### Las tiras parecen muy finas, ¿por qué?

Este hecho proporciona flexibilidad, de forma que se adaptan mejor al cuerpo y a sus movimientos.

Además, parecen y se sienten como una segunda piel. Transparentes de forma que casi no se ven y tan finas que casi ni se notan.

#### ¿De qué material están hechas?

Hidrocoloide

#### ¿Las tiras contienen látex?

No, no contienen látex.

#### ¿En qué medidas están disponibles?

Las tiras están disponibles en las siguientes medidas:



3 x 11 cm



3 x 9 cm

#### ¿Las tiras son estériles?

No, no son estériles, pero se fabrican en condiciones totalmente higiénicas.

#### ¿Cuánto tiempo pueden mantenerse aplicadas?

Las tiras pueden llevarse todo el tiempo que se mantengan adheridas, o todo el tiempo que el apósito se mantenga adherido.

Sin embargo, la recomendación máxima es de una semana.

**Para mayor información,  
llámenos al 900 30 40 50**

Distribuido por

 **ConvaTec**

Consulte las instrucciones de uso que se encuentran en la caja para una información más detallada.

© 2018 ConvaTec Inc.  
™ indica marcas de ConvaTec. AP-019121-ES  
EASESTRIPSFAQS