

LISÄTARVIKKEET

Lisätarvikkeet – suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön avannesidosten kanssa



SIDOKSEN POISTOON



Esenta™

- kirvelemätön silikonipohjainen liimanpoistosuihke ja -pyyhe

Poistaa helposti liima-aineet.
Ei aiheuta ihon pinnan kuoriutumista eikä rikkoutumista.



IHON HOITOON



Esenta™

- kirvelemätön silikonipohjainen ihonsuojasuihke ja -pyyhe

Suojaa ihoa jopa 72 tuntia.¹



VARMAAN OLOON



Diamonds™

- geelityyvät ja hajuja sitovat rakeet

Erittäin imukykyinen Diamonds geelittää avannepussin sisällön ja poistaa hajuja.

Viite: 1. Voegeli D, LBF® “No-Sting” Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

KYSY LISÄTIETOJA 0800 179 797

©2022 Convatec Inc. ®/™, ConvaTec Group omistaa kaikki tuotemerkit. AP-S6740-FIN-FIN-V1 (V1.0)

www.convatec.fi

Convatec Oy • Keililaranta 16 • 02150 Espoo • Puh. 0800 179 797



— forever caring —

0800 179 797

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:



— forever caring —


KÄYTTÖOHJE

NATURA® & NATURA®+


Kaksiosaiset avannesidokset

VALMIS AUKKO | LEIKATTAVA | KUPERA


VALITSE IHONSUOJALEVY JA LÄMMITÄ SE KÄSIEN VÄLISSÄ

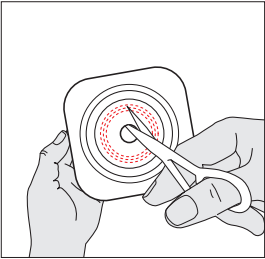


Leikattava:
Merkitse avanteen muoto ja koko ihonsuojalevyn kääntöpuolelle ja leikkaa aukko hieman isommaksi kuin merkitty viiva. Voit sormin siloitella leikattua reunaa.

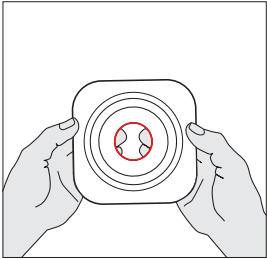

Valmis aukko:
Valitse ihonsuojalevy, jossa valmiiksi leikattu aukko on hieman avannetta suurempi.

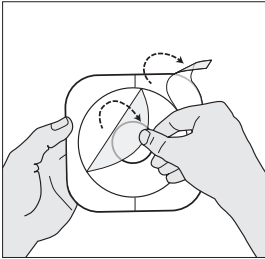


Poista suojakalvot.

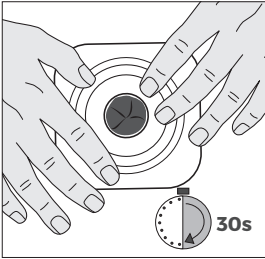


Laita ihonsuojalevy avanteen ympärille, tasoita rypyt ja pidä levyä paikallaan 30 sekuntia.

PUSSIN KINNITTÄMINEN


Sulje tyhjennettävä pussi ennen pussin kiinnittämistä.

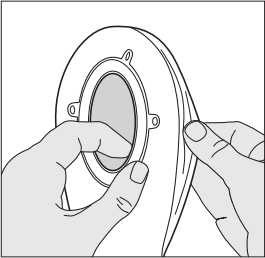

Vedä pussin sivut irti toisistaan, jotta pussiin pääsee hieman ilmaa.

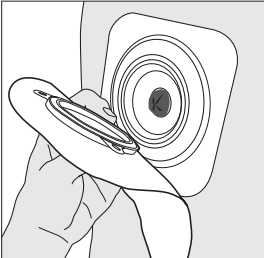


Paina renkaita varovasti yhteen alhaalta alkaen. Suodattimen kohdalla vedä pussia hieman alaspäin ja paina renkaat yhteen painamatta suodattimen päältä.

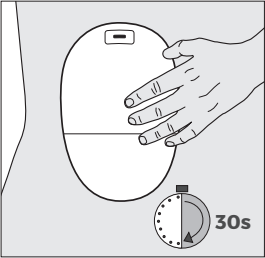



Paina pussia paikoilleen noin 30 sekuntia. **Tarkista aina, että renkaat ovat kiinnittyneet toisiinsa kokonaan. Jos näin ei ole, toista edelliset vaiheet.**

PUSSIN SULKEMINEN JA TYHJENTÄMINEN


TARRASULKIJAPUSSI

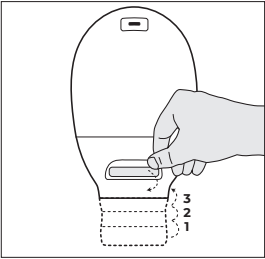


Sulkeminen:
Aloita pussin sulkeminen taittamalla alimmaisesta valkoisesta kaistaleesta. Kun olet taittanut ne kolme kertaa, sulkijat ovat vastakkain. Paina ja nipistä kunnes tunnet, että ne napsahtavat kunnolla yhteen.
Lock-it Pocket: Käännä päällyskangas nurinpäin, jolloin pussinsulkija jää taskuun piiloon.

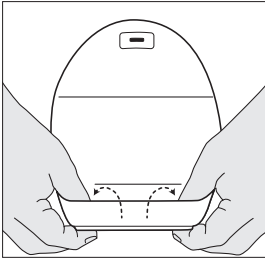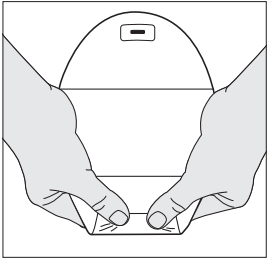




IRTOSULKIJALLA OLEVA PUSSI

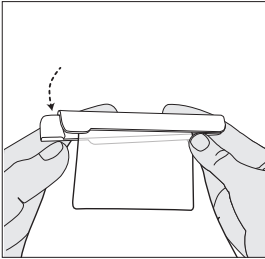

Sulkeminen:
Taita pussin suu ja kiinnitä irtosulkija paikalleen.

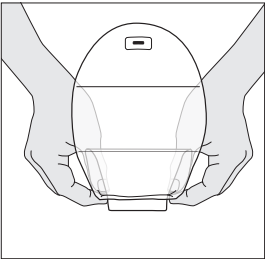


Tyhjentäminen:
Käännä pussinsulkija näkyville päällyskankaan alta. Pidä tyhjennysosaa ylöspäin, avaa sulkijat varovasti ja käännä pussin suu auki. Vetämällä samaan aikaan ylemmästä pussinsulkijasta pussin suu avautuu paremmin. **Lock-it Pocket:** Paina sormilla tyhjennysliuskojen molemmista päistä ja tyhjennä pussin sisältö.

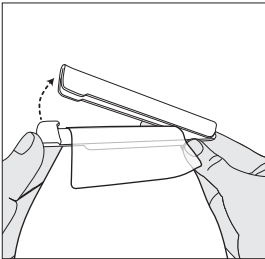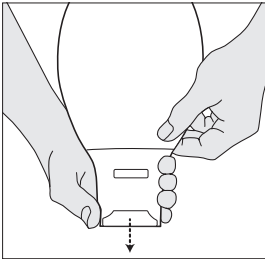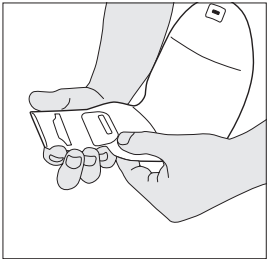



Tyhjentäminen:
Irrrota sulkija ja tyhjennä pussi.

VIRTSA-AVANNEPUSSI



Tarkista oman pussisi tyhjennysventtiili ja lue sen ohjeet. Jokaiseen tyhjennysventtiiliin on omat liittimet.

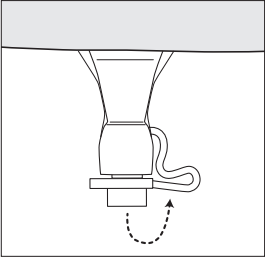


Natura®+ Soft Tap -tyhjennysventtiili

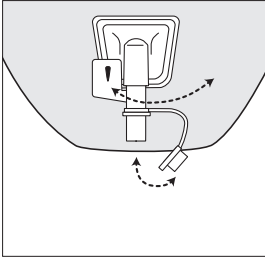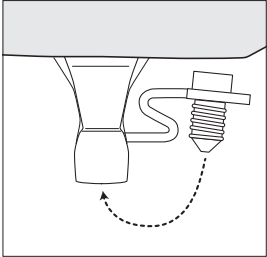


Accuseal™-tyhjennysventtiili

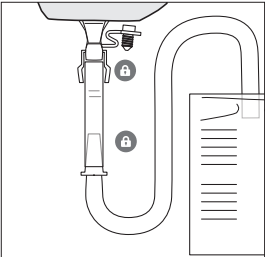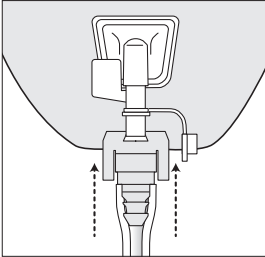

Yöpussiin liittäminen:
Avaa virtsa-avannepussin tyhjennysventtiili, kiinnitä liitin pussiin ja toinen pää yöpussiin. Tarkista kiinnitysten pitävyys.

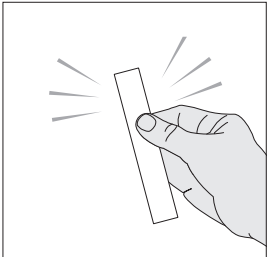


Muista ottaa liitin talteen kun vaihdat yöpussia.

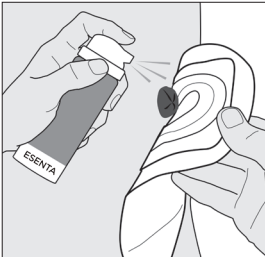

AVANNESIDOKSEN POISTAMINEN

Käytä hellävaraista Esenta™-liimanpoistosuihketta tai -pyyhettä ihonsuojalevyn irrottamiseen.

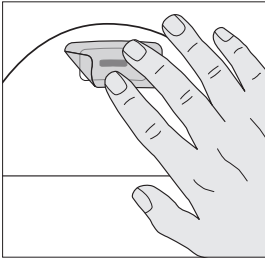

SUODATIN

Peitä suodatin suodatintarralla suihkun ja uimisen aikana. Poista tarra sen jälkeen.