ESENTA[™]

Spray baarreira protetor cutâneo

De facil uso: Siga os seguintes passos



Para começar

Agite bem antes do uso. Limpe e seque a pele.



Fácil aplicação

Segure 10 cm desde a área que deve ser tratada e aplique uma camada uniforme em movimento de varredura



Verifique se a pele está seca

Antes de aplicar produtos adesivos, como dispositivos de ostomia ou pensos, verifique que a área está completamente seca.



Volte a aplicar de novo

ESENTA™ protetor cutâneo deve ser aplicado toda vez que mude de dispositivo ou penso para manter uma proteção ótima.
ESENTA™ protetor cutâneo não vais causar acumulação de camada barreira na superfície da pele.





ESENTA[™]

Spray baarreira protetor cutâneo

De facil uso: Siga os seguintes passos



Para começar

Limpe e seque a pele. Rasgue o toalhete para abrir e desdobre.




Verifique se a pele está seca

Antes de aplcar um produto adesivo como o dispositivo de ostomia ou pensos, assegure-se que a área está completamente seca.



Fácil de aplicar

Passar suavemente o toalhete para proteger e espere até secar completamente.

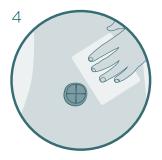

Volte a aplicar de novo

ESENTA™ protetor cutâneo deve ser aplicado toda vez que mude de dispositivo ou penso para manter uma proteção ótima. É recomendado aplicar de novo cada 12-72 horas, dependendo das condições da pele.

ESENTA™ protetor cutâneo não vais causar acumulação de camada barreira na superfície da pele.



Learn more at <<placeholder local market>> or contact us at <<placeholder local market>> or <<placeholder local market>>.



ESENTA