



ESENTA™ Hudbarriär spray

Enkel att använda: följ stegen nedan

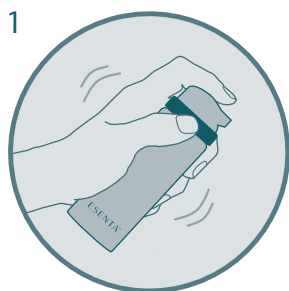


Kom igång

Skaka ordentligt innan användning. Gör rent och torka huden.

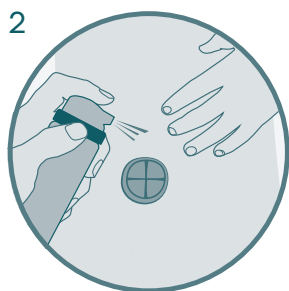


Enkel att applicera

Håll cirka 10 cm från det område som ska behandlas och applicera ett jämt lager i en svepande rörelse.

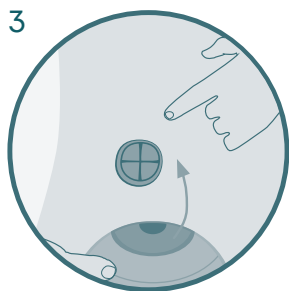

Kontrollera att huden är torr

Se till att området är helt torrt innan du applicerar självhäftande produkter såsom stomibandage eller förband.

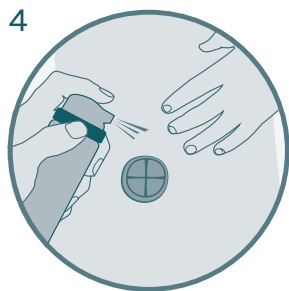

Applicera igen


ESENTA™ hudbarriär bör appliceras på nytt vid varje byte av bandage eller förband för att bibehålla fullständigt skydd. ESENTA™ hudbarriär kommer inte att orsaka en uppbyggnad av barriärfilm på huden.

Se bipacksedel
för fullständig
bruksanvisning.




ESENTA™ Hudbarriär våtserveletter

Enkel att använda: följ stegen nedan

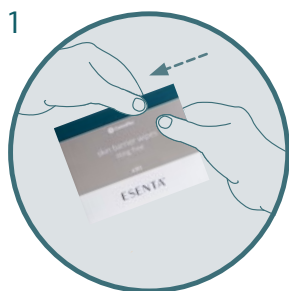


Kom igång

Riv upp förpackningen och vik ut servetten.

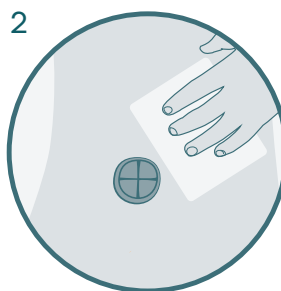


Enkel att applicera

Torka försiktigt området som ska skyddas och vänta tills det är torrt.

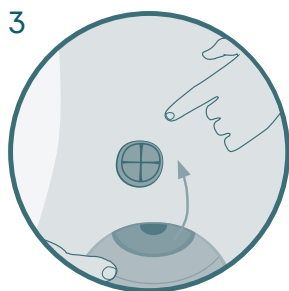

Kontrollera att huden är torr

Se till att området är helt torrt innan du applicerar självhäftande produkter såsom stomibandage eller förband.

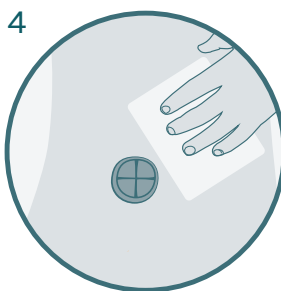

Applicera igen

ESENTA™ hudbarriär bör appliceras på nytt vid varje byte av bandage eller förband för att bibehålla fullständigt skydd. Ny applicering rekommenderas var 12-72:e timme, beroende på hudens tillstånd. ESENTA™ hudbarriär kommer inte att orsaka en uppbyggnad av barriärfilm på huden.



Läs mer på convatec.se eller kontakta oss på telefon 020-21 22 22 eller convatec.kundservice@convatec.com

Se bipacksedel för fullständig bruksanvisning.

©2022 Convatec Inc. ®/™ alla varumärken tillhör företag i Convatec-koncernen.
Gäller från 31 december 2021. AP-032861-MRL-GBL

