

TILLBEHÖR

Tillbehör för dagligt bruk



HÄFTBORTTAGNING



Esenta™

- silikonbaserad häftborttagning

För enkel borttagning, utan hudstrippning eller skada.



HUDSKYDD



Esenta™

- silikonbaserad hudbarriär

Skyddar huden upp till 72 timmar.¹



LUKTKONTROLL



Diamonds™

- gelbildande portionspåsar med luktkontroll

Får flytande innehåll fast och minskar eller eliminerar gasbildning och lukt.

Referens: 1. Voegeli D, LBF® "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS PÅ 0800 179 797

©2022 Convatec Inc. ®/™, Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. AP-S6738-FIN-SWE-V1

www.convatec.fi

Convatec Oy • Kägelstranden 16 • 02150 Esbo • Tel. 0800 179 797



— forever caring —

**Kontakta oss:
0800 179 797**



convatec


— forever caring —

APPLICERINGSGUIDE


ESTEEM™ +
Endelsbandage

UPPKLIPPBAR OCH FÄRDIGSTANSADE

VÄLJ EN LÄMPLIG
HUDSKYDDSPLATTA

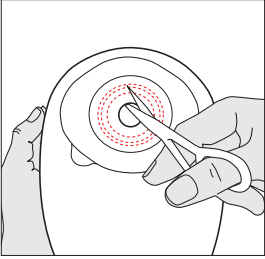


Uppklippbara:
Rita upp stomins
diameter på plattan och
klipp upp hålet precis
utanför den ritade linjen
med hjälp av en böjd sax.

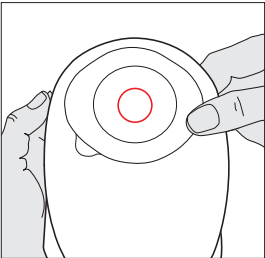




Färdigstansade hål:
Välj en påse med
en något större
öppning än din stomi.

APPLICERA PÅSEN


Stäng den tömbara påsen innan du applicerar den.

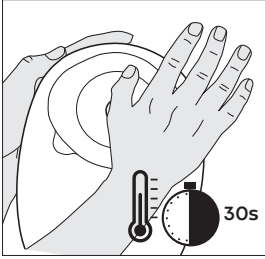

Värm det formbara hudskyddsplattan mellan händerna i 30 sekunder. Dra isär sidorna på påsen för att släppa in lite luft. Ta av den genomskinliga skyddsfilmen.

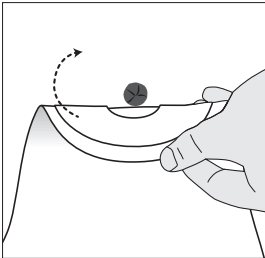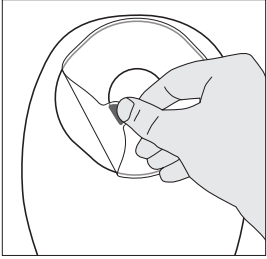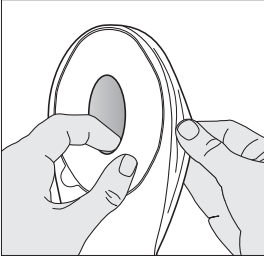


Öppningen i hudskydds-
plattan placeras så att
stomin är i mitten.

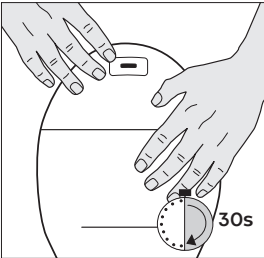




Fäst hudskyddsplattan
och massera fast den
i 30 sekunder. Var extra
noga med området
närmast stomin.

STÄNGA OCH TÖMMA PÅSEN



INVISICLOSE™ PÅSLÅS

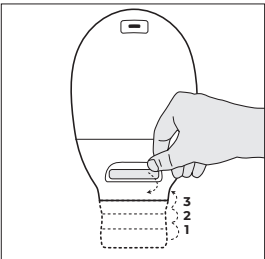


Stänga:
Vik änden uppåt mot dig tills förslutningarna är riktade mot varandra. Tryck och kläm till över hela förslutningen för att säkra den. **Vänd påslåset Lock-it-Pocket™** ut och in för att stoppa in änden inuti.

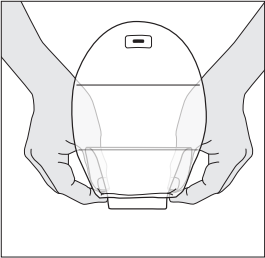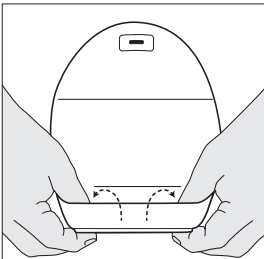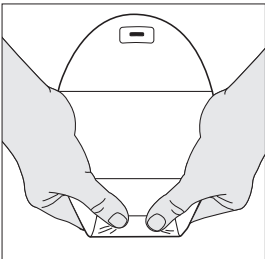


Tömning:
För att tömma påsen vik änden uppåt mot kroppen. Dra för att öppna förseglingen och veckla ut änden. **Lock-it Pocket:** Öppna påslåset och öppna änden genom att trycka in båda ändarna vid utloppet med fingrarna. Töm påsen.

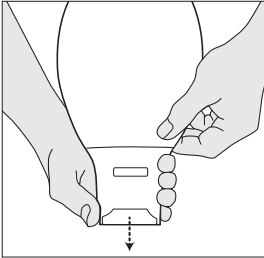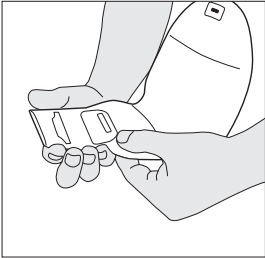

PÅSKLÄMMA

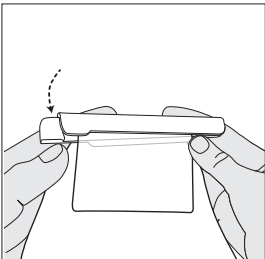


Stänga:
Vik påsen och fäst
förslutningen.

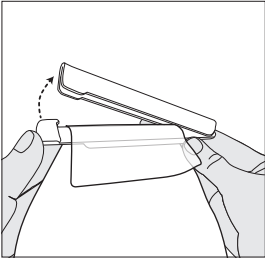


Tömning:
Ta bort förslutningen och
töm påsen.

FILTER

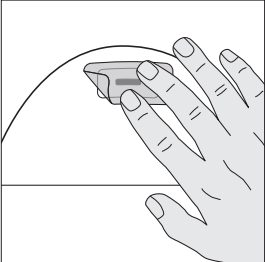


Vid bad/dusch skyddas
filtret på påsens utsida av
medföljande klisterlapp.


UROSTOMI

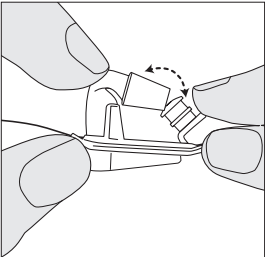


Vik avtappningsventilen
stängd och öppen.

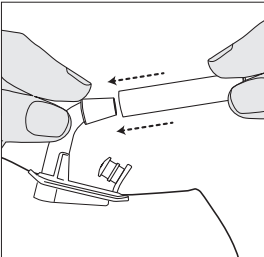


Anslut adaptern till
avtappningen.

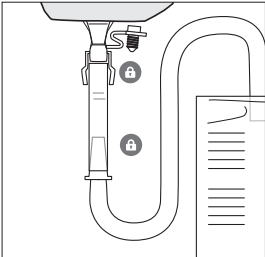

Anslutning till nattpåse:
När din tappningskran är
öppen, anslut adaptern till
tappningskranen och anslut
din nattpåse till adaptern i
andra änden. Kontrollera att
alla anslutningspunkter är
säkra.

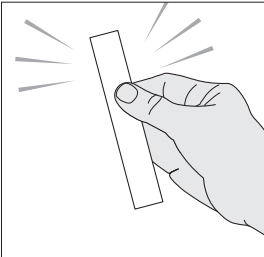

Behåll din adapter varje
gång du kasserar din
nattpåse.

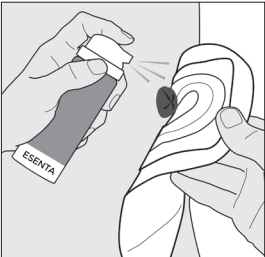

Använd Esenta™ för snabb
och enkel borttagning av
medicinska lim.