



Little Ones^{MD} de ConvaTec - Mode d'emploi Appareillage à deux pièces pour enfant

Commencer par nettoyer la peau autour de la stomie de votre enfant à l'aide d'un savon doux, exempt d'huile, et de l'eau tempérée. Si l'on préfère utiliser des lingettes humides commerciales, en choisir qui ne contiennent ni huiles ni lotions, car ces dernières peuvent nuire à la bonne adhérence de l'appareillage sur la peau. La peau devrait être exempte de tous solvants et de toutes substances grasses. Assécher complètement par tapotements.

Préparation de la barrière cutanée*

1. À l'aide du guide de mesure fourni, prendre la mesure de la base de la stomie. Tracer la mesure choisie sur le papier protecteur de la barrière cutanée en centrant l'ouverture prédécoupée. (Il n'est peut-être pas nécessaire de porter des gants; consulter un professionnel de la santé.)
2. Découper l'ouverture de la même grandeur que la stomie. Au moyen de ciseaux courbes à branches courtes, couper en suivant le tracé.
3. Retirer le papier protecteur de la barrière cutanée.



Application de la barrière cutanée flexible*

4. Mettre la barrière cutanée en place, puis la maintenir pendant 30 secondes afin qu'elle épouse bien tout le tour de la base de la stomie.
5. Une fois la barrière cutanée en place, retirer le papier protecteur d'un côté du collet, puis appliquer celui-ci sur la peau en lissant. Répéter pour l'autre côté du collet en s'assurant qu'il est bien lisse et sans plis.



Mise en place du sac sur la barrière cutanée*

- Si votre enfant à une colostomie ou une iléostomie et qu'un sac vidable est utilisé, il est recommandé de fermer le sac avant l'application. Le « dispositif de fermeture » du sac ressemble à une attache pour sacs en plastique (ligature); il sert à fermer les sacs dotés d'un orifice à leur extrémité inférieure (sacs vidables). Retirer le papier protecteur de la languette adhésive sur le dispositif de fermeture du sac. Placer le dispositif à environ 6,25 mm (1/4 po) de l'extrémité du sac, du côté extérieur (qui ne touche pas à la peau). Appuyer pour maintenir en place. Replier l'extrémité du sac quatre fois autour du dispositif de fermeture, en serrant. Puis, toujours en serrant, replier les deux extrémités du dispositif de fermeture vers le centre, du côté du sac le plus près de la peau (côté de la collerette). S'assurer que l'extrémité du sac est lisse, plate et sans plis.
- Si votre enfant à une urostomie et qu'un sac pour urostomies est utilisé, veiller à bien fermer la valve avant de mettre le sac en place sur la barrière cutanée. Pour fermer la valve : plier le tube de drainage jusqu'à ce qu'il rejoigne le bouchon, puis insérer complètement le bouchon dans le tube.
- Veiller à séparer les surfaces internes du sac et s'assurer que celui-ci contient un peu d'air.
- Placer la collerette du sac sur la collerette de la barrière cutanée. En partant du bas, exercer une légère pression autour de la circonférence de la collerette; une série de « clics » audibles indiqueront que l'appareillage est bien verrouillé. **Important** : vérifier toujours de nouveau que les deux collerettes sont parfaitement jointes en répétant la marche à suivre ci-dessus.



Retrait du sac et de la barrière cutanée*

Pour retirer le sac et la barrière cutanée, préparer une débarbouillette douce ou une serviette en papier humide afin de nettoyer la peau de votre enfant. Saisir le bord du sac d'une main, tout en appuyant avec précaution sur la peau avec l'autre main. Tirer lentement et délicatement afin de retirer la barrière cutanée et le sac ensemble.



Jeter l'appareillage.

* Consulter la notice pour le mode d'emploi détaillé.



SOUTIEN

Pour de plus amples renseignements sur ce produit ou d'autres produits de ConvaTec, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel), du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) au **1 800 465-6302** ou visitez notre site Web au **www.convatec.ca**



Ne pas oublier de vider le sac de votre enfant lorsqu'il est au tiers plein. Il est déconseillé d'utiliser des savons ou d'autres nettoyants à l'intérieur du sac. Au besoin, rincer avec de l'eau tiède.

ConvaTec
Little Ones™