




4


Для активации лубриканта (покрытия на катетере) убедитесь, что катетер контактировал с водой не менее 15 сек. Вскройте упаковку катетера со стороны коннектора, потянув за лепестки упаковки.

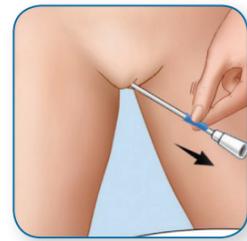

8

Убедившись, что мочевого пузыря пуст, медленно извлеките катетер. Необходимо остановиться, если моча начала вытекать снова.

Выбросьте катетер после использования. **Вымойте руки.**

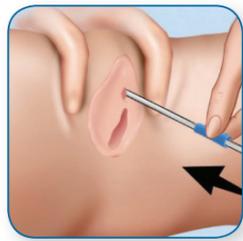

5

Одной рукой раздвиньте малые половые губы (складки кожи с обеих сторон уретры). Отверстие уретры должно быть заметным.



6

Другой рукой, удерживая катетер за голубой ползунок, медленно введите его в уретру до тех пор, пока не начнет вытекать моча. Убедитесь в том, что воронкообразный конец направлен в подходящую емкость для мочи.



7

Когда моча начнет вытекать, аккуратно продвиньте катетер немного (на один или два сантиметра) внутрь, чтобы убедиться в том, что он внутри мочевого пузыря.



Изготовлено в Турции

Производитель:
Оазис Медикал А.С. Фатих
Мах 3105, Кад. № 8 Казан
Анкара, Турция
(Oasis Medikal A.Ş. Fatih
Mah. 3105. Cad. No: 8
Kazan-Ankara TURKEY)
Phone: +90 312 815 46 24
www.oasismedikal.com

Дистрибьютор в Европе:
ConvaTec Limited
First Avenue
Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK
www.convatec.com

Импортер / Представительство
в России:
ЗАО «КонваТек»,
115054, г. Москва,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1.
Тел.: +7 495 663 70 30
Факс: +7 495 748 78 94



Срок годности – 3 года.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С МЕДИЦИНСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

За дополнительной информацией о продукции ConvaTec звоните по телефону Информационной Линии Поддержки КонваТек

8-800-200-80-99

(звонок по России бесплатный).

Часы работы: понедельник-пятница, с 9:00-17:00.

Наименование изделия	Размеры катетера, СН	Длина катетера, см	Количество штук в упаковке
Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, мужские, с пакетиком-саше с водой	8, 10, 12, 14, 16, 18	40	30
Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Нелатон, женские, с пакетиком-саше с водой	8, 10, 12, 14, 16	40	30
Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные: типа Тиманна, мужские, с пакетиком-саше с водой	10, 12, 14, 16, 18	20	30



STERILE EO

Стерилизовано этиленоксидом



Для одноразового применения



Хранить в сухом месте



См. инструкцию по применению



Не применять при поврежденной упаковке



Содержит фталаты




Не содержит латекс



Использовать до



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

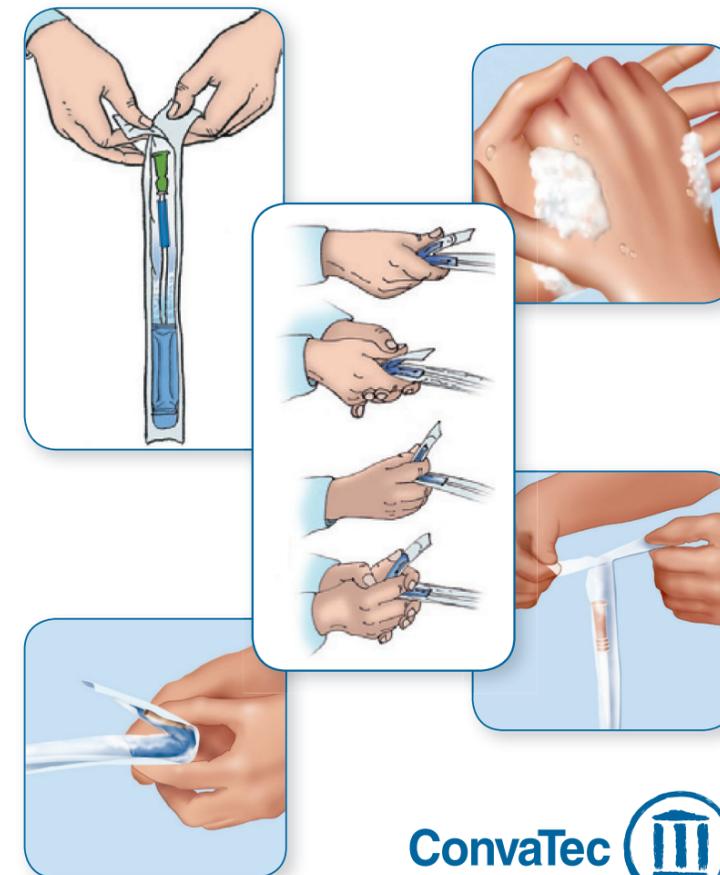


Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные


Лубрицированные катетеры ДжентлКет предназначены для отведения мочи из мочевого пузыря посредством интермиттирующей (прерывистой) катетеризации (самокатетеризации).



1
Вымойте руки перед проведением процедуры катетеризации.

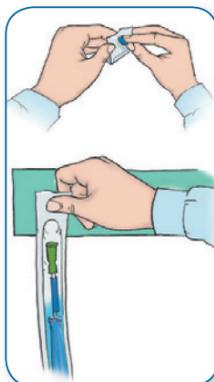


3
Упаковку с катетером можно приклеить на любую сухую поверхность, удалив синий стикер, расположенный на упаковке катетера.

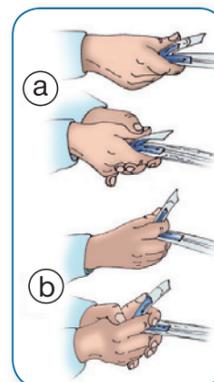


2
Вскройте стерильный пакетик-саше с водой (не открывая упаковку с катетером), используя один из показанных приемов:
а) путем сгибания и надавливания. Сложите пакетик-саше примерно пополам в ЗАКРЫТОЙ упаковке с катетером для того, чтобы вода из пакетика-саше могла разлиться и распределиться равномерно внутри упаковки.
б) поместив указательный палец на упаковку с катетером в проекции середины пакетика-саше, сложите его пополам, надавив сверху большим пальцем. Затем позвольте воде вылиться в ЗАКРЫТЫЙ блистер.


Катетеры GentleCath (ДжентлКет) для самокатетеризации лубрицированные со стерильным пакетиком-саше

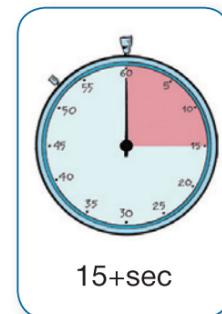


4
Убедитесь в том, что катетер контактировал с водой не менее 15 сек. и подготовьтесь к катетеризации.

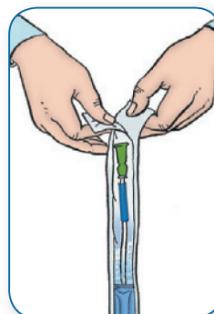

5
Вскройте упаковку катетера со стороны коннектора, потянув за лепестки блистера (упаковки).

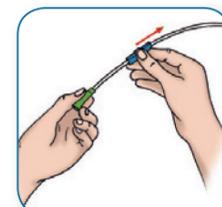

6/a
Удерживая катетер за голубой ползунок, можно провести катетеризацию, даже не касаясь самого катетера.

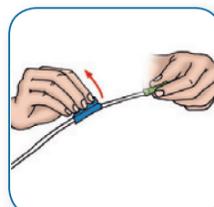

6/b
При необходимости ползунок можно удалить до или во время катетеризации.

Пошаговая инструкция по применению катетера для мужчин*



1
Тщательно вымойте руки водой с мылом.




2
Отодвиньте крайнюю плоть полового члена и промойте его водой.




3
Вскройте стерильный пакетик-саше с водой* (не вскрывая упаковку с катетером) одним из способов, указанных в общей части инструкции по применению. После чего позвольте воде растечься вдоль упаковки.



4
Для активации лубриканта (покрытия на катетере) убедитесь, что катетер контактировал с водой не менее 15 сек. Вскройте упаковку катетера со стороны коннектора, потянув за лепестки упаковки.

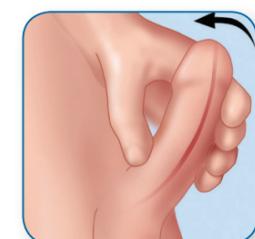


5
Поднимите пенис вверх, по направлению к животу. Это облегчит введение катетера в мочевой пузырь. Не сжимайте пенис слишком сильно, так как это может воспрепятствовать открытию уретры.

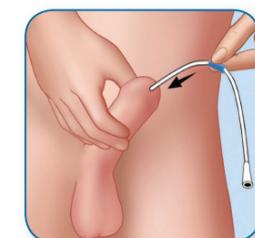

6
Используя голубой ползунок, который позволяет не касаться катетера руками, медленно и плавно введите катетер в наружную раскрытую часть уретры и далее в мочевой пузырь, пока моча не начнет вытекать. Убедитесь в том, что воронкообразный конец катетера направлен в подходящую емкость для мочи.



7
Когда моча начнет вытекать, аккуратно продвиньте катетер немного (на один или два сантиметра) внутрь, чтобы убедиться в том, что он внутри мочевого пузыря.

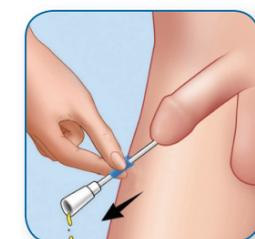

8
Убедившись, что мочевой пузырь пуст, медленно извлеките катетер. Необходимо остановиться, если моча начала вытекать снова.

Выбросьте катетер после использования. Вымойте руки.


Пошаговая инструкция по применению катетера для женщин*



1
Тщательно вымойте руки водой с мылом.



2
Вымойте область гениталий в направлении спереди назад, изнутри и снаружи.

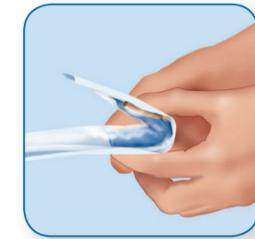

3
Вскройте стерильный пакетик-саше с водой* (не вскрывая упаковку с катетером) одним из способов, указанных в общей части инструкции по применению. После чего позвольте воде растечься вдоль упаковки.

* пожалуйста, обратитесь к общей части инструкции по применению

* пожалуйста, обратитесь к общей части инструкции по применению