

LISÄTARVIKKEET

Lisätarvikkeet – suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön avannesidosten kanssa



SIDOKSEN POISTOON



Esenta™

**- kirvelemätön silikonipohjainen
liimanpoistosuihke ja -pyyhe**

Poistaa helposti liima-aineet.
Ei aiheuta ihon pinnan kuoriutumista eikä
rikkoutumista.



IHON HOITOON



Esenta™

**- kirvelemätön silikonipohjainen
ihonsuojasuihke ja -pyyhe**

Suojaa ihoa jopa 72 tuntia.¹



VARMAAN OLOON



Diamonds™

**- geelityvät ja hajuja
sitovat rakeet**

Erittäin imukykyinen Diamonds
geelittää avannepussin sisällön
ja poistaa hajuja.

Viite: 1. Voegeli D, LBF® “No-Sting” Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

KYSY LISÄTIETOJA 0800 179 797

©2022 Convatec Inc. ®/™, Convatec Group omistaa kaikki tuotemerkit. AP-56739-FIN-FIN-VI (V1.0)

www.convatec.fi

Convatec Oy • Keilaranta 16 • 02150 Espoo • Puh. 0800 179 797



— forever caring —

0800 179 797

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:



KÄYTTÖOHJE


ESTEEM™+

Yksiosainen muotoiltava avannesidos


CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGY™

MUOTOILTAVA


ESTEEM™+ YKSIOSAINEN

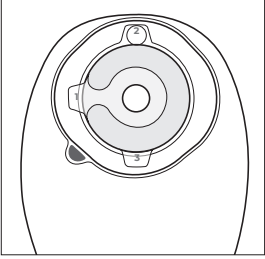


Ihonsuojalevy

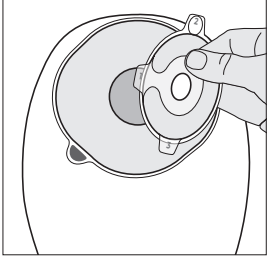


Irrota muotoiltava ihonsuojalevy pussista.

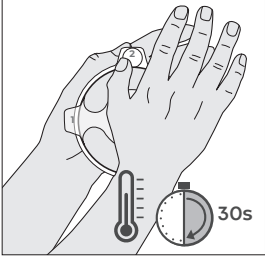


Lämmitä ihonsuojalevyä käsiesi välissä 30 sekuntia.

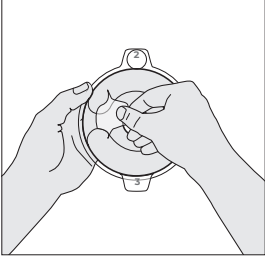


Irrota 1:llä merkitty muovisuoja. Levy muotoillaan tältä puolelta.

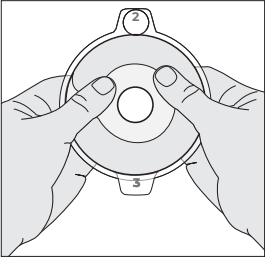


Muotoile ihonsuojalevy rullaamalla avanteesi kokoiseksi. **Älä venytä, vedä tai leikkaa sitä.** Kun levy on sopivan kokoinen, siirry seuraavaan kohtaan.

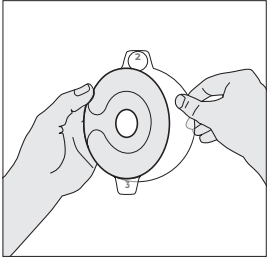

Irrota 2:llä merkitty muovisuoja. Tämä puoli ihonsuojalevystä tulee ihoasi vasten.

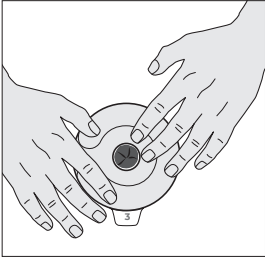


Paina muotoiltu ihonsuojalevy avanteesi ympärille ja rullaa reunoja avannetta kohti, jotta sidos kiinnittyy hyvin ja tiiviisti.

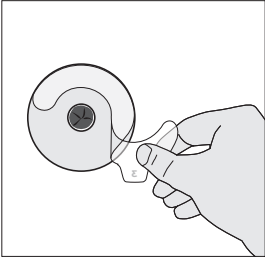


Poista lopuksi 3:lla merkitty muovisuoja.

PUSSIN KINNITTÄMINEN IHONSUOJALEVYYN


Sulje tyhjennettävä pussi ennen pussin kiinnittämistä.

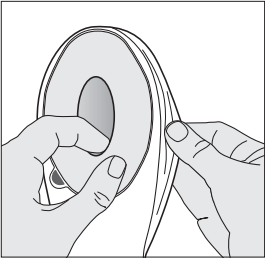

Vedä pussin sivut irti toisistaan, jotta pussiin pääsee hieman ilmaa.



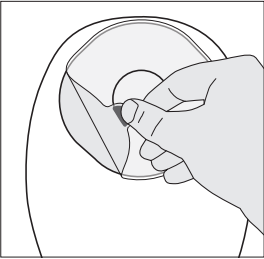


Irrota muovisuoja sinisestä kielekkeestä.

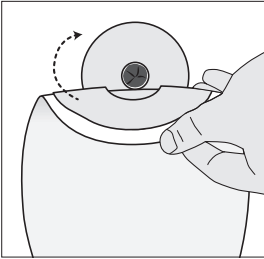

Aseta pussi muotoiltavaan levyyn alhaalta alkaen. Tasoita ja pidä ihonsuojalevyä paikallaan 30 sekuntia. Tarkista aina, että levy ja pussi ovat kiinnittyneet hyvin. Ihonsuojalevyn muistikalvo auttaa sidosta mukautumaan avanteesi ympärille.



TYHJENNETTÄVÄN PUSSIN SULKEMINEN

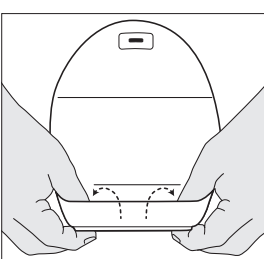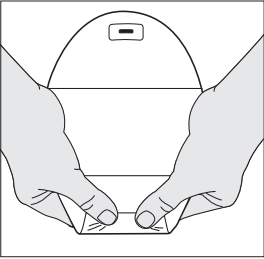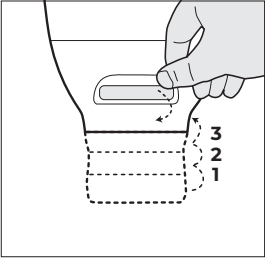

Tarrasulkija: Aloita pussin sulkeminen taivuttamalla alimmaisesta valkoisesta kaistaleesta. Kun olet taivuttanut ne kolme kertaa, sulkijat ovat vastakkain. Paina ja nipistä kunnes tunnet, että ne napsahtavat kunnolla yhteen.


Lock-it-Pocket™: Käännä päällyskangas nurinpäin, jolloin pussinsulkija jää taskuun piiloon.

PUSSIN TYHJENTÄMINEN

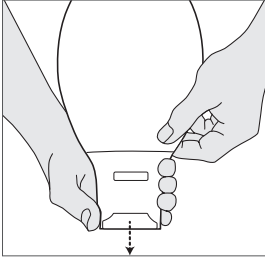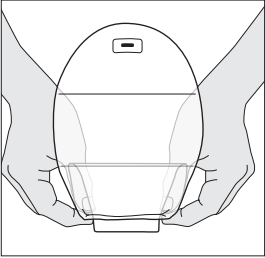


Tarrasulkija: Käännä pussinsulkija näkyville päällyskankaan alta. Pidä tyhjennysosaa ylöspäin, avaa sulkijat varovasti ja käännä pussin suu auki. Vetämällä samaan aikaan ylemmästä pussinsulkijasta pussin suu avautuu paremmin. Paina sormilla tyhjennysliuskojen molemmista päistä ja tyhjennä pussin sisältö.

AVANNESIDOKSEN POISTAMINEN

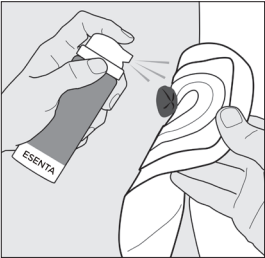

Käytä hellävaraista Esenta™-liima-aineen poistajaa (suihke tai pyyhe) ihonsuojalevyn irrottamiseen.

SUODATIN

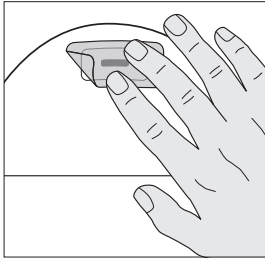

Peitä suodatin suodatintarralla suihkun ja uimisen aikana. Poista tarra sen jälkeen.