

Preparazione del dispositivo



Assicuratevi di avere a disposizione dei guanti e del lubrificante oltre al kit di Flexi-Seal



Utilizzare la siringa contenuta nel kit per aspirare l'eventuale aria presente nel palloncino di ancoraggio. Riempire la siringa con 45ml di acqua o soluzione salina. Collegare la siringa all'opposito connettore per il riempimento del palloncino di ancoraggio



Fissare la sacca di raccolta all'oggancio presente all'estremità finale del catetere




Posizionare il paziente sul fianco sinistro. Nel caso non fosse possibile, sistemare il paziente in modo da facilitare l'accesso al retto. Eseguire una esplorazione rettale per valutare la presenza di eventuali occlusioni fecali. In caso di riscontro positivo, le procedure per la rimozione dell'occlusione e l'applicazione di Flexi-Seal sono a discrezione del personale sanitario


Applicazione del dispositivo




Stendere la cannula di silicone lungo il letto posizionando la sacca di raccolta in direzione dei piedi. Lubrificare l'indice ed inserirlo nella tasca digitale posizionata sotto il palloncino di ancoraggio in modo da guidare con il dito stesso il posizionamento del dispositivo. La tasca digitale si trova in corrispondenza del tubicino per l'irrigazione

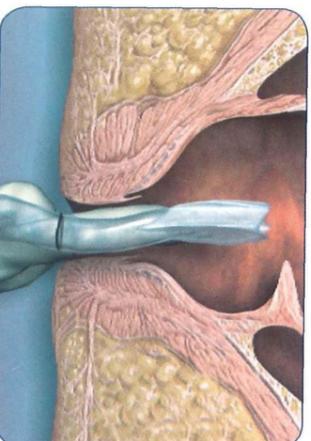

Inserire delicatamente il palloncino di ancoraggio attraverso lo sfintere sino a posizionarlo all'interno dell'ampolla rettale

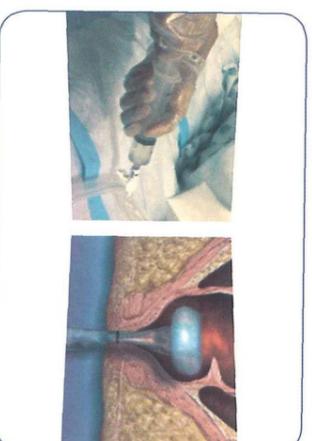


Facendo una leggera pressione sulla siringa, riempire lentamente il palloncino di ancoraggio con 45 ml di acqua o soluzione salina

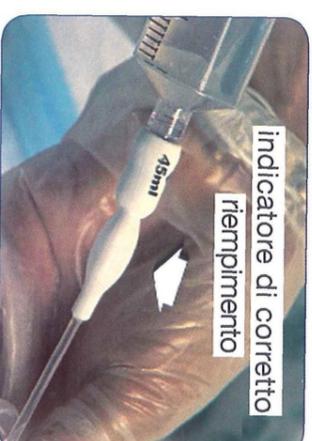

Indicatore di corretto riempimento


Sul connettore per il riempimento si trova un rigonfiamento ovale, che serve da indicatore di corretto riempimento, espandendosi man mano che il fluido viene iniettato. Questo normale espansione dovrebbe diminuire al termine dell'iniezione. Se l'indicatore rimane eccessivamente rigonfio, il palloncino non si è riempito correttamente. Questo probabilmente risulta da un errato posizionamento del palloncino nell'ampolla rettale. In questo caso, usare la siringa per aspirare il liquido del palloncino, procedere al riposizionamento nell'ampolla rettale e riempire nuovamente il palloncino di ancoraggio

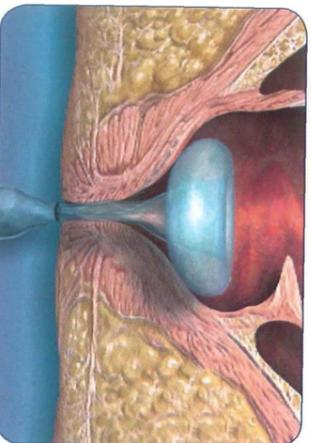

Rimuovere la siringa dall'opposita connessione ed effettuare una leggera trazione del catetere in silicone per verificare che il palloncino sia ben ancorato nel retto e sia posizionato sul piano rettale



Stendere la cannula in silicone tra le gambe del paziente facendo attenzione ad evitare pieghe ed ostruzioni

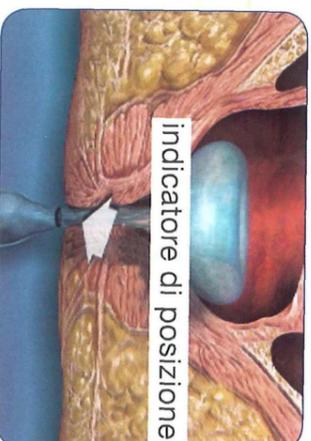

Indicatore di posizione

Prendere nota della distanza dell'indicatore di posizione rispetto all'ano del paziente in modo da poter verificare eventuali spostamenti del palloncino di ancoraggio dalla sede ottimale. Eventuali spostamenti del marker potrebbero indicare la necessità di ripetere la procedura di posizionamento del palloncino o del dispositivo




Utilizzare l'opposita cinghia in velcro per fissare la sacca di raccolta al letto


Gestione e Rimozione del dispositivo



Nel caso in cui la presenza di residui fecali ostruisca la cannula in silicone, è possibile eseguire il lavaggio del dispositivo riempiendo la siringa con acqua, ed iniettandola attraverso il apposito tubicino per l'irrigazione

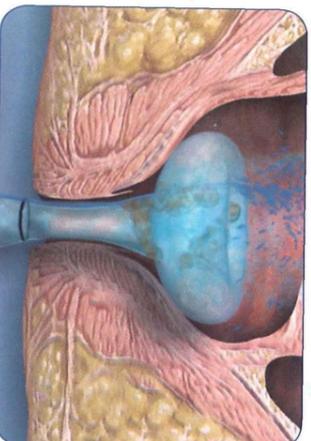


Ripetere la procedura secondo le necessità per mantenere il corretto funzionamento del dispositivo. Irrigare il dispositivo come descritto rappresentando una procedura opzionale da usare solo quando necessario a garantire il libero deflusso delle feci nella sacca di raccolta. Se irrigazioni ripetute non sono sufficienti a far defluire le feci, controllare il dispositivo per verificare l'eventuale presenza di impedimenti esterni (es. pressione di parti del corpo o altra apparecchiatura). Se non viene individuata alcuna fonte di ostruzione, l'uso del dispositivo dovrebbe essere interrotto

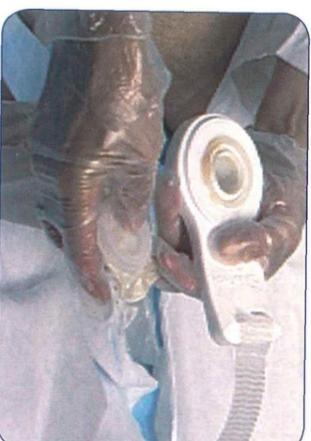

Cambiare la sacca di raccolta secondo le necessità. Chiudere le sacche usate con l'opposito tappo ed eliminarle attendosi ai protocolli per lo smaltimento dei rifiuti medici.

Controllare il dispositivo frequentemente per verificare eventuali ostruzioni da feci solide o pressione esterna

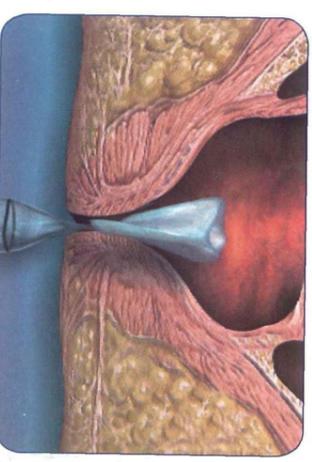

Per rimuovere il catetere dal retto, svuotare il palloncino di ancoraggio, collegare la siringa al connettore per il riempimento, e lentamente rimuovere tutta l'acqua presente all'interno del palloncino.

Succare la siringa e gettarla. Affermare il catetere il più vicino possibile al paziente e farlo scivolare dolcemente fuori dall'ano