

TILLBEHÖR

Tillbehör för dagligt bruk



HÄFTBORTTAGNING



Esenta™

- silikonbaserad häftborttagning

För enkel borttagning, utan hudstrippning eller skada.



HUDSKYDD



Esenta™

- silikonbaserad hudbarriär

Skyddar huden upp till 72 timmar.¹



LUKTKONTROLL



Diamonds™

- gelbildande portionspåsar

med luktkontroll

Får flytande innehåll fast och minskar eller eliminerar gasbildning och lukt.

Referens: 1. Voegeli D, LBF® "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS PÅ 0800 179 797

©2022 Convatec Inc. ®/™. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. AP-56739-FIN-SWE-V1)

www.convatec.fi

Convatec Oy • Kägelstranden 16 • 02150 Esbo • Tel. 0800 179 797



0800 179 797

Kontakta oss:




APPLICERINGSGUIDE


ESTEEM™+
Endelsbandage

CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGY™


FORMBARA ENDELSBANDAGET

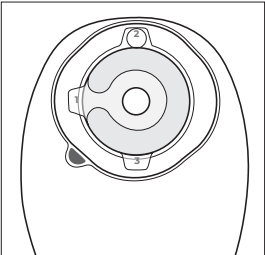


Formbar hudskyddsplatta

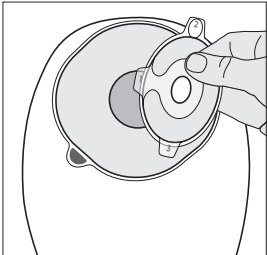


Lossa den formbara plattan från påsen.

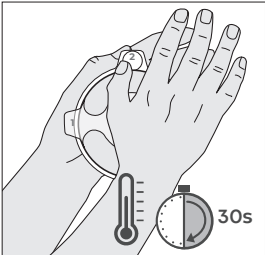


Värm den formbara hudskyddsplattan mellan händerna i 30 sekunder.

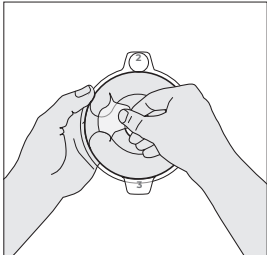


Fatta tag i fliken märkt "1" och dra bort den.

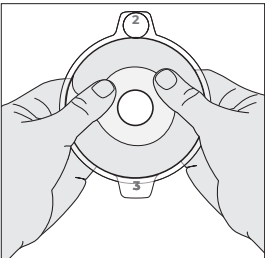


Forma öppningen så att den passar din stomi genom att rulla tillbaka hålets kanter. **Du ska inte sträcka, dra eller klippa för att göra hålet större.** Bara rulla.

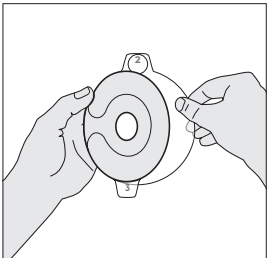

Fatta tag i fliken märkt "2" och dra bort skyddsfilmen så att plattan kan fästas på huden.

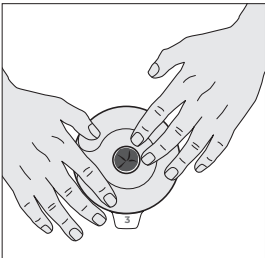


Fäst den formbara plattan på huden. Pressa fast plattan hela vägen runt och forma den mot stomin.

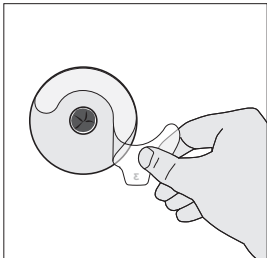


Fatta tag i fliken märkt "3" och ta bort den delen av skyddsfilmen.

FÄST PÅSEN PÅ PLATTAN


Stäng den tömbara påsen innan du applicerar den.

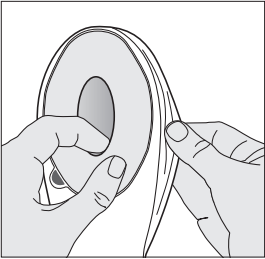

Dra isär sidorna på påsen för att släppa in lite luft.



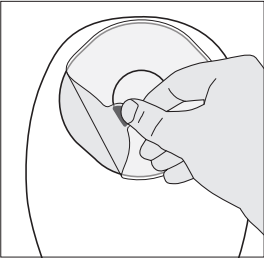


Tag bort skyddsfilmen från plattan på påsen.

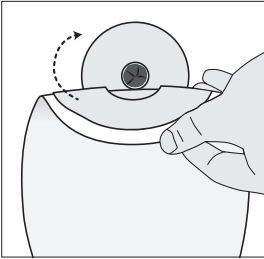



Fäst påsen på plattan och huden. Det kan vara lättare att se hur påsen skall placeras om man viker påsen på mitten av påsens hudskyddsplatta. Massera fast hudskyddet i 30 sekunder så att det skapas en bra vidhäftning.

STÄNGA TÖMBARA PÅSEN

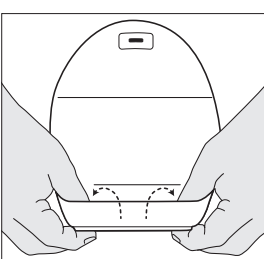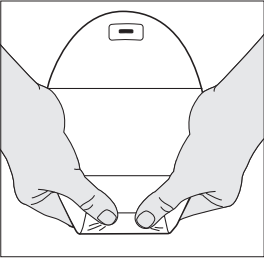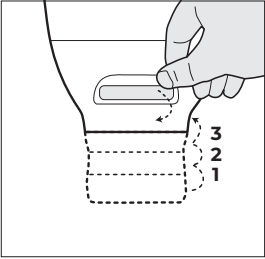


Stänga: Vik änden uppåt mot dig tills förslutningarna är riktade mot varandra. Tryck och kläm till över hela förslutningen for att sakra den. **Vänd påslåset Lock-it-Pocket™** ut och in för att stoppa in änden inuti.

TÖMNING

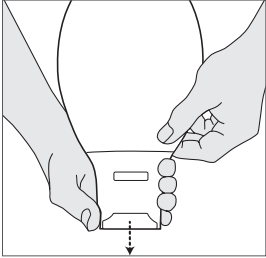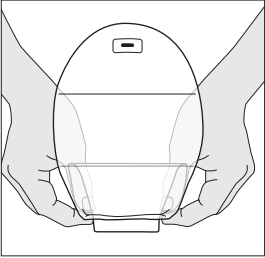


För att tömma påsen viker du änden uppåt mot kroppen. Dra för att öppna förseglingen och veckla ut änden. Öppna påslåset och öppna änden genom att trycka in båda ändarna vid utloppet med fingrarna. Töm påsen.

TA BORT PÅSEN

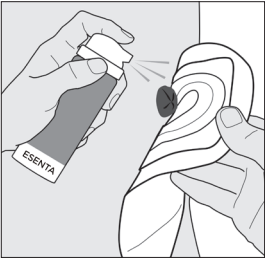

Använd Esenta™ för snabb och enkel borttagning av medicinska lim.

FILTER

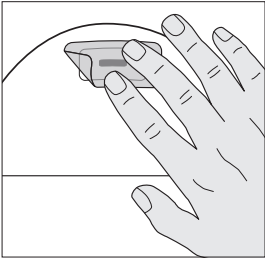

Vid bad/dusch skyddas filtret på påsens utsida av medföljande klisterlapp.