



# ESENTA™ – SPRAY ZUR REIZFREIEN PFLASTERENTFERNUNG

EINFACH IN DER ANWENDUNG: BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDEN SCHRITTE

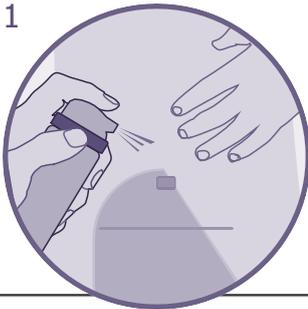


## DER EINSTIEG

Sprühen Sie um den Rand der Klebefläche herum und warten Sie einige Sekunden. Das Spray lässt sich in jedem Winkel aufsprühen.

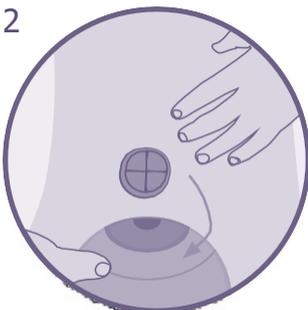

## EINFACHE ENTFERNUNG

Ziehen Sie die Klebefläche vorsichtig von der Haut ab und verwenden Sie bei Bedarf zusätzliches ESENTA™-Spray zur Pflasterentfernung, um das Abziehen zu erleichtern.

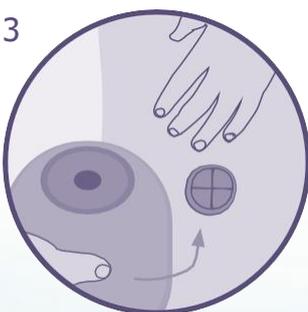


## TROCKNET IN SEKUNDEN

Die Anhaftung anderer Verbände oder Pflaster wird nach dem Trocknen des ESENTA™-Sprays zur reizfreien Pflasterentfernung nicht beeinträchtigt.




# ESENTA™ – FEUCHTTÜCHER ZUR REIZFREIEN PFLASTERENTFERNUNG

EINFACH IN DER ANWENDUNG: BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDEN SCHRITTE

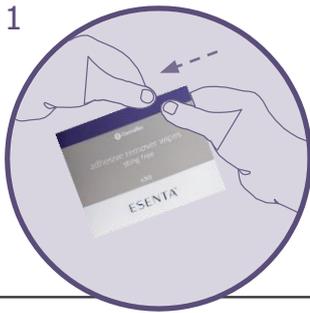


## DER EINSTIEG

Sachet (Schutzverpackung) zum Öffnen aufreißen und Feuchttuch entfalten.

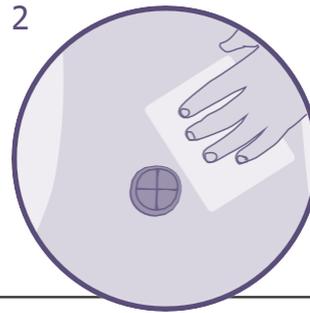

## EINFACHE ENTFERNUNG

Reiben Sie mit dem Feuchttuch über die Klebstoffreste, um sie zu entfernen.

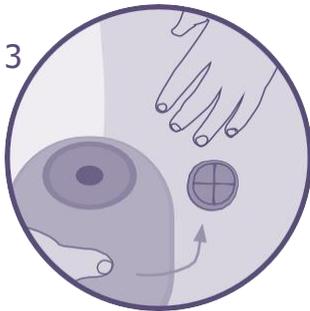

## TROCKNET IN SEKUNDEN

Die Anhaftung anderer Verbände oder Pflaster wird nach dem Trocknen des ESENTA™-Sprays zur reizfreien Pflasterentfernung nicht beeinträchtigt.



Erfahren Sie mehr unter <<Platzhalter lokaler Markt>> oder kontaktieren Sie uns unter <<Platzhalter lokaler Markt>> oder <<Platzhalter lokaler Markt>>.