

TILLBEHÖR

Tillbehör för dagligt bruk



HÄFTBORTTAGNING



Esenta™

- silikonbaserad häftborttagning

För enkel borttagning, utan hudstrippning eller skada.



HUDSKYDD



Esenta™

- silikonbaserad hudbarriär

Skyddar huden upp till 72 timmar.¹



LUKTKONTROLL



Diamonds™

- gelbildande portionspåsar

med luktkontroll

Får flytande innehåll fast och minskar eller eliminerar gasbildning och lukt.

Referens: 1. Voegeli D, LBF® "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS PÅ 0800 179 797

©2022 Convatec Inc. ®/™. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. AP-51417-FIN-SWE-V1

www.convatec.fi

Convatec Oy • Kägelstranden 16 • 02150 Esbo • Tel. 0800 179 797



Kontakta oss:
0800 179 797



convatec
— forever caring —


APPLICERINGSGUIDE

**ESTEEM SYNERGY® &
ESTEEM SYNERGY®+**


Tvådelsbandage

**FÄRDIGSTANSADE HÅL |
UPPKLIPPBAR | KONVEX**


VÄLJ EN LÄMPLIG HUDSKYDDSPLATTA

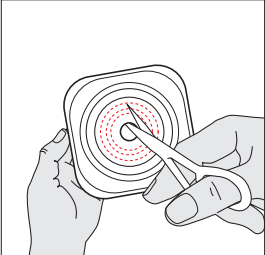


Uppklippbara:
Rita upp stomins diameter på plattan och klipp upp hålet precis utanför den ritade linjen med hjälp av en böjd sax.

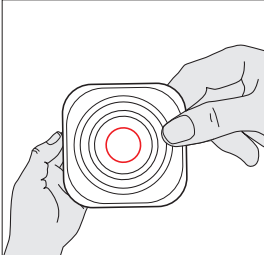

Färdigstansade hål:
Välj en påse med en något större öppning än din stomi.

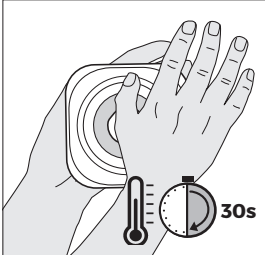


Formbara:
Värm den formbara hudskyddsplattan mellan händerna i 30 sekunder. Rulla och forma hudskyddsplattan för att anpassa den till storleken på stomin. Du får inte tänja, dra eller klippa.

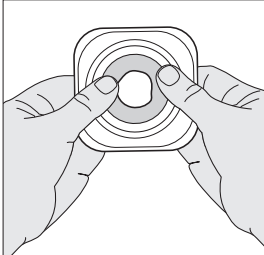


Ta av den genomskinliga skyddsfilmen.


FÄST PÅSEN PÅ PLATTAN

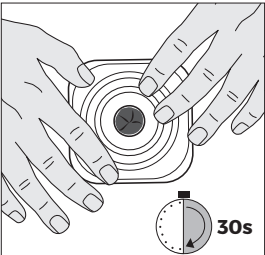


Tryck försiktigt plattan mot huden och släta ut eventuella veck. Håll plattan på plats i 30 sekunder.

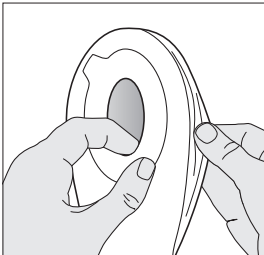


Dra isär sidorna på påsen för att släppa in lite luft

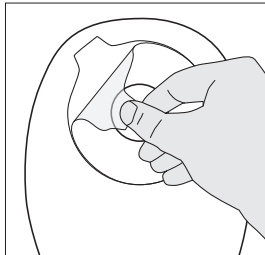

Ta bort skyddspappret från den självhäftande ringen på påsen.

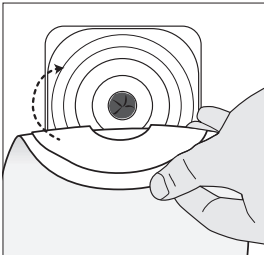


Vik den självhäftande ringen varsamt och applicera den nedre halvan på fästningszonen. Rulla eller dra sedan med fingrarna över den övre delen för att fästa påsen.

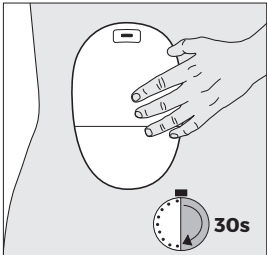



Håll påsen på plats i 30 sekunder. **Dubbelkolla alltid att kopplingen är helt stängd - om inte, får du upprepa stegen.**

STÄNGA PÅSEN

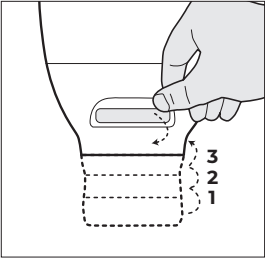


1. Vik den nedre delen uppåt.
2. Vik den övre delen uppåt.
3. Tryck ihop kanten.

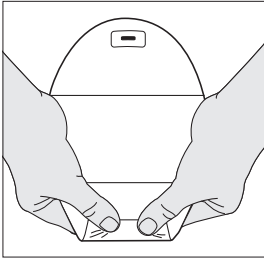


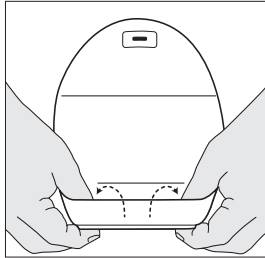


Stänga: Vik änden uppåt mot dig tills förslutningarna är riktade mot varandra. Tryck och kläm till över hela förslutningen för att säkra den.
Vänd påslåset Lock-it Pocket™ ut och in för att stoppa in änden inuti.

TÖMMA PÅSEN

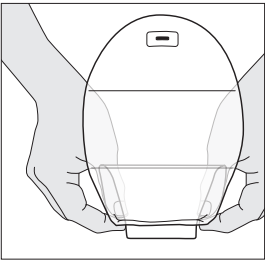


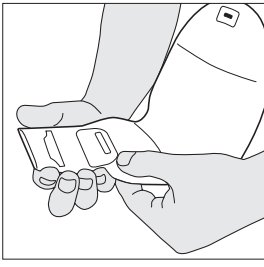

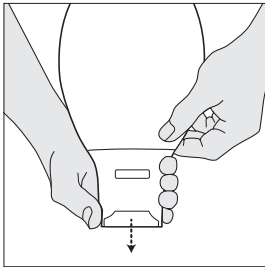


Tömning:
För att tömma påsen viker du änden uppåt mot kroppen. Dra för att öppna förseglingen och veckla ut änden. **Lock-it Pocket:** Öppna påslåset och öppna änden genom att trycka in båda ändarna vid utloppet med fingrarna. Töm påsen.

FILTER

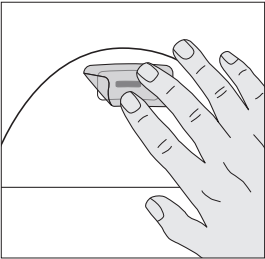

Vid bad/dusch skyddas filtret på påsens utsida av medföljande klisterlapp.

TA BORT PÅSEN

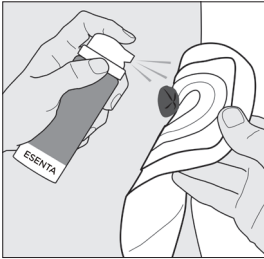

Använd Esenta™ för snabb och enkel borttagning av medicinska lim.