

So wechseln Sie Ihren **ConvaMax™** **Superabsorber** Wundverband zu Hause

Warum muss ich meinen Wundverband wechseln?

Ein Wundverband ist dafür ausgelegt, einen Bereich abzudecken und zu schützen, um die Wunde sauber zu halten. Der Wundverband fungiert als Barriere, um die Menge an Bakterien zu verringern, die in die Wunde gelangen und die zu einer Infektion führen können.

Wann muss ich meinen Wundverband wechseln?

Sie sollten Ihren Wundverband nach den Vorgaben Ihres Arztes und Ihrer medizinischen Fachkraft wechseln oder wenn Ihr Wundverband beginnt durchzunässen.

Diese Hinweise zeigen Ihnen, wie Sie den **ConvaMax™ Superabsorber** richtig anwenden.



Es ist wichtig, dass die Wunde immer mit einem Wundverband bedeckt ist, um das Risiko einer Infektion zu verringern.



Was ist der **ConvaMax™ Superabsorber** Wundverband?

ConvaMax™ Superabsorber ist ein sehr stark aufsaugender Wundverband, der große Mengen an Wundflüssigkeit aufnehmen und Ihre Wunde sauber halten kann. Er schützt die umliegende Haut vor Feuchtigkeit und unterstützt den Heilungsprozess.

Vor dem Verbandwechsel

1. Handhygiene



Waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife.
Danach gründlich mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.

2. Legen Sie die benötigte Ausrüstung bereit.



Saubere Einmalhandschuhe, 3 Paar



Spiegel zum Betrachten der Wunde (bei Bedarf)




Pflasterlöser (bei Bedarf)



Einweg-Müllbeutel für benutzte Wundverbände



Wundspüllösung und sterile Kompressen

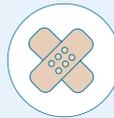

Wundverband



Feuchtigkeitshautpflege (nach Bedarf)



Klebeband und saubere Schere

3. Vorherigen Wundverband entfernen und entsorgen




Entfernen Sie den Wundverband mit sauberen Handschuhen und entsorgen Sie ihn in einem Plastikbeutel.
Danach Handschuhe entsorgen.

Verbandanlage




1 Hände waschen / Handschuhe

Waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie gründlich mit einem sauberen Handtuch ab. Legen Sie dann saubere Handschuhe an.

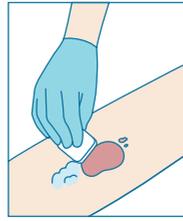


2 Wunde reinigen

Reinigen Sie Ihre Wunde von innen nach außen mit einer sterilen Kompresse und einer Wundspüllösung, die Ihnen von Ihrem Arzt oder medizinischer Fachkraft empfohlen wurde.

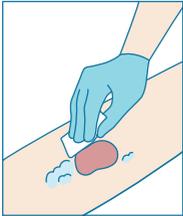

3 Haut abtrocknen



Achten Sie darauf, dass die Haut an den Wundrändern sauber und trocken ist. Bitte die Wundumgebung nicht tupfen, sondern wischen. Dabei pro Wischvorgang eine neue sterile Kompresse verwenden. Danach Handschuhe entsorgen.

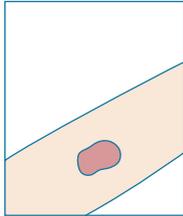

4 Hände waschen / Handschuhe wechseln



5 Wundverband öffnen

Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung mit dem **ConvaMax™ Superabsorber** Wundverband und versuchen Sie, diesen so wenig wie möglich zu berühren.

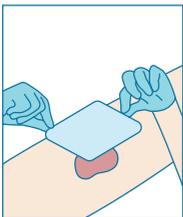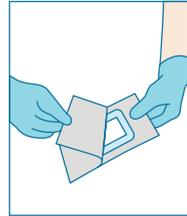


6 Wundverband anlegen

Legen Sie den **ConvaMax™ Superabsorber** Wundverband direkt auf die Wunde oder als Abdeckverband (Sekundärverband) an. Die weiße Seite zeigt dabei zur Wunde, die blaue Seite nach oben.

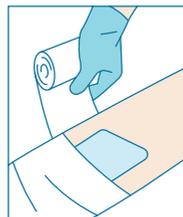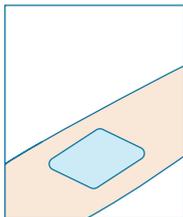

7 Wundverband fixieren und sichern

Legen Sie einen fixierenden Schutzverband an, um den **ConvaMax™ Superabsorber** Wundverband auf der Wunde zu befestigen. Bitte folgen Sie bei der Auswahl der Fixierung der Anweisung Ihres Arztes oder medizinischen Fachkraft.

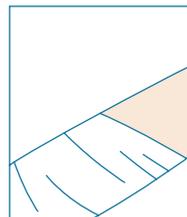



Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie folgende Symptome beobachten:

- Neue oder sich vergrößemde Wunde
- Neue oder sich ausbreitende Rötung oder Schwellung der wundumgebenden Haut
- Neue oder stärkere Schmerzen
- Neuer oder stärkerer Geruch nach dem Reinigen der Wunde
- Mehr Wundexsudat (Flüssigkeit, die aus der Wunde austritt) als bisher

Weitere Hinweise zu Einsatzgebieten und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte den Anwendungshinweisen auf dem Beipackzettel.

Mit den nachfolgenden PZN-Nummern stellen Sie sicher, dass Sie den Original-Wundverband von ConvaTec erhalten haben.

ConvaMax™
SUPERABSORBER



Vorsichtsmaßnahmen

- Kein Wundverband darf länger als 7 Tage auf der Wunde verbleiben, ohne gewechselt zu werden.
- Schneiden Sie den Wundverband nicht zurecht.
- Nicht verwenden, wenn die Einzelverpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Bei Raumtemperatur und trocken lagern.

Größe (Wundkissen)	Packungs- inhalt	Original- PZN	REF
adhäsiv (sanft haftend)			
7,5 x 7,5 (5 x 5) cm	10 Stück	156 344 20	422 575
10 x 10 (7,5 x 7,5) cm	10 Stück	156 344 37	422 576
10 x 20 (7,5 x 17) cm	10 Stück	156 344 66	422 577
15 x 15 (12 x 12) cm	10 Stück	156 344 89	422 579
15 x 20 (12 x 17) cm	10 Stück	156 344 95	422 580
20 x 20 (17 x 17) cm	10 Stück	156 345 03	422 581
nicht-adhäsiv (nicht haftend)			
7,5 x 7,5 (5 x 5) cm	10 Stück	156 343 25	422 566
10 x 10 (7,5 x 7,5) cm	10 Stück	156 343 31	422 567
10 x 20 (7,5 x 17) cm	10 Stück	156 343 48	422 568
15 x 15 (12 x 12) cm	10 Stück	156 343 60	422 570
15 x 20 (12 x 17) cm	10 Stück	156 343 77	422 571
20 x 20 (17 x 17) cm	10 Stück	156 343 83	422 572
20 x 40 (17 x 37) cm	10 Stück	156 344 14	422 574

Weitere Informationen

Diese Broschüre wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen Ihren Wundverband sicher und korrekt anzulegen und zu entfernen. Wenn Sie weiteren Rat zur Anwendung benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihre medizinische Fachkraft.

Zusätzliche Informationen zu ConvaTec Wundverbänden finden Sie auf unseren Internetseiten:

www.convatec.de/wundversorgung

