

> destaque pelo picotado e assinale os produtos que deve utilizar

Ileostomia



800-20-1678
chamada gratuita

Ileostomia



800-20-1678
chamada gratuita

Ileostomia



800-20-1678
chamada gratuita

Ileostomia



800-20-1678
chamada gratuita



Contacte-nos gratuitamente através da Linha Verde 800-20-1678
Av. da Liberdade, 144 -7º Dº • 1250-146 Lisboa • email: convatel.pt@convatec.com

@/™ são marcas de ConvaTec Inc.

© 2020 ConvaTec Inc.

AP-016268-PT

FEVEREIRO 2020



Um mundo de soluções para **Ileostomia**



> destaque pelo picotado e assinale os produtos que deve utilizar

Ficha de Prescrição



| Código CNP | Designação do Produto | Diâmetro Ø mm | Quantidade (nº caixas) |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |

Ficha de Prescrição



| Código CNP | Designação do Produto | Diâmetro Ø mm | Quantidade (nº caixas) |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |

Ficha de Prescrição



| Código CNP | Designação do Produto | Diâmetro Ø mm | Quantidade (nº caixas) |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |

Ficha de Prescrição



| Código CNP | Designação do Produto | Diâmetro Ø mm | Quantidade (nº caixas) |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |
| □ □ □ □ □ □ □ □ | | □ □ □ □ | □ □ |

Índice

| | |
|---|-------------------|
| Introdução | 2 |
| O que é uma Ostomia? | 3 |
| Ileostomia | 4 |
| Vida Social e Familiar | 5 |
| O cuidar da pele periestomal | 6 |
| Tipos de dispositivos | 8 |
| Aplicação dos dispositivos | 10 |
| Alimentação | 17 |
| Informações de Interesse | 19 |
| A quem pode recorrer em caso de dúvida | 21 |
| Anotações pessoais | 22 |
| Anotações do profissional | 23 |
| Gama de Dispositivos para Ileostomia | 24 |
| Fichas de Prescrição de Dispositivo | contracapa |



Introdução

É com o maior prazer que lhe oferecemos este livro, para o ajudar a esclarecer algumas dúvidas, bem como informá-lo sobre esta nova fase da sua vida.

E, porque tentamos compreendê-lo, saiba que pode sempre contar com muitas pessoas que estão dispostas a ajudá-lo, desde o seu médico à sua enfermeira, acabando em nós – ConvaTec®, onde existe à sua inteira disposição um serviço de informação profissional, para responder a qualquer dúvida relacionada com a sua ostomia, bem como orientá-lo na utilização e aquisição do seu material. Por isso, se tiver algo que queira perguntar, não hesite! Pergunte.

O que é uma Ileostomia?

O aparelho digestivo tem um papel muito importante na absorção de nutrientes, assim como na sua posterior eliminação. Os elementos que não são úteis ao organismo, transformam-se em fezes. Por distintas razões, algumas pessoas necessitam de ser operadas para desviar as fezes da sua saída habitual, o ânus, e construir um novo caminho para o exterior.

Este tipo de operação chama-se ostomia e realiza-se criando um estoma na parede abdominal. O estoma constrói-se com uma porção de intestino e é através deste que as fezes saem. Por esta razão, as pessoas ileostomizadas necessitam de utilizar um saco para a recolha de fezes.




Ileostomia

Numa ileostomia, o orifício (estoma) situa-se ao nível do intestino delgado (a cuja parte final se dá o nome de íleon), sendo suprimido o intestino grosso na sua totalidade. O estoma localiza-se no lado direito do abdómen.

A ileostomia produz fezes líquidas a pastosas e, geralmente, os gases e cheiros resultantes do processo digestivo são reduzidos.

Ileostomia

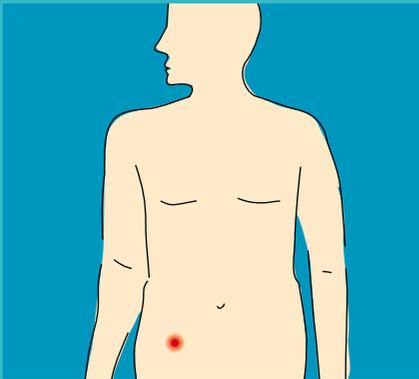

Fezes líquidas a pastosas




Vida Social e Familiar

Depois de um período de adaptação, poderá realizar a maioria das actividades que realizava antes de ser operado, como trabalhar, ir ao café, ir a uma festa, viajar, nadar, ir à praia, andar de bicicleta, ou simplesmente passear ao ar livre, se essa for a opção que melhor se adapte ao seu estilo de vida. Verá que, com o passar do tempo, voltará a sentir-se plenamente seguro e confiante.

O seu médico, a sua enfermeira, e a sua família dar-lhe-ão todo o apoio necessário durante este período de adaptação. Quem melhor do que eles para o ajudar no seu regresso ao dia-a-dia normal? Por esta razão, é muito importante que exista uma relação de diálogo e confiança com eles, de forma a que possa falar livremente sobre a sua situação.

O cuidar da pele periestomal

A pele periestomal (e o próprio estoma) é especialmente sensível e por isso é importante cuidá-la bem. Uma pele periestomal em bom estado é fundamental para o seu bem-estar. O seu estoma não deve ser um entrave à sua higiene, devendo por isso, cuidar da sua higiene pessoal como o fazia antes de ser operado. Pode tomar banho de imersão ou duche, com ou sem o saco colocado, segundo a sua preferência. Se optar por tomar banho com o saco, não se preocupe, pois este não descola e secará rapidamente com a ajuda de uma toalha (lembre-se de proteger o filtro com o autocolante, de forma a evitar que o mesmo se molhe e perca a sua eficácia).

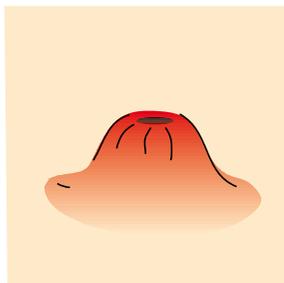


Prevenir os problemas de pele é bem mais fácil do que tratá-los. Evite que a sua pele sofra. É muito importante saber fazer a higiene do seu estoma. Para tal, tenha em consideração os seguintes pontos:

- Lave suavemente a pele periestomal e o estoma, com a ajuda de uma esponja suave, com água morna e sabão com pH neutro.



- Seque bem o estoma e a pele periestomal, sem friccionar, e mantenha a pele que está debaixo do saco, limpa e seca.

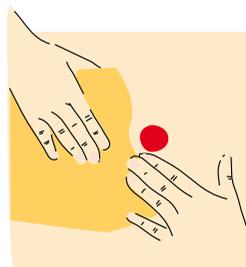

- Não use substâncias irritantes para a pele à volta do estoma, como por exemplo: perfume, álcool, éter, antissépticos ou sabões agressivos.

- Se os pêlos em redor do estoma são abundantes, corte-os com uma tesoura (não utilize gilete ou creme depilatório).

- Não utilize qualquer tipo de creme gordo, pois pode impedir a boa aderência dos dispositivos.



- Utilize um sistema de ostomia (saco) que lhe proporcione a segurança de ter uma pele bem cuidada. Por isso, utilize produtos que sejam capazes de proteger a pele.

Contacte a sua enfermeira ou médico, se o seu estoma apresentar qualquer alteração, se tiver diarreia persistente, ou se a sua ileostomia não funcionar durante alguns dias.

Tipos de dispositivos


Os dispositivos são hoje concebidos especialmente para que não tenha qualquer tipo de preocupações relativamente à sua segurança, discrição e conforto.

O material protector cutâneo – Stomahesive® – que fixa o dispositivo ao seu corpo, é feito à base de substâncias que, para além de permitirem que a sua pele permaneça em bom estado, lhe oferecem uma óptima aderência.


Por outro lado, o material de que são feitos os sacos é perfeitamente estanque, flexível, macio e constitui uma barreira perfeita contra os cheiros. Para reforçar a sua eficácia na eliminação dos odores, têm incorporado um filtro de carvão activado. Ninguém, a não ser você, saberá que usa um saco.

Devido à consistência das fezes, e à facilidade que estas têm em provocar irritações na pele em redor do estoma, é importante ter uma higiene cuidada e utilizar um saco aberto (drenável), para facilmente poder drenar o seu conteúdo para uma sanita.


Tem à sua disposição três tipos de dispositivos para Ileostomia:

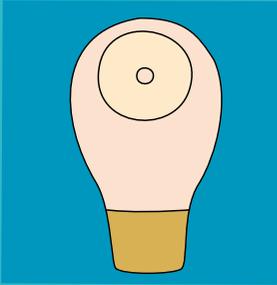

Sistema de Uma Peça – neste tipo de dispositivo, o saco é auto-aderente e tem uma base de protector cutâneo – Stomahesive® – que permite uma perfeita aderência à pele. Assim, quando se muda o saco, o sistema é removido como um todo.

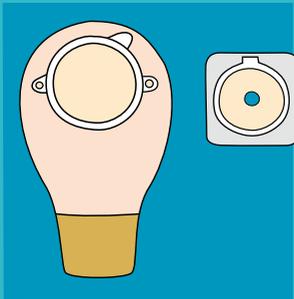

Sistema de Duas Peças – este sistema, tal como o nome indica, é constituído por dois componentes: o saco e o penso protector cutâneo. Assim, pode mudar-se o saco sempre que for necessário, sem descolar o penso protector cutâneo durante alguns dias (2-3 dias).

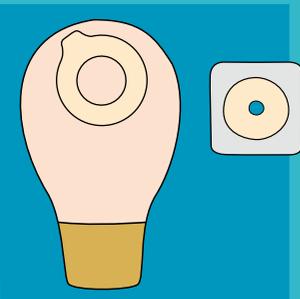

Sistema com Tecnologia de Fixação Adesiva – ACT* – trata-se de um sistema para ostomias com uma nova tecnologia, que permite reunir todas as vantagens dos sistemas acima descritos.

É constituído por um penso protector cutâneo e por um saco, mas não apresenta qualquer aro ou anel plástico.


As suas principais características são a simplicidade, a segurança, a protecção cutânea, a comodidade e a discrição.

*Adhesive Coupling Technology

Aplicação dos dispositivos


Como aplicar o Sistema de Uma Peça

- 1.** Fazer, de um modo suave, a higiene normal do seu estoma.
- 2.** Medir o diâmetro do estoma, com a ajuda de um medidor de estomas.
- 3.** Tratando-se de um saco recortável, deve desenhar a forma do estoma sobre o papel de protecção, recortando-o depois com uma tesoura de extremidades curvas.
- 4.** No caso de a pele periestomal apresentar uma superfície irregular, ou com pregas ou cicatrizes, aplique Stomahesive® pasta para alisar as imperfeições e assim conseguir aplicar perfeitamente o saco.
- 5.** Destacar o papel protector e aplicar o saco de baixo para cima, ao longo da pele periestomal.

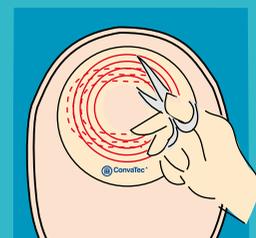




6. Com a ajuda do calor das mãos, adaptar correctamente a parte adesiva – protector cutâneo – ao estoma.

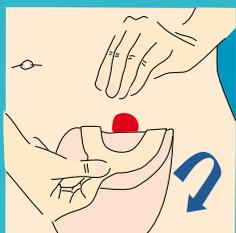

7. Para retirar o saco, faça-o de cima para baixo com as duas mãos, em que uma segura o protector e a outra apoia a pele a fim de evitar irritações.



8. Quando retirar o saco deve limpar novamente a pele, como já foi explicado anteriormente.

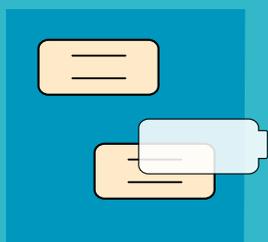

Esteem® Plus proporciona um novo filtro, que apresenta uma boa eficácia na eliminação dos odores, permitindo a saída de gases, evitando obstruções, e prolongando o tempo de utilização do saco.


4 Passos simples para comodidade

1. Segurando nas tiras flexíveis brancas, dobre a extremidade do saco três vezes para cima, até que as duas tiras de velcro se unam.

2. Pressione as tiras de velcro a toda a largura do saco, até estas estarem bem unidas.

3. Coloque os seus dedos polegares no bolso de segurança, e segure o fecho do saco entre os dedos polegares e os dedos indicadores.

4. Dê a volta ao bolso de segurança, para esconder o fecho do saco dentro do bolso do painel de conforto.

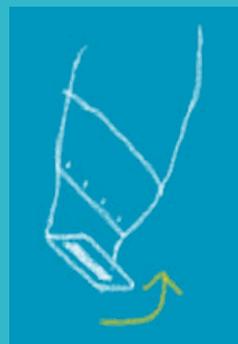

Como utilizar o Sistema de Duas Peças

1. Fazer, de um modo suave, a higiene normal do seu estoma.

2. Meça o diâmetro do estoma, com a ajuda de um medidor de estomas, e desenhe-o no papel protector do penso.

3. Recorte o orifício central até ao diâmetro desejado.

4. No caso de a pele periestomal apresentar uma superfície irregular, ou com pregas ou cicatrizes, aplique Stomahesive® Pasta para alisar as imperfeições e assim conseguir aplicar perfeitamente o penso protector cutâneo.

5. Retirar o papel protector e aplicar o penso sobre o estoma, com a ajuda do calor das mãos, para adaptar correctamente a parte adesiva – protector cutâneo – ao estoma.




6. Em caso de necessidade, aplique Stomahesive® Pasta sobre a pele periostomal no interior do aro, para obter maior protecção cutânea e segurança na fixação do penso.




7. Encaixe o saco no penso, exercendo pressão nos aros e assegurando-se de que fica bem preso. Para retirar o saco, e no caso de estar a utilizar o sistema ConSecura®, basta pressionar para a direita ou esquerda, a patilha de segurança do fecho automático e removê-lo, sem necessidade de fazer força. Caso esteja a utilizar o sistema Natura®, deve segurar na placa com uma mão, e com a outra retirar o saco.

8. Com o sistema ConSecura®, sempre que seja necessário, pode orientar ou mudar a posição do saco, fazendo-o girar sem ter de o separar do aro, como por exemplo, quando estiver na cama.

9. O penso pode permanecer na pele vários dias. Será você, melhor do que ninguém, que decidirá quando o deve retirar e substituir por um novo. Ao fazê-lo, descole o penso pela parte superior, usando as duas mãos, em que uma segura o penso e a outra apoia a pele circundante, de forma a que o processo seja o mais delicado possível para a pele.

Quando retirar o penso, deve limpar cuidadosamente a pele, como foi explicado em cima, e aplicar um novo penso e saco.

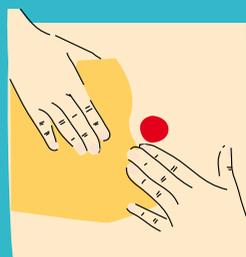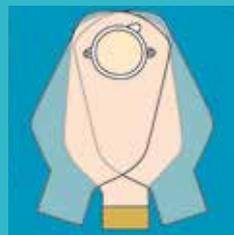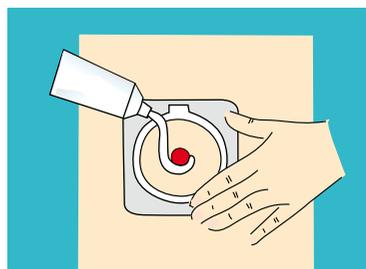

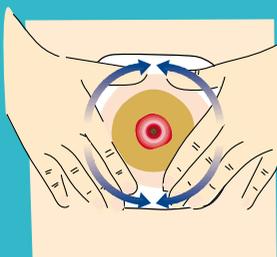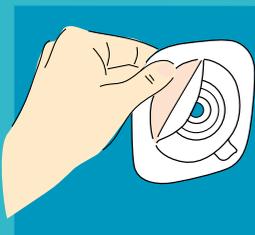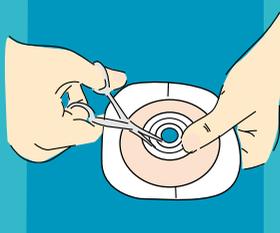

Como utilizar o Sistema de Fixação Adesiva – ACT* – Esteem synergy®

Este sistema combina as vantagens dos sistemas de uma e de duas peças.

- 1.** Fazer, de um modo suave, a higiene normal do seu estoma.
- 2.** Meça o diâmetro à volta do estoma.
- 3.** Recorte o penso pela medida exacta do estoma.
- 4.** Retire o papel de protecção. Verifique se a base de fixação transparente está limpa e seca.
- 5.** Aplique o penso.


*Adhesive Coupling Technology

Nota: Para uma completa informação sobre a utilização dos produtos ConvaTec, deve consultar as instruções de uso dos folhetos internos das embalagens.


6. Retire o papel siliconado do anel adesivo do saco.



7. Segure o saco por fora do anel adesivo e dobre-o. Alinhe o bordo inferior do anel adesivo do saco com a parte inferior da base de fixação transparente do penso.

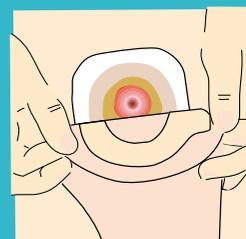


8. Aplique o saco com um movimento de baixo para cima.

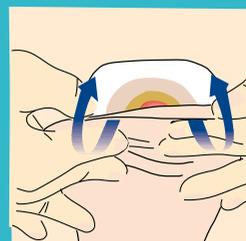

9. Para avaliar se o saco está seguro à base de fixação, deve correr o dedo ao redor do anel adesivo do saco.



10. Para retirar o saco, segure a base de fixação transparente do penso com uma mão, enquanto que com a outra descola o saco, através da aba do anel de fixação.

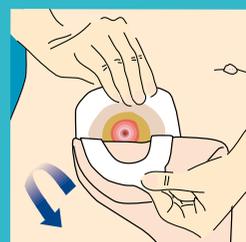

Alimentação

O nosso conselho é: Coma de tudo como dantes! Ou seja, se antes da operação seguia alguma dieta, provavelmente deverá continuar com essa dieta. Se comia tudo sem restrições, o mais certo é que continue assim.

Existem no entanto, algumas regras básicas de alimentação, que ajudam a manter o seu organismo mais saudável, vivendo melhor com a sua ostomia. É aconselhável que vá experimentando um alimento diferente de cada vez, para saber qual o seu efeito. Se se der bem, continue a comê-lo. Se não, é melhor retirá-lo dos seus hábitos alimentares. Assim, em pouco tempo, saberá reconhecer o tipo de alimentos que mais lhe convêm.

É importante recordar que todos nós deveríamos beber 1,5 a 2 litros de água por dia.

É também importante realçar, que a sua alimentação deve incluir alimentos ricos em fibras, como as frutas, verduras e legumes, pois ajudam a regular o trânsito intestinal, contribuindo

para uma regularidade das dejectões, bem como para diminuir a frequência de diarreias ou de “prisão de ventre”.



Damos nesta tabela alguns conselhos importantes para a sua alimentação.

Alimentos que “prendem” o intestino

| | | |
|--------------|-------------|-----------------|
| Arroz | Queijo seco | Batata |
| Frutos secos | Banana | Compota de maçã |

Alimentos que podem provocar diarreia

| | | | |
|---------|----------|----------------|---------|
| Leite | Feijão | Figos | Ameixas |
| Morango | Melancia | Laranja | Kiwi |
| Cerveja | Vegetais | Gorduras cruas | |

Alimentos que provocam mais cheiro nas fezes/gases

| | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| Ovos | Cebola | Queijo | Peixe |
| Espargo | Alho | Café | Couve |

Alimentos que diminuem o cheiro das fezes/gases

| | | | |
|----------|-------|------------|--------|
| logurtes | Salsa | Espinafres | Alface |
|----------|-------|------------|--------|

Alimentos que irritam o estoma

| | |
|--------------------|---------------------|
| Condimentos fortes | Sumo de fruta ácida |
|--------------------|---------------------|

Alimentos que provocam gases

| | | | |
|---------|---------------|------------|-----------|
| Feijão | Ervilhas | Legumes | Cebolas |
| Pão | Bolos | Chocolates | Fermentos |
| Cerveja | Refrigerantes | | |

Aconselhamos que desfrute bem a sua refeição, comendo sem pressas e mastigando bem os alimentos.



Informações de interesse

Comparticipações

Os dispositivos são participados por lei, sendo a percentagem variável de acordo com o sistema de protecção social de cada um.

Benefícios Fiscais

Existe legislação aplicável aos ostomizados, tendo sido estabelecidos benefícios em diversas áreas.

Vestuário

Se quiser pode usar a última moda! Ou se preferir, use o mesmo estilo que usava antes. Os sacos modernos são extremamente discretos. Por isso

descanse, pois não se notará nada. Deve apenas ter a precaução de não colocar cintos, elásticos ou roupas muito apertadas por cima do estoma, para se sentir mais confortável.

Desporto e Tempos-livres

Pode e deve praticar exercício físico! É claro que não lhe dizemos para fazer boxe ou para lançar o dardo. Mas actividades como correr, andar de bicicleta, nadar ou jardinagem, são totalmente recomendáveis. Se decidir praticar um desporto ou uma actividade que exija um grande esforço físico, deverá consultar o seu médico ou enfermeiro estomaterapeuta.

Viagens

Pode viajar à vontade e sempre que o desejar! Quando for viajar, apenas não se esqueça de preparar um pequeno estojo (pequena maleta) que contenha todo o material necessário para cuidar do seu estoma, durante o período em que estiver fora de casa (para se sentir mais seguro leve sempre mais material do que normalmente necessita). Aconselhamos que leve sempre este material na sua bagagem de mão, pois em caso de extravio das malas, estará sempre prevenido.

A quem pode recorrer em caso de dúvida

Relembramos que existem profissionais de saúde à sua disposição, para lhe dar conselhos, e toda a informação que diz respeito aos cuidados com o estoma, e à sua vida depois da operação. Certamente que o seu cirurgião, o seu enfermeiro estomaterapeuta, os enfermeiros que o assistem ou o seu médico de família, dar-lhe-ão toda a ajuda de que necessitar. Existem actualmente associações que defendem os interesses dos ostomizados, e que lhe oferecem a possibilidade de participar em reuniões informativas, bem como apoiá-lo sempre. Pode ainda contar connosco – **ConvaTec®**. Pelo nosso compromisso em melhorar a qualidade de vida do ostomizado, desenvolvemos os melhores produtos para satisfazer as suas necessidades, e oferecemos um **Serviço de Informação Profissional**, para responder a qualquer dúvida relacionada com a sua

ostomia, bem como orientá-lo na utilização e aquisição do seu material. Este serviço conta com uma larga experiência e está ao seu inteiro dispor, através de uma linha telefónica gratuita.

Por isso, se tiver algo que queira perguntar, não hesite em contactar-nos!



800-20-1678
chamada gratuita

e-mail: convatel.pt@convatec.com

Anotações do profissional

Nome do profissional

Data da intervenção

Tipo de intervenção


Outros dados relevantes

Diâmetro do estoma

Produto aconselhado

Data da próxima consulta

Aparelho digestivo

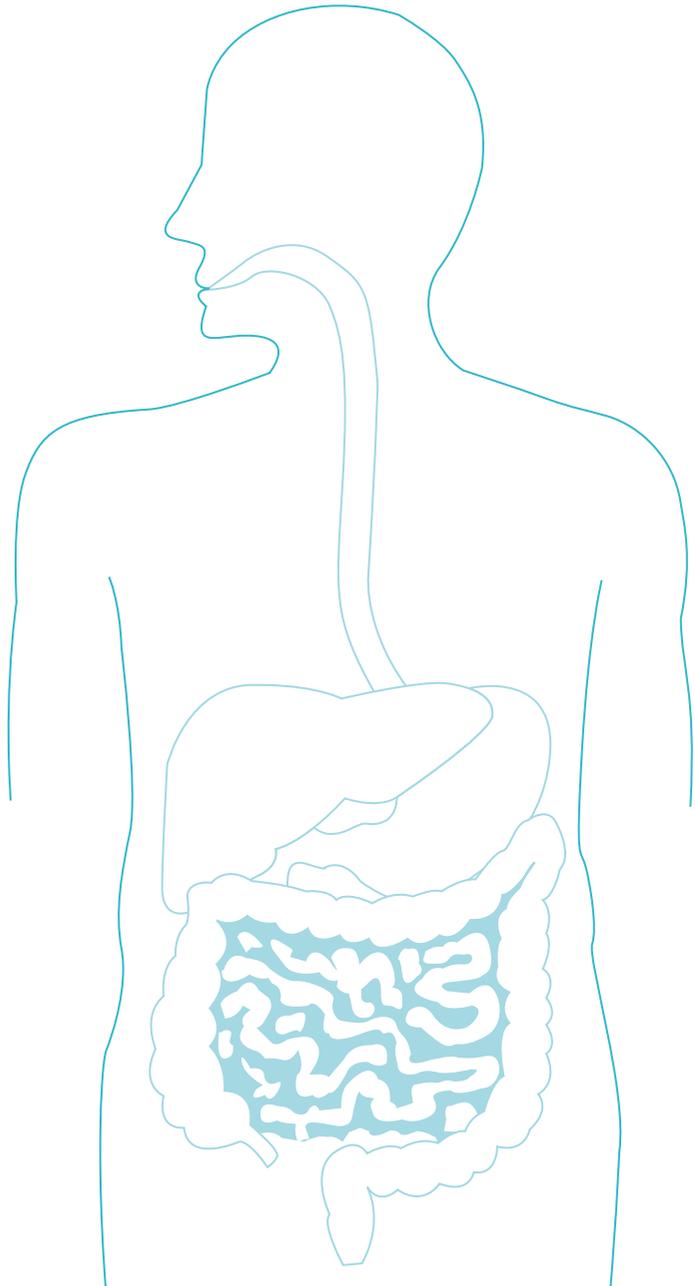

Gama de Dispositivos para Ileostomia

Sistemas de Uma Peça



| PRODUTO | | REF | CNP |
|--|----------------------------|--------|---------|
| ESTEEM®  | | | |
| Standard Transparente Recortável | Rec. de 20/70mm (10 sacos) | 416718 | 6213090 |
| Standard Opaco Recortável | Rec. de 20/70mm (10 sacos) | 416719 | 6213108 |

Sistemas de Duas Peças



| PRODUTO | | REF | CNP |
|----------------------------|-----------------------|--------|---------|
| CONSECURA® AUTOLOCK | | | |
| Saco Opaco Drenável | 45mm (10 sacos+1clip) | 401435 | 7879320 |
| | 57mm (10 sacos+1clip) | 401436 | 7879338 |
| Saco Transparente Denavél | 45mm (10 sacos+1clip) | 401327 | 7893735 |
| | 57mm (10 sacos+1clip) | 401441 | 7879346 |



| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---------|
| Penso Stomahesive® | 45mm (5 pensos) | 404525 | 7893750 |
| | 57mm (5 pensos) | 404526 | 7893768 |
| Penso Flexível | 45mm (5 pensos) | 401430 | 7879247 |
| | 57mm (5 pensos) | 401431 | 7879254 |

Sistemas de Duas Peças

| PRODUTO | | REF | CNP |
|----------------------------|------------------|--------|---------|
| NATURA™ + | | | |
| Saco drenável transparente | 45mm (10 sacos) | 416416 | 6989814 |
| | 57mm (10 sacos) | 416419 | 6989947 |
| | 70mm (10 sacos) | 416422 | 6989954 |
| | 100mm (10 sacos) | 416472 | 6989962 |
| Saco drenável opaco | 38mm (10 sacos) | 416415 | 6989970 |
| | 45mm (10 sacos) | 416417 | 6989988 |
| | 57mm (10 sacos) | 416420 | 6989996 |
| | 70mm (10 sacos) | 416423 | 6990002 |
| <hr/> | | | |
| Penso flexível | 38mm (5 pensos) | 413101 | 6990135 |
| | 45mm (5 pensos) | 413102 | 6990143 |
| | 57mm (5 pensos) | 413103 | 6990150 |
| | 70mm (5 pensos) | 413104 | 6990168 |
| Penso Stomahesive® | 38mm (5 pensos) | 401981 | 6990192 |
| | 45mm (5 pensos) | 401982 | 6990200 |
| | 57mm (5 pensos) | 401983 | 6990218 |
| | 70mm (5 pensos) | 401984 | 6990226 |
| | 100mm (5 pensos) | 401906 | 6990176 |



Sistemas de Duas Peças

| PRODUTO | | REF | CNP |
|--|---|-------------|---------|
| NATURA™ + | | | |
|  Penso moldável flexível | estoma 13mm-22mm saco 45mm (5 pensos) | 411809 | 6990267 |
| | estoma 22mm-33mm/ saco 45mm (5 pensos) | 411811 | 6990275 |
| | estoma 33mm-45mm/ saco 57mm (5 pensos) | 411813 | 6990283 |
| | estoma 45mm-56mm/ saco 70mm (5 pensos) | 411815 | 6990291 |
| Penso moldável convexo | estoma 13mm-22mm/ saco 45mm (5 pensos) | 420233 | 6990234 |
| | estoma 22mm-33mm/ saco 45mm (5 pensos) | 420234 | 6990242 |
| | estoma 33mm-45mm/ saco 57mm (5 pensos) | 420235 | 6990259 |
| Penso Durahesive® convexo | 19/45mm 5 pensos) | 125280 | 6990069 |
| | 22/45mm (5 pensos) | 125281 | 6990077 |
| | 25/45mm (5 pensos) | 125282 | 6990085 |
| | 28/45mm (5 pensos) | 125283 | 6990093 |
| | 32/45mm (5 pensos) | 125284 | 6990101 |
| | 35/45mm (5 pensos) | 125285 | 6990119 |
| NATURA™ ACCORDEON | | NOVO | |
|  Penso Flexível | 45mm (5 pensos) | 421455 | 6506162 |
| | 57mm (5 pensos) | 421459 | 6506170 |
| | 70mm (5 pensos) | 421463 | 6506188 |
| NATURA™ ACCORDEON | | NOVO | |
| Penso Durahesive Convex | 22/45mm (5 pensos) | 421633 | 6505974 |
| | 35/57mm (5 pensos) | 421635 | 6505982 |
| | 48/70mm (5 pensos) | 421637 | 6505990 |
| NATURA™ ACCORDEON | | NOVO | |
| Penso Moldável Flexível | estoma 13mm-22mm saco 57mm (5 pensos) | 421030 | 6506139 |
| | estoma 22mm-33mm/ saco 57mm (5 pensos) | 421031 | 6506147 |
| | estoma 33mm-45mm/ saco 70mm (5 pensos) | 421032 | 6506154 |

Sistemas de Duas Peças

| PRODUTO | | REF | CNP |
|--|---------------------------|--------|---------|
| COMBIHESIVE® II S | | | |
| Saco Drenável | 32mm (10 sacos+ 2 clips) | 400972 | 6745315 |
| Std Opaco | 38mm (10 sacos+ 2 clips) | 400973 | 6745323 |
| | 45mm (10 sacos+ 2 clips) | 400974 | 6745331 |
| | 57mm (10 sacos+ 2 clips) | 400975 | 6745349 |
| | 70mm (10 sacos+ 2 clips) | 400976 | 6745356 |
| Saco Drenável | 45mm (10 sacos+ 2 clips) | 400968 | 6745380 |
| Std Transparente | 57mm (10 sacos+ 2 clips) | 400969 | 6745398 |
| | 70mm (10 sacos+ 2 clips) | 400970 | 6745406 |
| | 100mm (10 sacos+ 2 clips) | 400971 | 6745414 |
| Combihesive IIS Saco Drenável Opaco Peq | 38mm (10 sacos+ 2 clips) | 400979 | 6745422 |
| | 45mm (10 sacos+ 2 clips) | 400980 | 6745430 |
| Combihesive IIS Saco Drenável Pediátrico | 32mm (10 sacos+ 2 clips) | 402566 | 6746123 |
| COMBIHESIVE® II S | | | |
| Penso Plus | 32mm (5 pensos) | 125137 | 6745083 |
| | 38mm (5 pensos) | 125138 | 6745091 |
| | 45mm (5 pensos) | 125139 | 6745109 |
| | 57mm (5 pensos) | 125140 | 6745117 |
| | 70mm (5 pensos) | 125141 | 6745125 |
| | 100mm (5 pensos) | 125163 | 6745133 |
| COMBIHESIVE® II S | | | |
| Penso Flexível | 32mm (5 pensos) | 125132 | 6745141 |
| | 38mm (5 pensos) | 125133 | 6745158 |
| | 45mm (5 pensos) | 125134 | 6745166 |
| | 57mm (5 pensos) | 125135 | 6745174 |
| | 70mm (5 pensos) | 125136 | 6745182 |
| Penso Flexível Pediátrico | 32mm (5 pensos) | 125016 | 6745190 |

Sistemas de Duas Peças

| PRODUTO | | REF | CNP |
|----------------------------|---------------------------|--------|---------|
| COMBIHESIVE® II S | | | |
| Penso "Durahesive Convex" | 19/45mm (5 pensos) | 125028 | 6745208 |
| | 22/45mm (5 pensos) | 125029 | 6745216 |
| | 25/45mm (5 pensos) | 125030 | 6745224 |
| | 28/45mm (5 pensos) | 125031 | 6745232 |
| | 32/45mm (5 pensos) | 125032 | 6745240 |
| | 35/45mm (5 pensos) | 125033 | 6745257 |
| COMBIHESIVE® II S | | | |
| Penso Stomahesive Moldável | 22/33mm - 45mm (5 pensos) | 411827 | 6118885 |
| | 33/45mm - 57mm (5 pensos) | 411829 | 6118893 |
| | 45/56mm - 70mm (5 pensos) | 411831 | 6118901 |

Sistemas c/ Tecnologia de Fixação Adesiva – ACT*

| PRODUTO | | REF | CNP |
|--|------------------|--------|---------|
| ESTEEM synergy® | | | |
| Standard Drenável Opaco - InvisiClose® | 35 mm (10 sacos) | 416796 | 6213132 |
| | 48 mm (10 sacos) | 416799 | 6213157 |
| | 61 mm (10 sacos) | 416902 | 6213173 |
| Standard Drenável Transparente - InvisiClose® | 48 mm (10 sacos) | 416798 | 6213140 |
| | 61 mm (10 sacos) | 416901 | 6213165 |



| | | | |
|--------------------|---------------------|--------|---------|
| Penso Flexível | 13/35 mm (5 pensos) | 409265 | 7919159 |
| | 13/48 mm (5 pensos) | 409266 | 7919167 |
| | 13/61 mm (5 pensos) | 409267 | 7919175 |
| Penso Stomahesive® | 13/35 mm (5 pensos) | 405484 | 7919183 |
| | 13/48 mm (5 pensos) | 405485 | 7919191 |
| | 13/61 mm (5 pensos) | 405486 | 7919209 |



| | | | |
|--|--|--------|---------|
| Penso Convexo Moldável Flexível | ∅ estoma 13/22 = ∅ saco 35 mm (5 pensos) | 409271 | 6118919 |
| | ∅ estoma 22/33 = ∅ saco 48 mm (5 pensos) | 409272 | 6118927 |
| | ∅ estoma 33/45 = ∅ saco 61 mm (5 pensos) | 409273 | 6118935 |



| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------|
| Penso Moldável Flexível | ∅ estoma 13/22 = ∅ saco 48 mm (10 pensos) | 411657 | 6185926 |
| | ∅ estoma 22/33 = ∅ saco 48 mm (10 pensos) | 411658 | 6185934 |
| | ∅ estoma 33/45 = ∅ saco 61 mm (10 pensos) | 411659 | 6185942 |



*Adhesive Coupling Technology

Sistemas de Duas Peças



| PRODUTO | | REF | CNP |
|--|-------------------------------|--------|---------|
| COMBIHESIVE® II S LITTLE ONES™ (LINHA PEDIÁTRICA) | | | |
| Saco p/ Ileostomia | 32mm (10 sacos+2 adaptadores) | 402566 | 6746123 |
| Penso | 32mm (5 pensos) | 125016 | 6745190 |

Acessórios



| PRODUTO | | REF | CNP |
|-----------------------------------|--------------------|--------|---------|
| STOMAHESIVE® SEAL | | | |
| Anel Moldável de Proteção Cutânea | Fino 48mm (cx. 10) | 413504 | 6412601 |
| Anel Moldável de Proteção Cutânea | 98mm (cx. 10) | 413505 | 6412619 |



| STOMAHESIVE® | | | |
|---------------------|-----|--------|---------|
| Pasta | 60g | 183910 | 6640813 |



| | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|---------|
| NILTAC® | | | |
| Spray Removedor de adesivo médico | (50 ml) | TR101 | 6299099 |
| Toalhetes Removedor de adesivo médico | (cx 30) | TR102 | 6299107 |



| | | | |
|-----------------------------|---------|-------|---------|
| SILESSÉ™ | | | |
| Toalhetes Protector cutâneo | (cx 30) | TR103 | 6299123 |
| Spray Protector cutâneo | (50ml) | TR104 | 6299115 |



| | | | |
|--|------------|-------|---------|
| DIAMONDS® | | | |
| Saquetas de Gelificante Super-Absorvente | 100 unids. | TR105 | 6299131 |



| | | | |
|--------------|-----------|--------|----------------|
| CINTO | (1 cinto) | TR107 | 6745745 |
| Clips | cx 10 | 175632 | comparticipado |

