

LISÄTARVIKKEET

Lisätarvikkeet - suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön avannesidosten kanssa



SIDOKSEN POISTOON



Esenta™

- kirvelemätön silikonipohjainen
liimanpoistosuihke ja -pyyhe

Poistaa helposti liima-aineet.
Ei aiheuta ihon pinnan kuoriutumista eikä
rikkoutumista.



IHON HOITOON



Esenta™

- kirvelemätön silikonipohjainen
ihonsuojasuihke ja -pyyhe

Suojaa ihoa jopa 72 tuntia.¹



VARMAAN OLOON



Diamonds™

- geelityvät ja hajuja
sitovat rakeet

Erittäin imukykyinen Diamonds
geelittää avannepussin sisällön
ja poistaa hajuja.

Viite: 1. Voegeli D, LBF® "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.

KYSY LISÄTIETOJA 0800 179 797

©2022 Convatec Inc. ®/™, Convatec Group omistaa kaikki tuotemerkit. AP-S6743-FIN-FIN-V1 (V1.0)

www.convatec.fi

Convatec Oy • Keilaranta 16 • 02150 Espoo • Puh. 0800 179 797



— forever caring —

0800 179 797

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:



— forever caring —


KÄYTTÖOHJE

NATURA® & NATURA®+
Kaksiosaiset avannesidokset

CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGY™



MUOTOILTAVA KOHORENGAS

MUOTOILTAVA IHONSUOJALEVY KOHOTETTAVALLA RENKAALLA

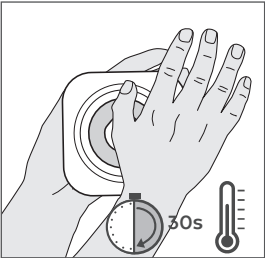


Lämmitä muotoiltavaa ihonsuojalevyä käsien välissä 30 sekuntia. Muotoile ihonsuojalevy rullaamalla avanteesi kokoiseksi.

Älä venytä, vedä tai leikkaa.

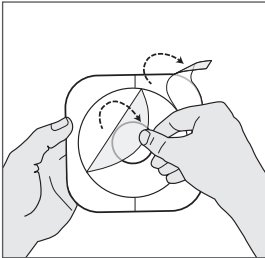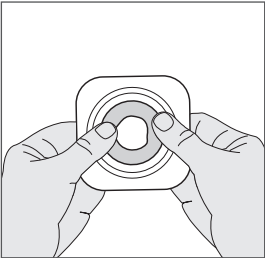


Poista suojakalvo.

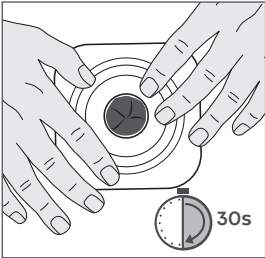


Laita ihonsuojalevy avanteen ympärille, tasoita rypyt ja pidä levyä paikallaan 30 sekuntia.

PUSSIN KINNITTÄMINEN


Sulje tyhjennettävä pussi ennen pussin kiinnittämistä.

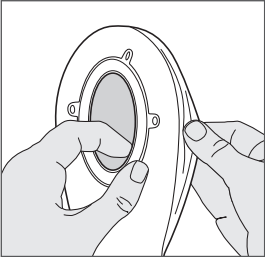


Vedä pussin sivut irti toisistaan, jotta pussiin pääsee hieman ilmaa.

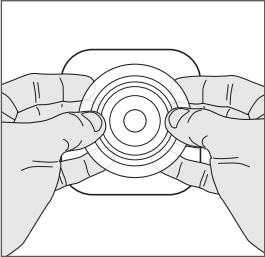

Nosta kohotettava rengas **YLÖS** ja pidä päältä kiinni peukaloilla ja muilla sormilla alapuolelta. Aseta pussin ja ihonsuojalevyn renkaat vastakkain

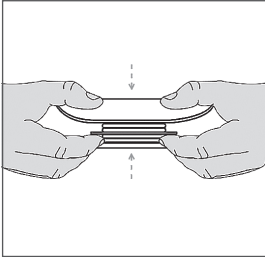


Aloita alhaalta ja paina renkaita toisiaan vasten, kunnes ne napsahtavat kiinni toisiinsa. Aseta sen jälkeen kohotettava rengas **ALAS**-asentoon, jolloin ihonsuojalevystä tulee litteä.

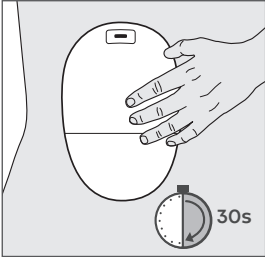

Paina pussia paikoilleen noin 30 sekuntia. **Tarkista aina, että renkaat ovat kiinnittyneet toisiinsa kokonaan. Jos näin ei ole, toista edelliset vaiheet.**



PUSSIN SULKEMINEN JA TYHJENTÄMINEN

TARRASULKIJAPUSSI

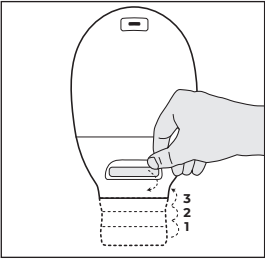


Sulkeminen:
Aloita pussin sulkeminen taittamalla alimmaisesta valkoisesta kaistaleesta. Kun olet taittanut ne kolme kertaa, sulkijat ovat vastakkain. Paina ja nipistä kunnes tunnet, että ne napsahtavat kunnolla yhteen.


Lock-it Pocket: Käännä päällyskangas nurinpäin, jolloin pussinsulkija jää taskuun piiloon.

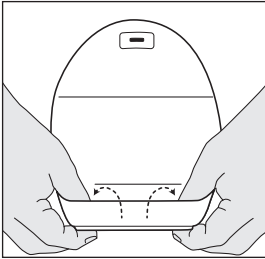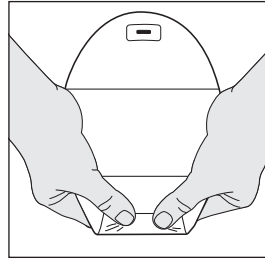




IRTOSULKIJALLA OLEVA PUSSI

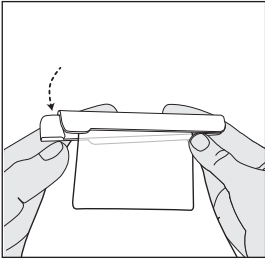

Sulkeminen:
Taita pussin suu ja kiinnitä irtosulkija paikalleen.

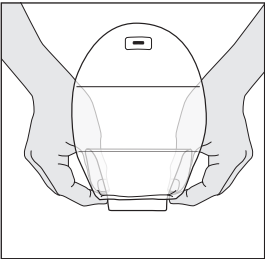


Tyhjentäminen:
Käännä pussinsulkija näkyville päällyskankaan alta. Pidä tyhjennysosaa ylöspäin, avaa sulkijat varovasti ja käännä pussin suu auki. Vetämällä samaan aikaan ylemmästä pussinsulkijasta pussin suu avautuu paremmin. **Lock-it Pocket:** Paina sormilla tyhjennysliuskojen molemmista päistä ja tyhjennä pussin sisältö.

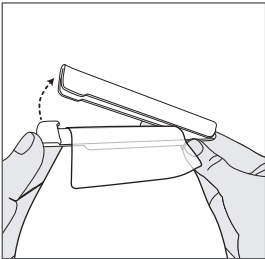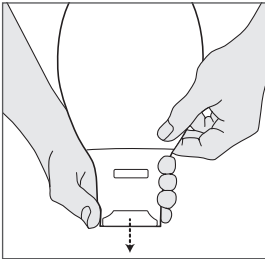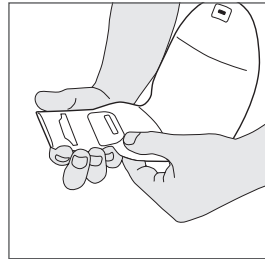



Tyhjentäminen: :
Irrota sulkija ja tyhjennä pussi.

VIRTSA-AVANNEPUSSI



Tarkista oman pussisi tyhjennysventtiili ja lue sen ohjeet. Jokaiseen tyhjennysventtiiliin on omat liittimet.

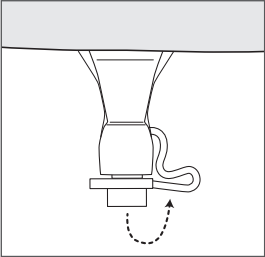


Natura®+ Soft Tap -tyhjennysventtiili

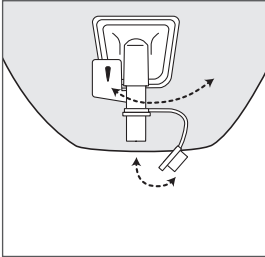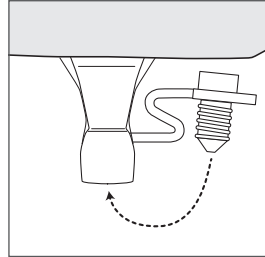


Accuseal™-tyhjennysventtiili

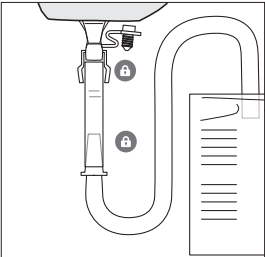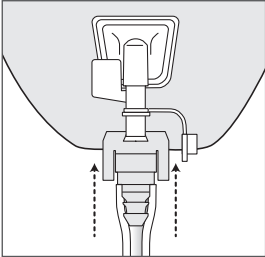

Yöpussiin liittäminen:
Avaa virtsa-avannepussin tyhjennysventtiili, kiinnitä liitin pussiin ja toinen pää yöpussiin. Tarkista kiinnitysten pitävyys.

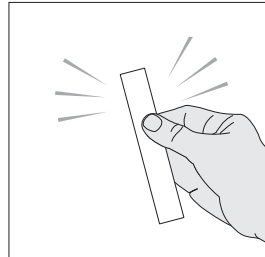


Muista ottaa liitin talteen kun vaihdat yöpussia.

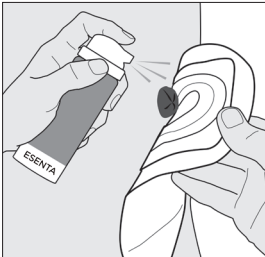

AVANNESIDOKSEN POISTAMINEN

Käytä hellävaraista Esenta™-liimanpoistosuihketta tai -pyyhettä ihonsuojalevyn irrottamiseen.

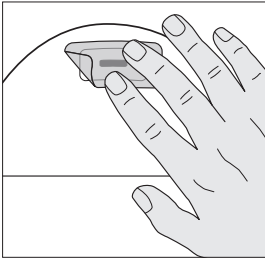

SUODATIN

Peitä suodatin suodatintarralla suihkun ja uimisen aikana. Poista tarra sen jälkeen.