



StomOdor

Avlägsnar lukt från din stomipåse

NYHET!



Medicinteknisk produkt

StomOdor Spray Maxi och Mini

Flaska med 50 eller 210 ml.

StomOdor Spray bryter ner luktmolekyler och har en smörjande effekt i stomipåsen samt förstärker stomipåsens barriär mot genomsläpp av lukt. Den kan också sprayas i luften runt stomipåsen för att avlägsna lukt.

NYHET!



Medicinteknisk produkt

StomOdor Droppar

Flaska med 35 ml.

Dropparna bildar en oljig yta som har en smörjande effekt i stomipåsen och som förstärker stomipåsens barriär mot genomsläpp av lukt. Dropparna skapar också en barriär runt stomipåsens innehåll.

SÅRBEHANDLING • INTENSIVVÅRD • STOMIVÅRD • UROLOGI • OPERATION • FIXATION

Användning och applicering



Spray

Före användning av påsen, spraya 3 – 5 gånger direkt in i påsen genom att sticka in spraymunstycket genom påsens öppning. Den kan användas på alla typer av material och i luften runt stomipåsen. Skaka före användning.



Droppar

Droppa 6 – 15 droppar direkt i påsen innan du använder den. Den angivna mängden uppfyller önskad effekt. Dropparna är inte avsedd för bruk utanför stomipåsen. Skaka före användning.



Anvisningar för handhavande och lagring

Produkten är icke brandfarlig, icke-explosiv och kräver ej särskild hantering. Förvaras torrt vid rumstemperatur. Får inte utsättas för direkt solljus eller frost. Använda och oanvända produktförpackningar sopsorteras som hushållsavfall.

Beställingsinformation

Svenskt vnr	ConvTec kod	Antal/fp	Produkt	Storlek
737900	421708	1 st	StomOdor Spray Maxi	210 ml
*	421709	1 st	StomOdor Spray Mini	50 ml
737901	421710	1 st	StomOdor Drops	35 ml

*Ej förskrivningsbar via TLV

© 2018 ConvaTec Inc ®/TM är varumärken tillhörande ConvaTec Inc

Tillverkare: ALP ecology s.r.o.,
Zborovská 1910/4, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava
Czech Republic
+420 596 636 107
info@alpecology.cz

Lokal distributör:
ConvaTec (Sweden)
Box 15138, 167 15 Bromma
Kundservice: 020-21 22 22
convatec.kundservice@convatec.se
www.convatec.se