


## Set per infusione neria™ soft 90

neria™  
soft 90

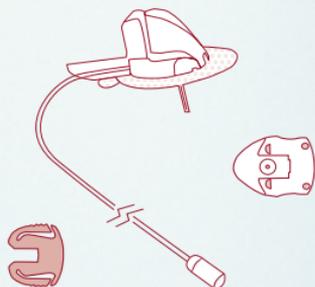

### Specifiche prodotto:

Cannula:	Teflon
Angolo di inserimento:	90 gradi (dritto)
Sconnessione:	Sì, nel luogo di inserimento
Sezione ago:	G27
Diametro cannula:	0.68 mm
Lunghezza cannula:	6 o 9 mm
Lunghezza tubo:	30, 60 o 110 cm
Adesivo:	Incorporato
Sistema di biosicurezza:	Sì, sistema di biosicurezza attivo

#### Lunghezza cannula:

- 6 mm
- 9 mm

#### Lunghezza tubo:

- 30 cm
- 60 cm
- 110 cm

#### Volumi di Priming:

- 0,05 ml
- 0,10 ml
- 0,15 ml


I set per infusione neria™ soft 90 sono allestiti in scatole contenenti 10 set/confezione. Le cannule sono anche vendute separatamente - in scatole contenenti 10 pezzi / confezione.

# Scheda prodotto


Distribuito da:

 **Unomedical**  
A Convatec Company


## Sequenze illustrate per l'utilizzatore dei set per infusione neria™ soft 90

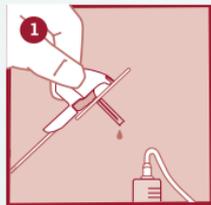


Fare il caricamento (prime) del tubo seguendo le istruzioni fornite dal produttore della pompa.

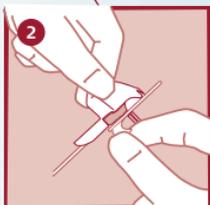


Eliminare la parte anteriore della carta adesiva.

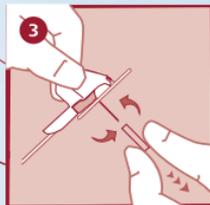

Ruotare e tirare gentilmente per rimuovere la protezione ago.

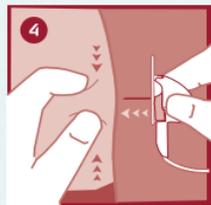

Pizzicare la pelle con una mano e inserire il set per infusione neria™ soft 90 con un inserimento di 90 gradi (dritto).

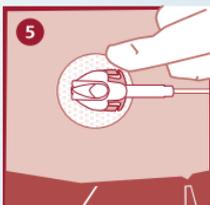


Fare pressione sull'adesivo per fissare il set neria™ soft 90 alla pelle.



Rimuovere l'ago introduttore tirando delicatamente verso l'alto l'impugnatura.



Inserire l'ago introduttore nell'impugnatura dopo l'inserimento.

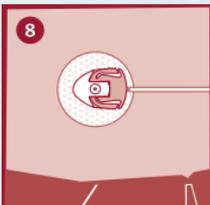

Controllare frequentemente il sito di infusione.

Si ricorda che questa guida illustra semplicemente alcune fasi da seguire quando si inseriscono i set per infusione neria™ soft 90 e non si sostituisce alla lettura delle istruzioni all'uso fornite con il prodotto.

neria è un marchio di Unomedical a/s