




COME UTILIZZARE CORRETTAMENTE LA PLACCA MODELLABILE



Lavati e asciugati con cura mani e cute. Riscalda la barriera cutanea tenendola tra le mani prima di iniziare a modellarla partendo dal foro iniziale. Non rimuovere la carta protettiva trasparente né quella bianca sul retro della placca




Arrotola l'adesivo verso l'esterno con i pollici senza allargare, tirare o tagliare l'adesivo. Fai attenzione a riprodurre approssimativamente le dimensioni della stomia. Schiaccia l'adesivo arrotolato, in modo da mantenerne le dimensioni che hai personalizzato

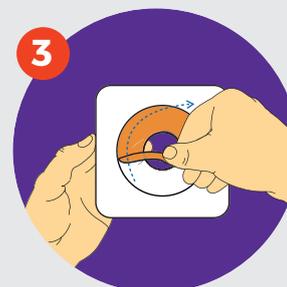

Rimuovi la carta trasparente e applica immediatamente la barriera sulla cute, centrando la stomia.



Con le mani avvicina bene l'adesivo ai contorni della stomia

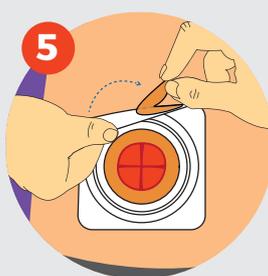

Rimuovi la carta bianca



Fai aderire e spiana il cerotto esterno



Applica la sacca. Tieni la mano sopra il dispositivo, premendo per circa 30 secondi, per accertarti che abbia aderito bene

Disponibile per il sistema due pezzi di ConvaTec

Per maggiori informazioni, contatta il numero verde gratuito **800.930.930** dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 o manda un'e-mail all'indirizzo convatel.italia@convatec.com
www.convatec.it

**Numero verde destinato ad assistenza tecnica*

®/TM sono marchi registrati di Convatec Inc. © 2016 Convatec Inc.,

Dispositivo medico **CE** Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso

 **ConvaTec**