

Come faccio a sapere che la pompa sta funzionando correttamente?

La spia luminosa verde “✓” lampeggerà continuamente ad indicare che la pompa sta funzionando correttamente.

Cosa indicano le spie luminose?

Le spie luminose presenti sulla pompa sono indicatori visivi dello stato funzionale della pompa:




Se la spia luminosa gialla “☹” comincia a lampeggiare, significa che le batterie devono essere sostituite entro 24 ore. Prema il tasto blu per 3 secondi per spegnere la pompa e sostituire le batterie (vedere pag.3). Prema il tasto blu per 3 secondi per accendere la pompa. La spia luminosa verde “✓” comincerà a lampeggiare confermando che la pompa si è riavviata e la pressione negativa è stata reinstaurata.

Se le batterie non vengono sostituite entro 24 ore, la pompa si spegnerà automaticamente interrompendo la terapia e la spia luminosa gialla “☹” lampeggerà quando viene premuto il tasto blu.

La spia luminosa gialla “!” comincia a lampeggiare quando si verifica una perdita d’aria dalla medicazione e la pompa non trasmette più pressione negativa. La pompa si spegnerà dopo 30 secondi. Si accerti che la medicazione sia ben adesa e priva di grinze ai bordi e alle strisce di fissaggio dove si potrebbero verificare perdite. Si assicuri anche che i connettori del tubo siano ben allacciati. Quindi prema il tasto blu per 3 secondi e riavvii la pressione negativa. La spia luminosa verde “✓” comincerà a lampeggiare. Se la spia luminosa gialla “!” ricomincerà a lampeggiare, ripeta il processo spianando eventuali grinze della medicazione e prema il tasto blu. Se la spia luminosa gialla “!” continua a lampeggiare, contatti il professionista sanitario che la sta seguendo perché è probabile che la medicazione debba essere sostituita.



4.

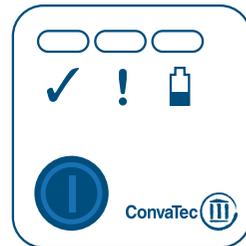

Cosa devo fare se la pompa smette di funzionare?

1. Se nessuna delle spie luminose sta lampeggiando, allora prema il tasto blu per 3 secondi. Se la pompa non si riavvia e nessuna delle spie luminose lampeggia, allora provi a sostituire le batterie.



2. Se la pompa non si riavvia nonostante abbia premuto il tasto blu e cambiato le batterie, ma le due spie luminose gialle “!” e “☹” lampeggiano alternativamente, allora la pompa ha esaurito la sua durata di 30 giorni ed è necessaria una nuova pompa. Contatti l’operatore sanitario che la sta seguendo.

Contatti immediatamente l’operatore sanitario che la sta seguendo in tutti i seguenti casi:

- Se vede segni di irritazione o aumento di dolore.
- Se il fluido della lesione fuoriesce dalla medicazione.
- Se vede segni di sanguinamento.
- Se la cute intorno alla lesione diventa rossa, calda o dolente.
- Se la medicazione si allenta o si stacca.

Per qualunque altro dubbio o necessità di informazioni contatti immediatamente l’operatore sanitario che la sta seguendo.

5.

Numero verde ConvaTec 800.930.930
dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00
www.convatec.com

Avelle è un marchio registrato di ConvaTec Inc. ©2016 ConvaTec Inc.

 ConvaTec

Avelle®
Negative pressure, positive power

Sistema a Pressione Negativa per la cura delle lesioni cutanee



Informazioni per i pazienti

Ha ricevuto questo opuscolo in quanto utilizzatore del Sistema Avelle® di Terapia a Pressione Negativa per la cura delle lesioni cutanee.

Legga attentamente tutte le informazioni contenute e se ha qualche dubbio contatti l’operatore sanitario che la sta seguendo.

 ConvaTec

Sistema a Pressione Negativa per la cura delle lesioni cutanee

Che cos'è il Sistema Avelle®?

Il Sistema Avelle® è composto da una medicazione per lesioni cutanee, collegata ad una piccola pompa che produce un effetto suzione chiamato Terapia a Pressione Negativa (NPWT).



Come funziona?

La medicazione viene posizionata sulla lesione grazie a delle strisce di fissaggio; quindi viene connessa alla pompa. Azionando la pompa si applica alla medicazione un effetto suzione, l'aria viene estratta dalla medicazione e il fluido della lesione viene assorbito all'interno della medicazione. L'applicazione di questa terapia mediante pressione negativa (NPWT), unitamente alla rimozione del fluido della lesione e dei batteri in esso contenuti, favoriscono il processo di guarigione della sua lesione.

Perché devo usare questo sistema per la mia lesione?

L'operatore sanitario che la sta seguendo ha ritenuto opportuno trattare la sua lesione cutanea con l'applicazione della terapia mediante pressione negativa (NPWT) ed ha scelto per lei il Sistema Avelle®.

Farà male?

Potrebbe provare solo una leggera sensazione di tensione a livello della lesione, la prima volta che la Pompa Avelle® viene attivata, ma se dovesse sentire dolore le consigliamo di informare l'operatore sanitario che la sta seguendo.


1.

Per quanto tempo dovrò seguire questa terapia?

I tempi di applicazione variano da paziente a paziente. L'operatore sanitario che l'ha in cura le saprà indicare la durata adeguata al suo caso. La medicazione in sé può restare applicata fino a 7 giorni, mentre la pompa può essere utilizzata fino a 30 giorni.

La medicazione deve essere sostituita?

Sì. La frequenza dei cambi di medicazione variano da paziente a paziente e dipendono soprattutto dal tipo di lesione e da quanto essudato questa produce. In alcuni casi la medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni, in altri casi deve essere sostituita molto prima. Sarà l'operatore sanitario che la segue a dirle quando sostituire la medicazione. Durante il cambio di medicazione potrebbe provare una sensazione di leggero disagio di cui deve sempre informare la persona che le sta seguendo, la medicazione.

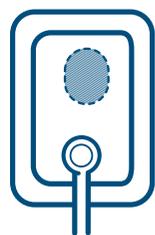

La medicazione è posizionata correttamente



La medicazione deve essere sostituita




La medicazione deve essere sostituita


Durante la notte devo scollegare la pompa?

No. Per assicurare l'applicazione continua della pressione negativa, la pompa deve restare sempre collegata alla medicazione e sempre accesa (tranne quando ci si lava – vedere pag.3). Il sistema è silenzioso e non dovrebbe disturbare il sonno. Mentre dorme è importante che posizioni la pompa in un luogo sicuro, dove non possa cadere a terra.


2.

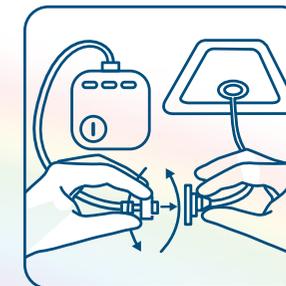

Prima di fare la doccia preme il tasto blu per spegnere la pompa e stacchi i connettori per scollegare la medicazione dalla pompa.

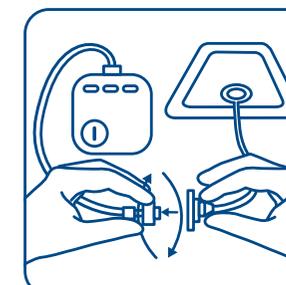

Dopo la doccia ricolleggi la pompa alla medicazione allacciando i connettori e premendo il tasto blu per riaccendere la pompa.

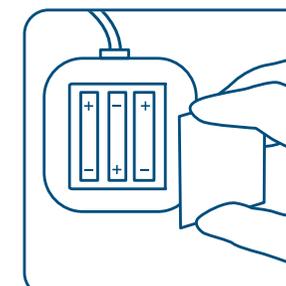

3.

Posso fare il bagno o la doccia?

E' possibile fare una doccia veloce, ma non bisogna spruzzare acqua sulla medicazione né immergerla. Prima della doccia è necessario scollegare la pompa dalla medicazione. Per farlo preme il tasto blu per 3 secondi per disattivare la pompa (la spia luminosa verde "✓" smetterà di lampeggiare e si spegnerà), quindi scolleghi la pompa (se direttamente connessa alla medicazione), o il tubo della pompa, dalla medicazione svitando i connettori. Riponga la pompa in un luogo sicuro e asciutto mentre si lava. Dopo la doccia ricolleggi la pompa alla medicazione allacciando i connettori e premendo il tasto blu per 3 secondi per riaccendere la pompa. La spia luminosa verde "✓" comincerà a lampeggiare indicando che la pompa sta funzionando correttamente.

Posso pulire la pompa?

Sì. Per pulire la pompa strofini con un panno morbido inumidito con acqua e sapone neutro. Se la pompa è stata contaminata da fluidi corporei, la lavi usando un panno imbevuto di antimicrobico a base di alcool isopropilico o a base d'acqua. Non va immersa in fluidi.

Come si cambiano le batterie?

Se la spia luminosa gialla "⚡" comincia a lampeggiare è necessario sostituire le batterie entro 24 ore. Prema il tasto blu per 3 secondi per spegnere la pompa. Apre lo sportellino del vano batterie sul retro della pompa ed inserisca 3 batterie AAA (si raccomandano batterie al litio) orientandole come indicato nel vano stesso. Tutte le spie luminose lampeggeranno una volta contemporaneamente ad indicare che le batterie sono state posizionate correttamente. Richiuda lo sportellino del vano batterie.