

Sık Sorulan Sorular

S. Diamonds™ ne şekilde satılır?

C. Kapaklı, kolay açılan kavanozlarda, içerikleri:

- 100 çözünebilir saşe
- 1 kilitli taşıma poşedi
- Kullanım Talimatları broşürü

S. Diamonds™ patentli midir?

C. Evet.

S. Diamonds™ nasıl saklamalıyım?

C. Serin, kuru bir yerde saklayınız. Seyahat ederken, kullanışlı kilitli taşıma poşedini kullanınız. Kullanım Talimatları broşürünü lütfen okuyunuz.

S. Diamonds™'in raf ömrü nedir?

C. Açılmaması kaydıyla, üretim tarihinden itibaren dört yıl.

S. Diamonds™ CE logosuna sahip midir?

C. Evet. Diamonds™, Avrupa Birliği Yönetmeliği 93/42/EEC'ye uygun bir şekilde tıbbi cihazlar için CE logosu taşır.

S. Stoma çıktım her zamankinden daha koyu. Bundan endişe duymalı mıyım?

C. Hayır. Daha koyu renk ve/veya siyah lekeler patentli ActiveOne™ Koku Kontrol sisteminin zararsız görsel belirtileridir.

S. Bazen çıktı rengimi, deęişiklik olup olmadığını anlamak için kontrol etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

C. Çıktınızın rengini kontrol edeceğiniz süre boyunca, geçici olarak Diamonds™ kullanmayın, yeni temiz bir torbaya geçin. Çıktı renginizden tatmin olduğunuzda kullanıma devam edin.

S. Kaç tane Diamonds™ saşeyi kullanmalıyım?

C. Genelde bir saşeyi yeterlidir. Gerektiğinde ek saşeler kullanılabilir.

S. Saşeyi açmalı mıyım?

C. Hayır. Her bir saşeyi torbanıza boşaltma açıklığından veya adaptör deliğinden içeri konulmak üzere tasarlanmış tek bir dozdan oluşur. Saşenin kağıdı, torbanızın içinde erimesi için tasarlanmıştır.