

## Mise en place du sac

**A**

Avant de mettre le sac en place, y laisser entrer un peu d'air en l'étirant délicatement.

**B**

Lorsque la barrière cutanée est solidement collée à l'abdomen, insérez trois doigts de chaque main sous la **collerette** de l'adaptateur. Aligner le bord inférieur de la **collerette** de l'adaptateur à celui de la **collerette** du sac. En partant des bords inférieurs, appliquer une légère pression en remontant sur toute la circonférence des deux **collerettes** jusqu'à ce qu'un clic audible indique que le sac est solidement fixé à l'adaptateur. Tirer avec précaution sur le sac afin de vérifier que les deux pièces sont solidement jointes.



## Mode d'emploi de l'adaptateur pour réduction de la pression SUR-FIT Natura® avec la barrière cutanée malléable SUR-FIT Natura®.

(incluant la barrière cutanée convexe)

## Retrait du sac

Séparer le sac et l'adaptateur en tenant l'onglet du sac avec une main et la **collerette** de l'adaptateur avec l'autre. S'assurer de ne pas détacher l'adaptateur de la barrière cutanée si vous ne planifiez pas de changer cette dernière.

## Retrait de la barrière cutanée

Décoller délicatement la barrière cutanée de la peau en appuyant sur la peau environnante avec l'autre main. On peut utiliser le dissolvant AllKare® pour enlever tout résidu provenant de la barrière cutanée.

## Entretien de la bordure adhésive

Les rebords de la **bordure adhésive** peuvent décoller lorsqu'ils sont exposés à l'eau. Assécher simplement la **bordure adhésive** par tapotements, lisser tous les plis et remettre en place. Garder la **bordure adhésive** exempte de solvants, d'huiles et de crèmes.




Pour de plus amples renseignements sur ce produit ou d'autres produits de ConvaTec, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel), du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) au **1 800 465-6302**, ou visitez notre site Web au [www.convatec.ca](http://www.convatec.ca)

Consulter la notice pour le mode d'emploi détaillé.  
SUR-FIT Natura et AllKare sont des marques déposées de ConvaTec Inc.  
© 2009 ConvaTec Inc. CA-08-1457-OF Vcode: 953



Composantes  
de la barrière  
cutanée  
malléable  
SUR-FIT  
Natura®

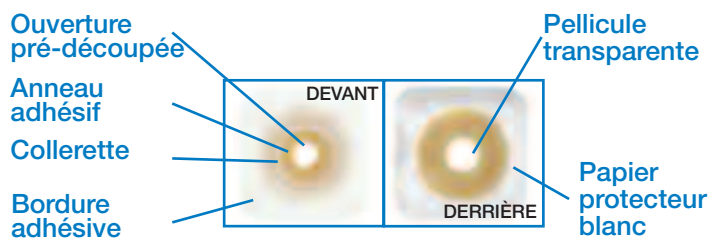

## Application de la **barrière cutanée**

### AVANT L'APPLICATION

- S'assurer que la dimension de la **collerette** de la barrière cutanée malléable SUR-FIT Natura®, de l'adaptateur pour réduction de la pression SUR-FIT Natura® et du sac SUR-FIT Natura® est la même.
- Les mains et la peau péristomiale (peau entourant la stomie) doivent être propres, sèches et sans trace de solvants ni de substances grasses.

### ÉTAPE 1 | MESURER

Tenir la barrière cutanée devant votre stomie en s'assurant que la **collerette** fait face vers l'extérieur.

Utiliser la **pellicule transparente** de la barrière cutanée comme fenêtre pour déterminer la taille et la forme de la stomie.

NOTE : CE PRODUIT ÉTANT MALLÉABLE,  
IL EST DÉCONSEILLÉ DE LE COUPER !



### ÉTAPE 2 | MODELER

Pour adapter l'ouverture de la barrière cutanée à la stomie, mettre ses doigts sur les bords de l'**ouverture pré-découpée** et les rouler vers l'extérieur pour agrandir l'ouverture jusqu'à ce qu'elle atteigne la bonne taille et la bonne forme de votre stomie.

Tout en roulant l'**adhésif** sur lui-même, utiliser la **pellicule transparente** comme fenêtre pour s'assurer que l'ouverture que vous êtes en train de créer soit de la bonne taille et à la forme de votre stomie.



### ÉTAPE 3 | APPLICATION DE L'ADAPTATEUR POUR RÉDUCTION DE LA PRESSION SUR-FIT NATURA®

- A** Localiser les bords inférieurs de la **collerette** de la barrière cutanée SUR-FIT Natura® et de la **collerette** de l'adaptateur pour réduction de la pression SUR-FIT Natura®. En partant des bords inférieurs, appliquer une légère pression en remontant sur toute la circonférence des deux **collerettes** jusqu'à ce qu'un clic audible indique que l'adaptateur est solidement fixé à la barrière cutanée. Tirer avec précaution sur l'adaptateur afin de vérifier si les deux pièces sont solidement jointes.



- B** Retirer la **pellicule transparente** de la barrière cutanée.



- C** Centrer la stomie dans l'ouverture de la barrière cutanée, puis appuyer sur la barrière cutanée pour la coller en place.



### ÉTAPE 4 | SCELLER L'AJUSTEMENT SANS INQUIÉTUDES

- A** Au besoin, remodeler ou dérouler l'**anneau adhésif** vers la stomie de manière à ce qu'il épouse étroitement le contour de la stomie.

Appuyer sur l'**anneau adhésif** entre la collerette et la stomie pour qu'il épouse étroitement le contour de la stomie.

Tenir l'**anneau adhésif** en place pendant au moins 30 secondes pour faire adhérer solidement la barrière cutanée à la peau.



- B** Retirer le **papier protecteur blanc**, puis appuyer sur la **bordure adhésive** pour la faire adhérer à la peau en éliminant tous les plis.

